
Enterprise 9000X




Desengate do apoio das costas para RCP

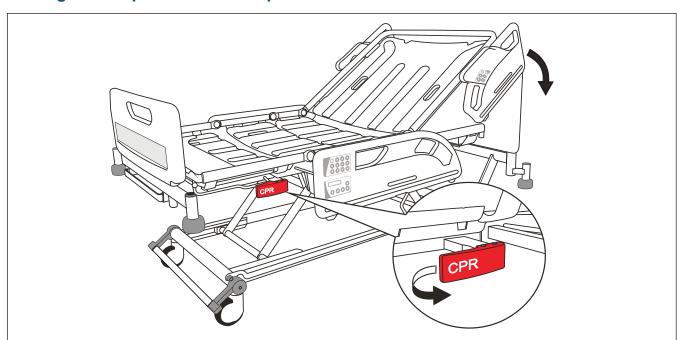

Puxe a pega para RCP vermelha situada em cada lado da cama para baixar rapidamente o apoio das costas.

Travões e direção



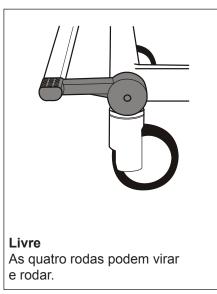




Os travões devem ser sempre acionados quando a cama estiver estacionária.



Grades de segurança

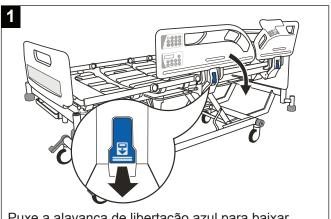


Puxe a alavanca de libertação azul para baixar a grade lateral.




Para levantar a grade lateral, puxe-a para cima segurando na pega e afastando-a da cama, até trancar na posição subida.

Ajuste do comprimento da cama (três posições definidas)

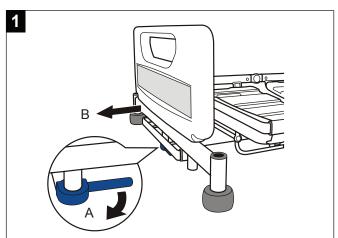


Puxe o manípulo azul de travão da extensão (A). Puxe a estrutura de cama (B) para a posição desejada e solte o manípulo.

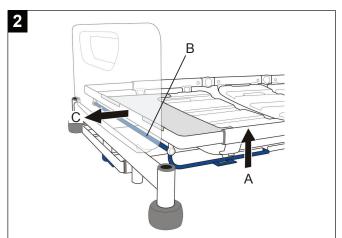

Levante a barra do fecho da extensão azul (A) e segure a parte do meio da trave (B). Depois, puxe o estrado do colchão para a posição (C).

Ajuste da secção dos gémeos

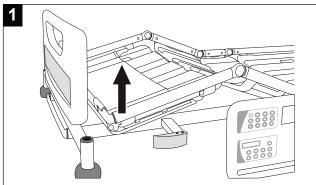

Segure o lado da estrutura da secção dos gémeos e levante a secção dos gémeos para cima.

