


CPR-ryglænsudløser



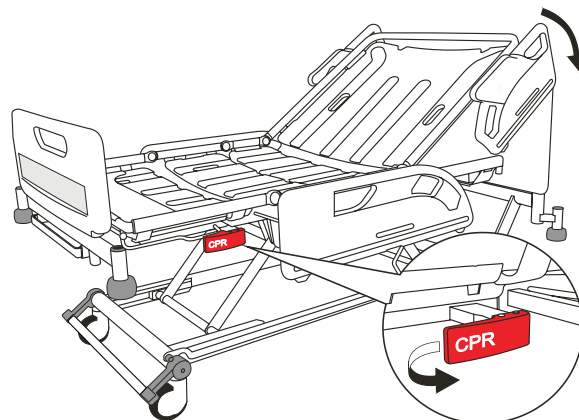


Træk i det røde CPR-håndtag, der er placeret i begge sider af sengen, for at sænke ryglænet hurtigt.


Sengeheste – hævning



Sengehesten må ikke være klappet op, hvis låsebolten er synlig bag den blå betjeningsknap.

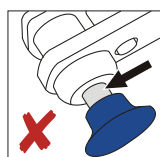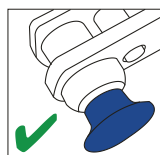
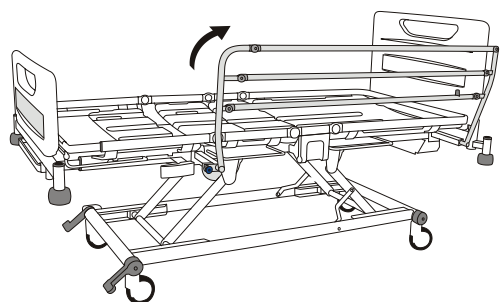


Sørg for, at sengehesten er fastlåst, når den er i hævet position.

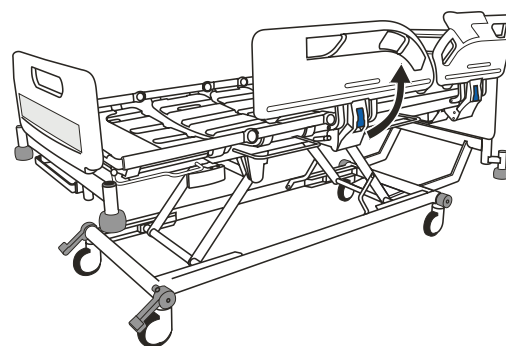


Grib fat om sengehesten. Træk sengehesten op, indtil den låser sig fast i hævet stilling.

Sengeheste – sænkning

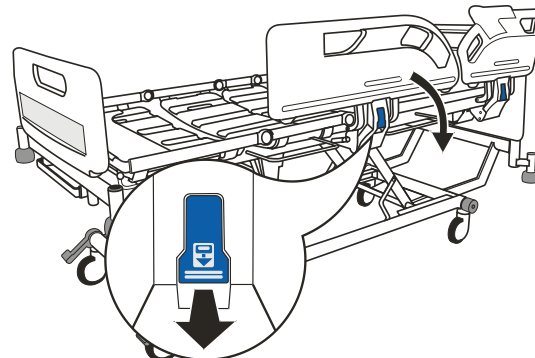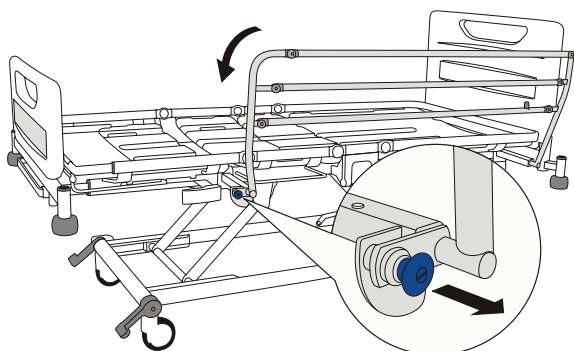



Grib fat om sengehesten. Træk i den blå betjeningsknap eller det blå udløserhåndtag, og sænk sengehesten.

Bremser og styring

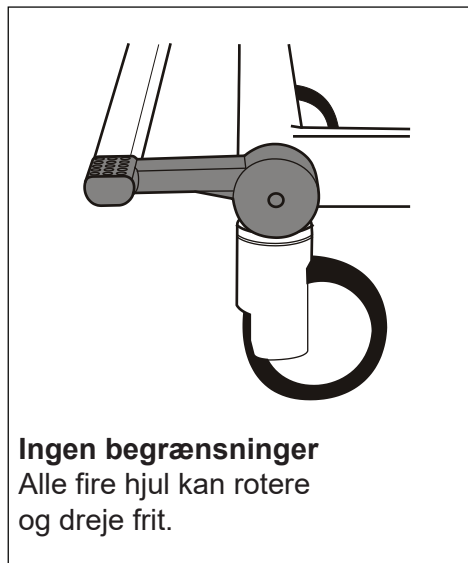

Bremserne skal altid være aktiveret, når sengen står stille.

Tilpasning af sengelængde (tre faste positioner)

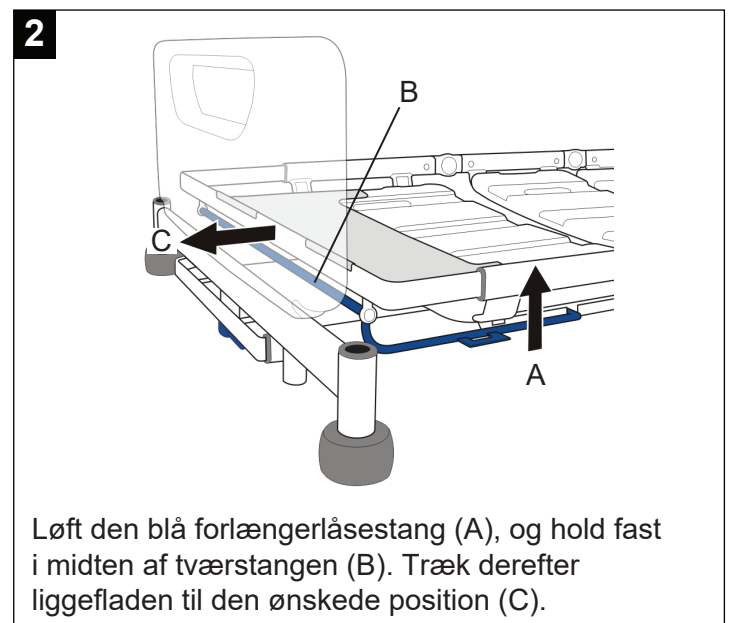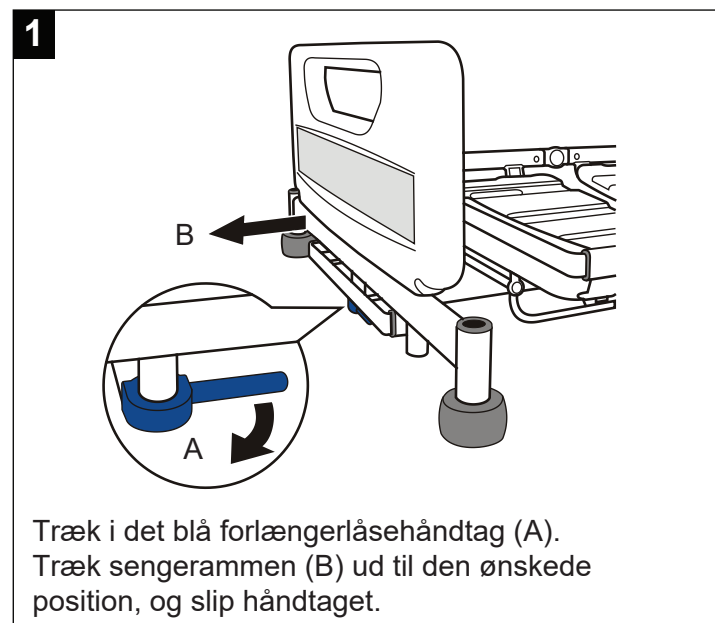

Tilpasning af lægsektion

