


Sblocco RCP schienale



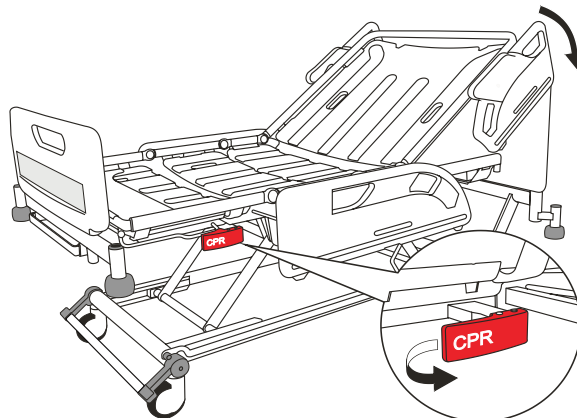


Tirare la maniglia rossa RCP su entrambi i lati del letto per abbassare velocemente lo schienale.


Spondine laterali - sollevamento



Non lasciare le spondine laterali in posizione sollevata se il perno di bloccaggio è visibile dietro il pomello di azionamento di colore blu.

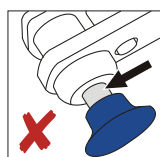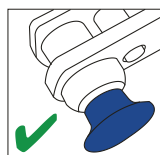
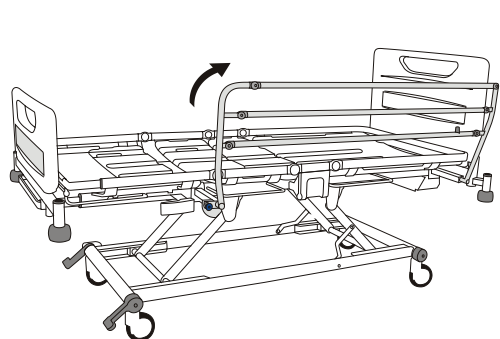


Accertarsi che la spondina laterale sia bloccata quando è in posizione sollevata.

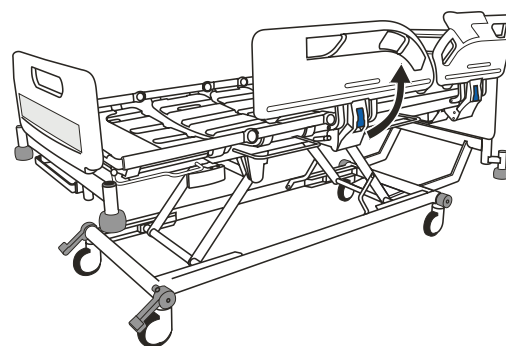


Tenere la spondina laterale. Tirare la spondina laterale verso l'alto fino a bloccarla in posizione sollevata.

Spondine laterali - abbassamento

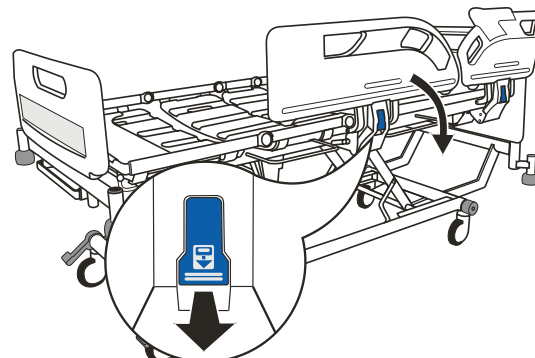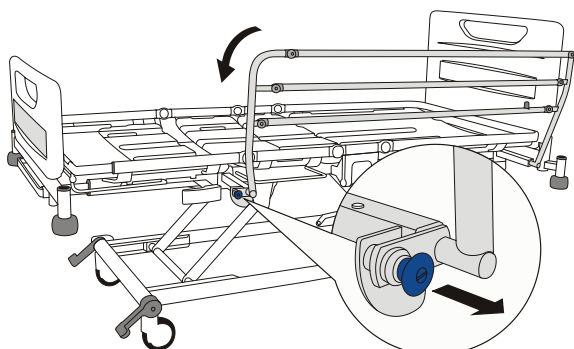



Tenere la spondina laterale. Tirare il pomello di azionamento di colore blu o la leva blu di sgancio e abbassare la spondina laterale.

Sistema frenante e di guida

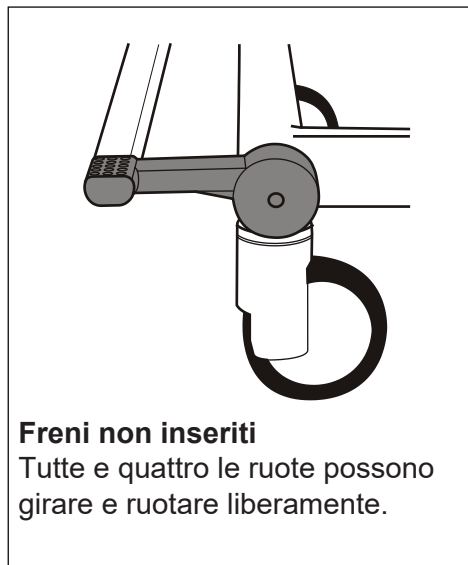

I freni devono essere sempre inseriti quando il letto è fermo.

Regolazione della lunghezza del letto (tre posizioni predefinite)

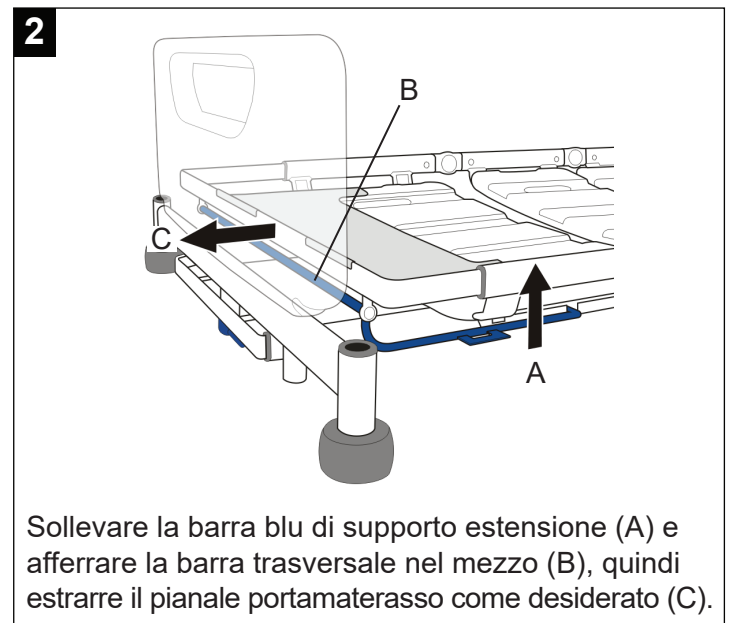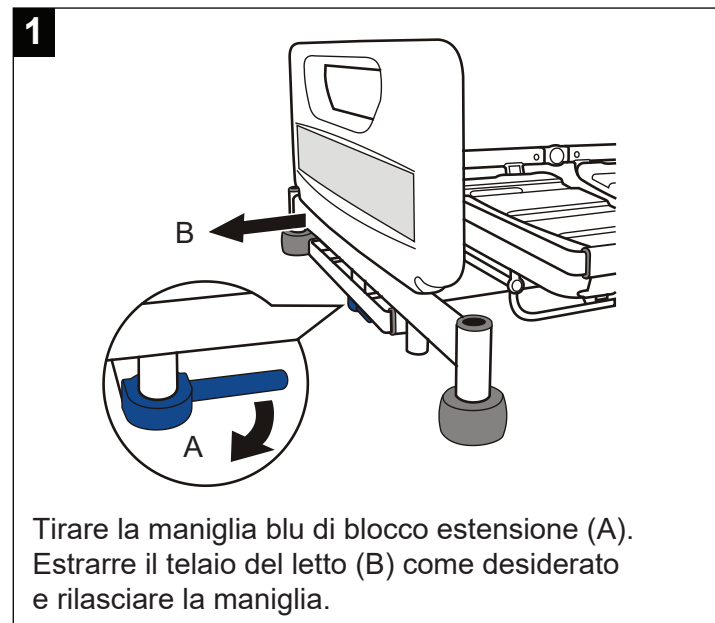

Regolazione della sezione polpaccio

