

**ADVARSEL**

Afbryd sengen fra elnetforsyningen, inden der påbegyndes nogen form for rengøring eller vedligeholdelse. Sengen fungerer stadig på batteriet, hvis funktionen ikke er blevet låst på PKP'et. Netstikket og strømforsyningskablet må ikke blive våde.

FORSIGTIG

Brug ikke skuremidler eller fenolbaserede desinfektionsmidler. Anvend ikke vandstrålerengøring eller vasketunneller. Fedtet må ikke fjernes fra aktuatorstemplerne.

Rengør og desinficer ugentligt.
Rengør og desinficer før hver ny plejemodtager.

Nødvendigt tilbehør:

- Beskyttelsestøj
- Neutralt rengøringsmiddel
- Natrium-diklorisocyanurat (NaDCC) i en koncentration på 1.000 ppm (0,1 %) tilgængeligt chlor
- Natrium-diklorisocyanurat (NaDCC) i en koncentration på 10.000 ppm (1 %) tilgængeligt chlor
- Varmt vand
- Engangsklud
- Engangspapirhåndklæder

Natrium-diklorisocyanurat (NaDCC) anbefales som desinfektionsmiddel. Hvis institutionens protokoller kræver brugen af et andet desinfektionsmiddel end NaDCC, skal dette anvendes med forsigtighed og i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Rengøring

1. Fjern madrassen og alt tilbehør fra sengen.
2. Fjern hoved- og fodgærderne samt lagnerne på liggefladen fra sengen.
3. Rengør alle overflader med en engangsklud, der er fugtet med vand og et neutralt rengøringsmiddel. Begynd med sengens øverste sektioner, og rengør langs alle vandrette overflader. Fortsæt metodisk mod sengens nederste sektioner, og rengør sengehjulene til sidst.
4. Aftør med en ny engangsklud, der er fugtet med vand. Tør af med engangspapirhåndklæder.
5. Lad de rengjorte dele få lov til at tørre, inden madrassen anbringes igen.

Desinfektion

6. Aftør alle overflader med NaDCC (1.000 ppm tilgængeligt chlor). I tilfælde af opsamling af kropsvæsker, f.eks. blod, aftørres med NaDCC (10.000 ppm tilgængeligt chlor).

