



AVVERTENZA

Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia, scollegare il letto dalla rete elettrica. Il letto funzionerà con alimentazione a batteria se la funzione non è stata bloccata sul Pannello Controllo Operatore (ACP).

Evitare che lo spinotto e il cavo di alimentazione si bagnino.

ATTENZIONE

Non utilizzare sostanze o spugne abrasive, né disinfettanti a base fenolica.

Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione, né tunnel di lavaggio.

Non rimuovere il grasso dai pistoni dell'attuatore.

Pulire e disinfettare settimanalmente.

Pulire e disinfettare prima di nuovi pazienti.

Accessori necessari:

- Indumenti protettivi
- Detergente neutro
- Dicloroisocianurato di sodio (NaDCC) a 1.000 ppm (0,1%) di cloro disponibile
- Dicloroisocianurato di sodio (NaDCC) a 10.000 ppm (1%) di cloro disponibile
- Acqua calda
- Panno monouso
- Salviette di carta monouso

Come disinfettante si raccomanda il dicloroisocianurato di sodio (NaDCC). Se i protocolli della struttura richiedono l'uso di un disinfettante diverso dal NaDCC, utilizzare con cura e in conformità alle istruzioni del produttore.

Pulizia

1. Rimuovere il materasso e tutti gli eventuali accessori collegati.
2. Rimuovere la testiera, la pediera e il pianale portamaterasso dal letto.
3. Pulire tutte le superfici con un panno monouso inumidito con acqua e detergente neutro. Pulire prima le sezioni superiori del letto per poi continuare su tutte le superfici orizzontali. Proseguire sistematicamente, spostandosi gradualmente verso le sezioni inferiori del letto e, infine, pulire le ruote.
4. Strofinare con un nuovo panno monouso inumidito con acqua. Asciugare con salviette di carta monouso.
5. Prima di riposizionare il materasso, lasciare asciugare le parti interessate.

Disinfezione

6. Pulire tutte le superfici con NaDCC (1.000 ppm di cloro disponibile).
Se sono presenti residui di liquidi corporei, ad es. sangue, pulire con NaDCC (10.000 ppm di cloro disponibile).