


Flowtron ACS900

Overvågning af compliance


Overvågning af compliance; registrerer og viser den faktiske behandling samt tiden for manglende compliance. Alarmerer om fjernelse af manchetten for at gøre det nemmere at spore og dokumentere IPC-behandling.

Aktivér/deaktiver overvågning af compliance


1. Konfigurer overvågning af compliance:
 - Sørg for, at ingen manchetter er koblet til pumpen.
 - Tryk på den midterste betjeningsknap og hold den nede for at komme til opsætningskærmen.

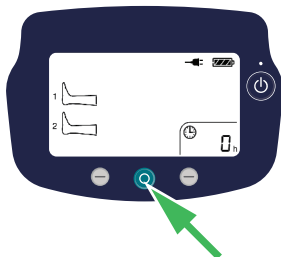

2. Tryk på den venstre knap for at bladre gennem valgmulighederne:
 - TIL med hørbar alarm aktiveret
 - TIL med hørbar alarm deaktiveret
 - FRA (pumpens kørselstid vises i stedet for den akkumulerede behandlingstid)

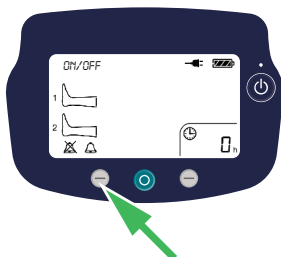

3. Tryk på den midterste betjeningsknap for at vælge den viste valgmulighed.

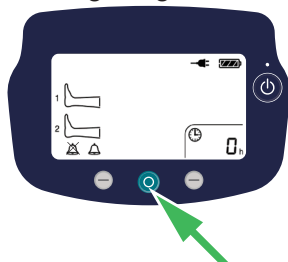


Nulstil overvågningen af compliance (akkumuleret behandlingstid)


1. Når pumpen er i tilstanden Standby, trykker du på højre betjeningsknap og holder den nede i to sekunder. Tiden blinker i 2 minutter. Tryk på den midterste betjeningsknap og hold den nede i tre sekunder for at nulstille tiden.
2. Tryk på den højre betjeningsknap igen for at bekræfte. Hvis der ikke trykkes på denne knap inden for to minutter, nulstilles timeren IKKE og vender tilbage til at vise de oprindelige data.

Start behandling


1. Sæt manchetten på plejemodtageren.

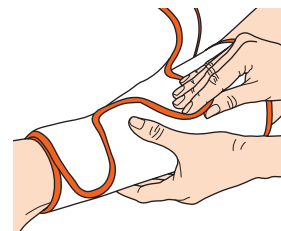

2. Tilslut manchetten til pumpen.

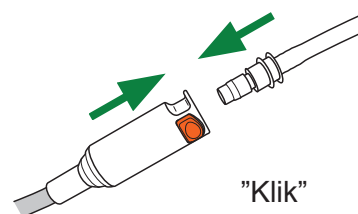


3. Tryk på den midterste betjeningsknap for at starte behandlingen.

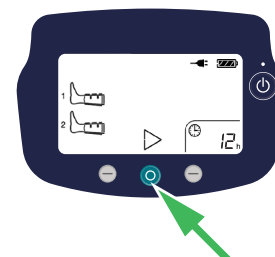


Aflæs displayet

1. Under brug overvåger ACS900 hver oppumpning for at sikre, at den leverer profylakse til plejemodtageren. Den akkumulerede behandlingstid vises i nederste højre hjørne.

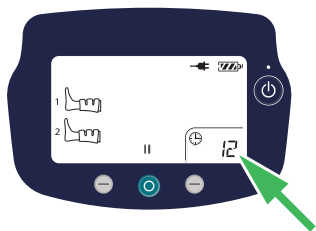

2. Hvis pumpen registrerer, at en manchet er blevet taget af ekstremiteten, mens pumpen er i driftstilstand, blinker den tilhørende ekstremitetsgrafik.

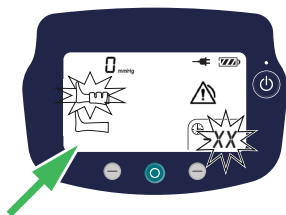


Plejepersonalet advares om, at der ikke gives profylakse.


Rækkefølgen af meddelelser:

- Benikonet begynder at blinke, og tiden for manglende compliance vises på skærmen.
- Efter 3 cyklusser vises advarselstrekanten på skærmen, og den grønne LED begynder at blinke.
- Efter 10 minutter skifter den blinkende grønne LED til konstant gul med en valgfri hørbar alarm.


Derudover vil pumpen tælle og vise, hvor længe behandlingen ikke har fundet sted (tid for manglende compliance). Dette vises først i blinkende minutter.

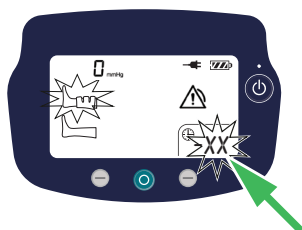

3. Efter registrering af 1 times manglende compliance skifter displayet til at vise tiden i blinkende timer.

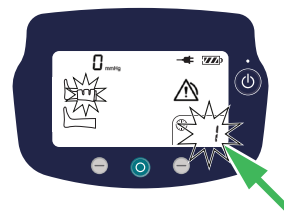


4. Tryk på højre betjeningsknap for at se de ekstra minutter oveni timen; et "-" vises før minutter på displayet.

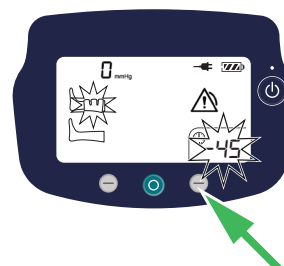


Afhjælp advarsel/alarm

1. For at fjerne advarslen/alarmen vedrørende overvågning af compliance skal de afmonterede manchetter sættes på ekstremiteten igen.

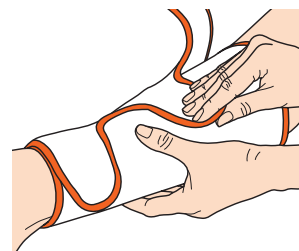

2. Tiden med manglende compliance fjernes automatisk, når pumpen registrerer, at manchetten er blevet sat på ekstremiteten igen. Pumpen går tilbage til at vise den akkumulerede behandlingstid og fortsætter med at tælle fra det sted, hvor den slap.

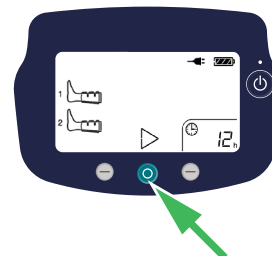

3. Alternativt kan pumpen sættes på pause og genstartes.