


# Flowtron ACS900

## Monitoraggio della conformità


Monitoraggio della conformità; registra e visualizza la terapia effettiva e il tempo non conforme. Allerta sulla rimozione del gambaie per facilitare il monitoraggio e confermare la terapia CPI.

### Attivazione/Disattivazione del monitoraggio della conformità

1. Configurazione del monitoraggio della conformità:
  - Assicurarsi che non vi siano gambali collegati alla pompa.
  - Tenere premuto il pulsante centrale per accedere alla schermata di configurazione.

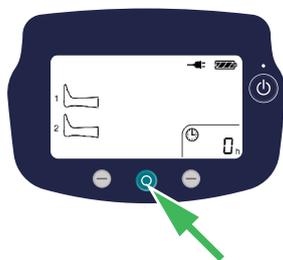

2. Premere il pulsante sinistro per scorrere le opzioni:
  - ON con allarme acustico attivato
  - ON con allarme acustico disattivato
  - OFF (il tempo di funzionamento della pompa viene visualizzato al posto del tempo di terapia accumulato)

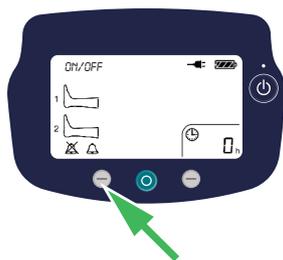

3. Premere il pulsante centrale per selezionare l'opzione visualizzata.




### Reimpostare il monitoraggio della conformità (tempo terapia accumulato)


1. Quando la pompa si trova in modalità Standby, tenere premuto il pulsante di destra per 2 secondi. Il tempo lampeggia per 2 minuti. Tenere premuto il pulsante centrale per 3 secondi per azzerare il tempo.
2. Premere nuovamente il pulsante destro per confermare. Se questo pulsante non viene premuto entro due minuti, il timer NON verrà resettato e tornerà a mostrare i dati originali.

### Avvio terapia


1. Applicare il gambaie al paziente.

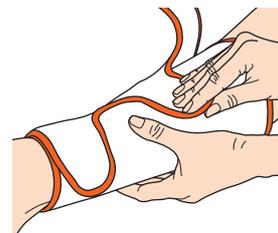

2. Collegare il gambaie alla pompa.

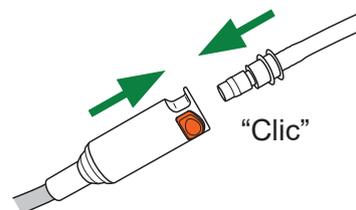


3. Premere il pulsante centrale per avviare la terapia.

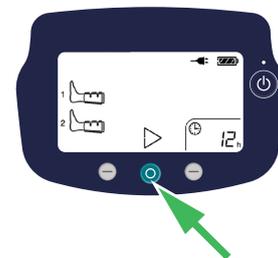

## Letture del display

1. Durante l'uso, ACS900 monitora ogni gonfiaggio per assicurarsi che venga somministrata la profilassi al paziente. Il tempo di terapia somministrata viene visualizzato nell'angolo in basso a destra.

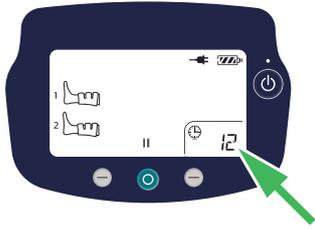

2. Se la pompa rileva che un gambale è stato rimosso dall'arto mentre la pompa è in modalità di funzionamento, il grafico dell'arto corrispondente lampeggia.




Gli assistenti vengono avvertiti che non viene somministrata alcuna profilassi.

Sequenza delle notifiche:

- L'icona della gamba inizia a lampeggiare e il tempo di non conformità viene visualizzato sullo schermo.
- Dopo 3 cicli, il triangolo di avvertenza appare sullo schermo e il LED verde inizia a lampeggiare.
- Dopo 10 minuti, il LED verde lampeggiante diventa giallo fisso con un allarme acustico opzionale.


Inoltre, la pompa conterà e visualizzerà il tempo durante il quale la terapia non è stata effettuata (tempo di non conformità). Inizialmente viene visualizzato in minuti, in modalità lampeggiante.

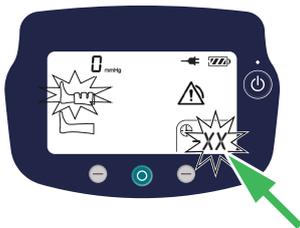

3. Dopo 1 ora di non conformità monitorata, il display passa a visualizzare il tempo in ore, in modalità lampeggiante.




4. Premere il pulsante di destra per visualizzare i minuti aggiuntivi all'ora; sul display viene visualizzato “-” prima dei minuti.

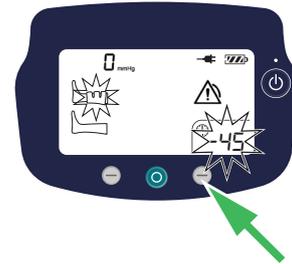


## Eliminare l'avvertenza/l'allarme

1. Per eliminare l'avvertenza/allarme di monitoraggio della conformità, riposizionare gli eventuali gambali rimossi sull'arto.

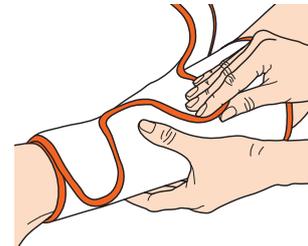

2. Il tempo di non conformità viene automaticamente azzerato quando la pompa rileva che il gambale è stato riapplicato sull'arto. La pompa torna a visualizzare il tempo di terapia accumulato e continua il conteggio dal punto in cui è stato interrotto.

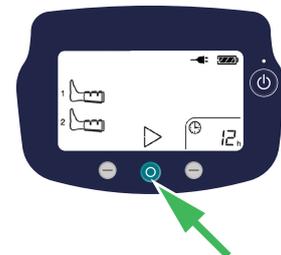

3. In alternativa, mettere in pausa e riavviare la pompa.