


Flowtron ACS900

Samsvarsovervåking


Samsvarsovervåking: Registrerer og viser faktisk behandling i tillegg til avvikstidsrom. Varsler når mansjetten fjernes for å forenkle sporing og dokumentasjon av IPC-behandling.

Aktiver/deaktiver samsvarsovervåking


1. Konfigurer samsvarsovervåking:
 - Kontroller at ingen mansjetter er koblet til pumpen.
 - Hold inne den midtre betjeningsknappen for å åpne oppsettskjermbildet.

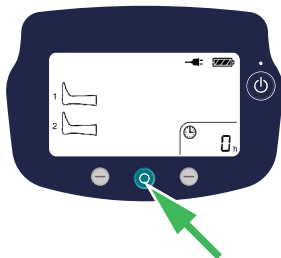

2. Trykk på den venstre betjeningsknappen for å bla gjennom alternativene:
 - PÅ med lydalarm aktivert
 - PÅ med lydalarm deaktivert
 - AV (pumpens driftstid vises i stedet for samlet behandlingstid)

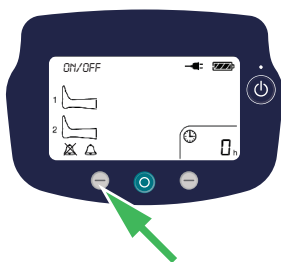

3. Trykk på den midtre betjeningsknappen for å velge alternativet som vises.

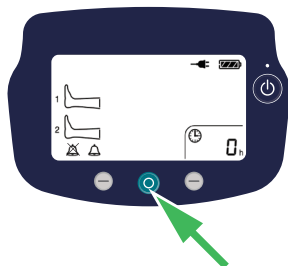


Tilbakestill Compliance monitoringering (akkumulert behandlingstid)


1. Hold inne den venstre betjeningsknappen i to sekunder mens pumpen er i standby. Tiden blinker i to minutter. Hold inne den midtre betjeningsknappen i tre sekunder for å nullstille tiden.
2. Trykk på den høyre betjeningsknappen igjen for å bekrefte. Hvis du ikke trykker på denne knappen innen to minutter, blir timeren IKKE tilbakestilt, og den går tilbake til å vise de opprinnelige dataene.

Start behandling


1. Sett mansjetten på pasienten.

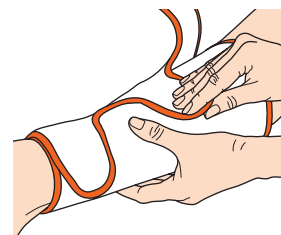

2. Koble mansjetten til pumpen.

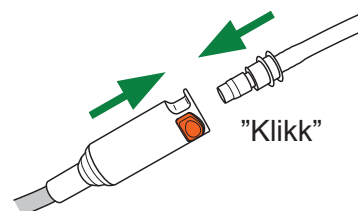


3. Trykk på den midtre betjeningsknappen for å starte behandlingen.

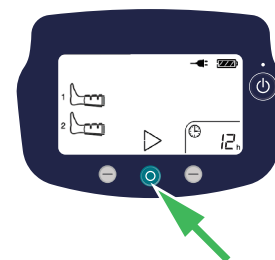


Les av displayet

1. Under bruk overvåker ACS900 hver oppblåsing for å sikre at den leverer forebyggende behandling til pasienten. Den akkumulerte behandlingstiden vises nederst i høyre hjørne.

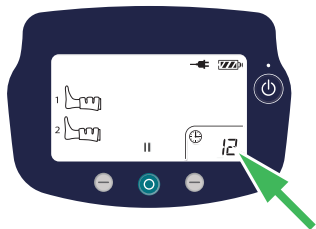

2. Hvis pumpen registrerer at en mansjett er fjernet fra kroppsdelen mens pumpen er i driftsmodus, blinker den korresponderende grafikken i kroppsdelen.

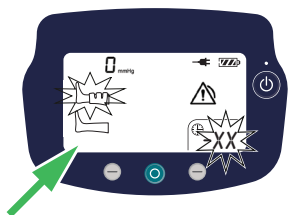


Pleierne blir varslet om at ingen profylakse blir levert.

Varslingsrekkefølgen:

- Benikonet begynner å blinke, og avvikstidsrommet vises på skjermen.
- Etter tre sykluser vises varseltrekanten på skjermen, og den grønne LED-lampen begynner å blinke.
- Etter 10 minutter lyser den grønne LED-lampen konstant gult med en lydalarm som ekstrautstyr.


I tillegg vil pumpen telle og vise hvor lang tid som har gått uten behandling (avvikstidsrom). Først vises dette med blinkende minutter.

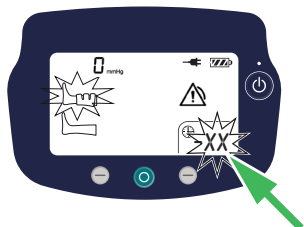

3. Etter en time med overvåket avvik, skifter displayet til å vise tiden i blinkende timer.




4. Trykk på den høyre betjeningsknappen for å se de ekstra minuttene i timen. En "-" vises før minutter på displayet.

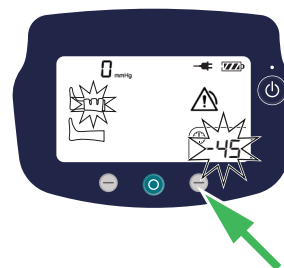


Korrigerer advarsel/varsel

1. For å fjerne advarselen/varselet om Compliance monitoreringen, må eventuelle mansjetter som er fjernet, settes på kroppsdelen igjen.

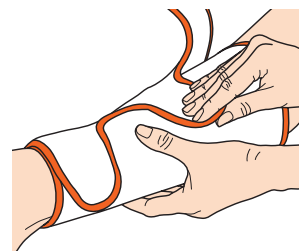

2. Avvikstidsrommet nullstilles automatisk når pumpen registrerer at mansjetten er satt på kroppsdelen igjen. Pumpen går tilbake til å vise akkumulert behandlingstid, og fortsetter å telle fra der den stoppet.

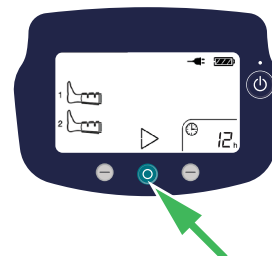

3. Alternativt kan du sette pumpen på pause og deretter starte den på nytt.

