



Sara Combilizer




Sikkerhedsseler

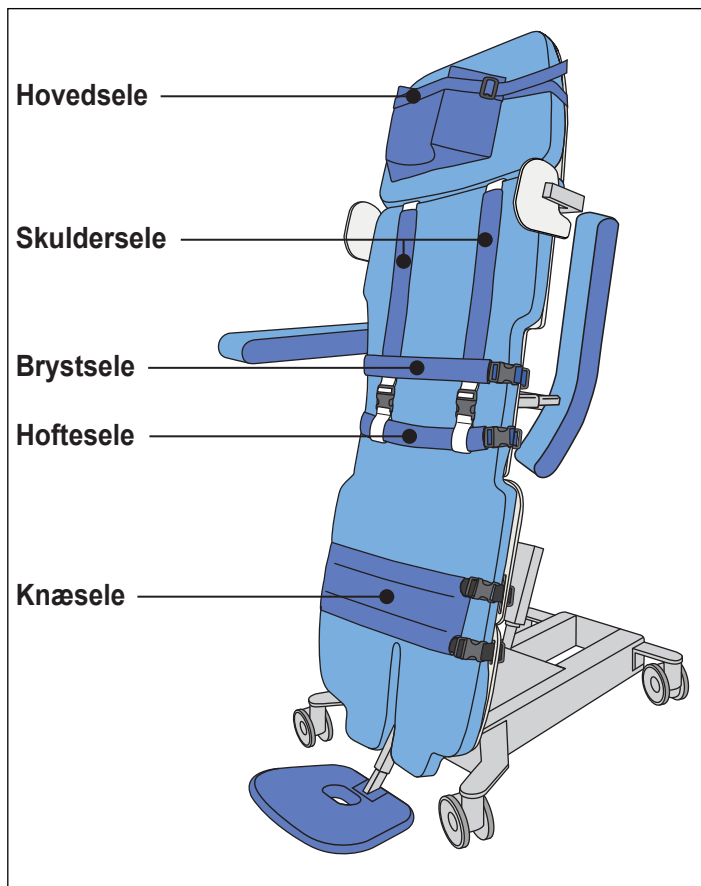


Fastgør selen til Sara Combilizer

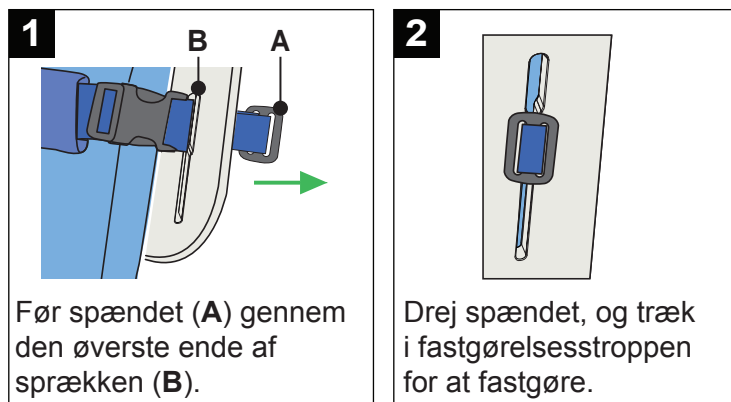


Fjern selen fra Sara Combilizer

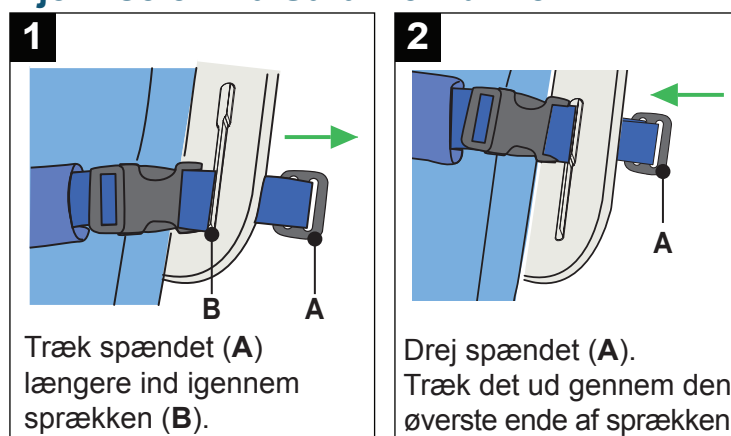


Spænd sikkerhedsselen

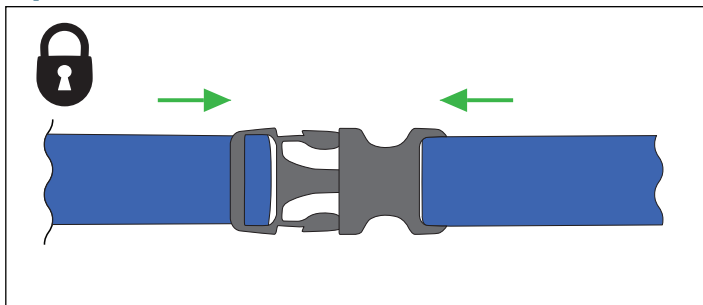


Spænd sikkerhedsselen op

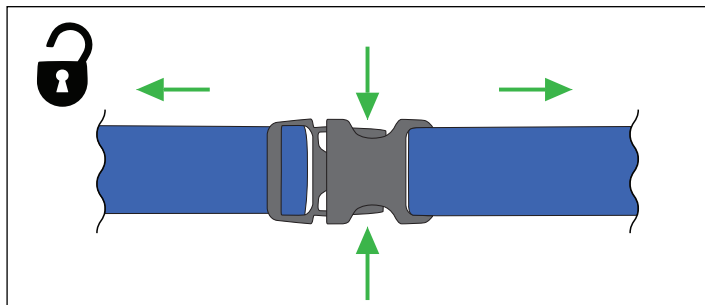

Stram sikkerhedsselen

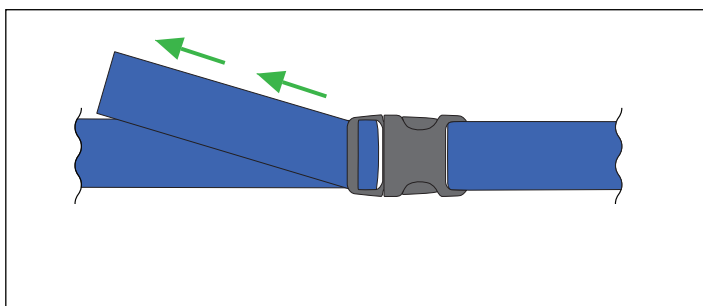


Løsn sikkerhedsselen

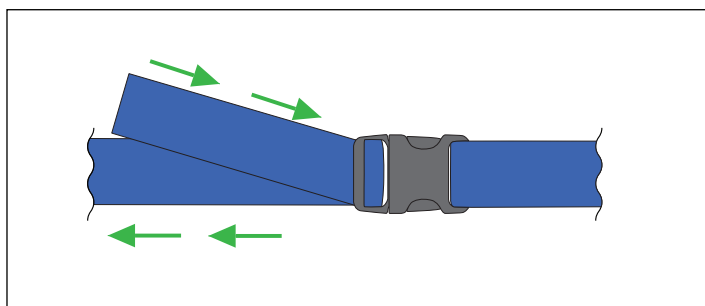

Fastgør sikkerhedssele på plejemodtageren

1 Brystsele



Blå fastgørelsesstropper
To sikkerhedssele (A)

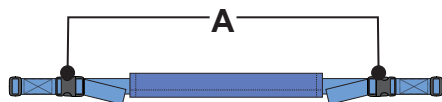

Anbring selen under plejemodtagerens arme. Spænd alle sikkerhedssele. Stram ikke selen for meget.

2 Hoftesele



Blå fastgørelsesstropper
To sikkerhedssele (A)

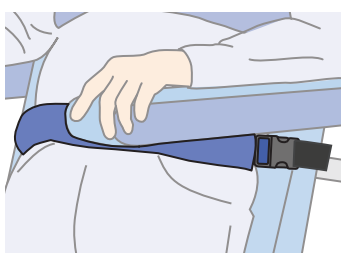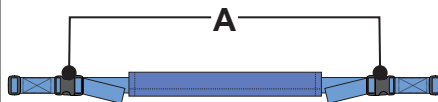

Anbring selen på plejemodtagerens hofte. Spænd alle sikkerhedssele. Stram ikke selen for meget.

3 Knæsele


Sorte fastgørelsesstropper
Fire sikkerhedssele (A)

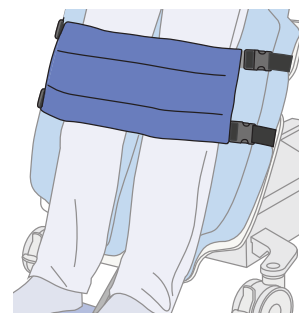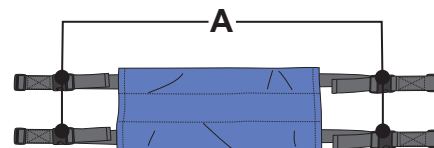


Anbring selen over plejemodtagerens knæskaller. Spænd alle sikkerhedssele.

4 Skuldersele

Hvide fastgørelsesstropper
To spænder (A)
To sikkerhedssele (B)
To løkker (C)

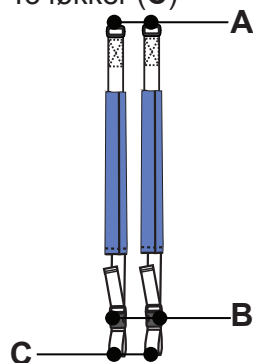

5 Skuldersele

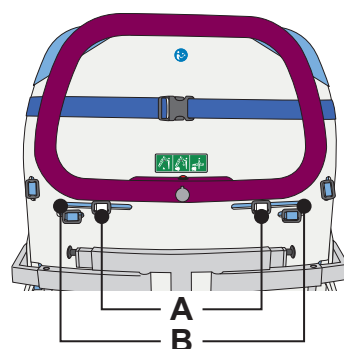

Før de to spænder (A) gennem de øverste sprækker (B).


6 Skuldersele



Anbring selerne over plejemodtagerens skuldre og under brystselen (A). Spænd op, og før hoftesikkerhedssele (B) gennem endeløkkerne (C) på skulderselerne.

7 Hovedsele

En sikkerhedssele (A)
To spænder (B)

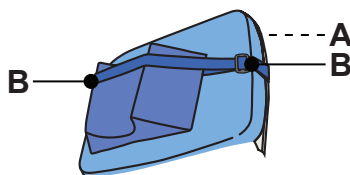

8 Hovedsele



Spænd selen på bagsiden af madrassen (A). Træk selen gennem spændet (B) på begge sider af puden.

9

