



Sara Combilizer




Sicherheitsgurte

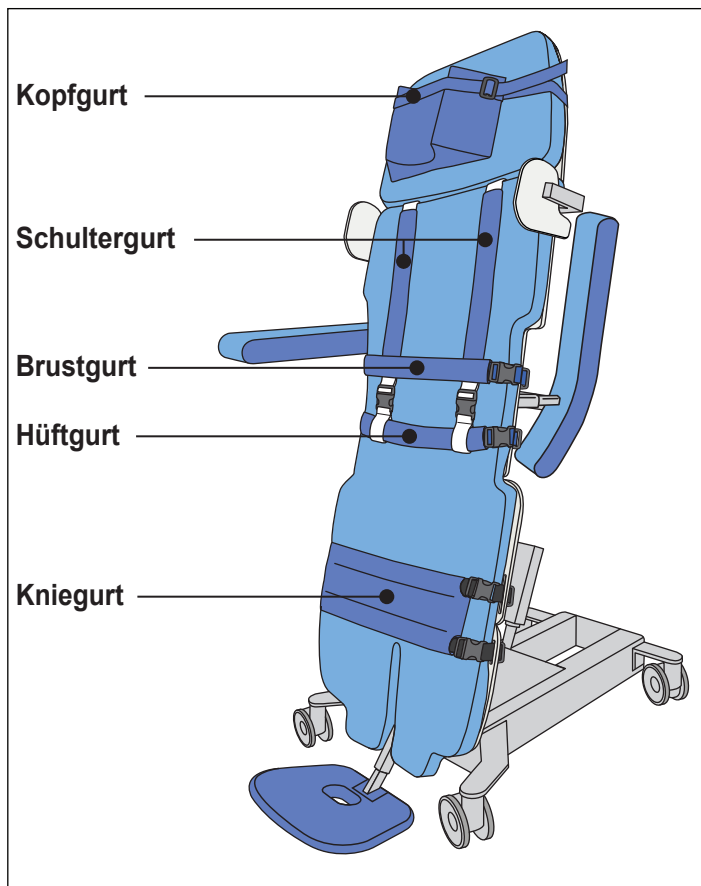


Anbringen des Gurts am Sara Combilizer

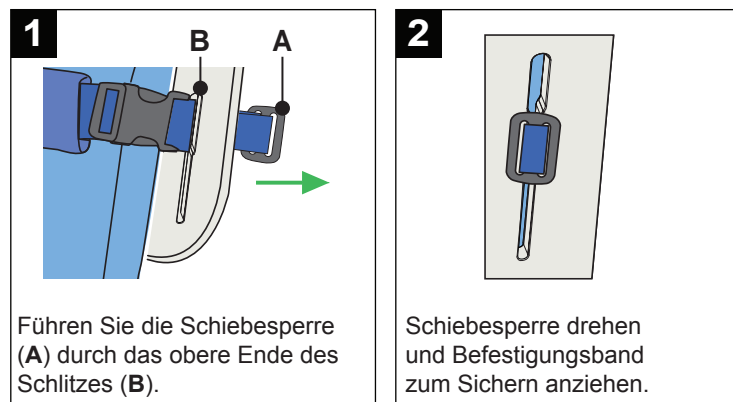


Entfernen des Gurts vom Sara Combilizer

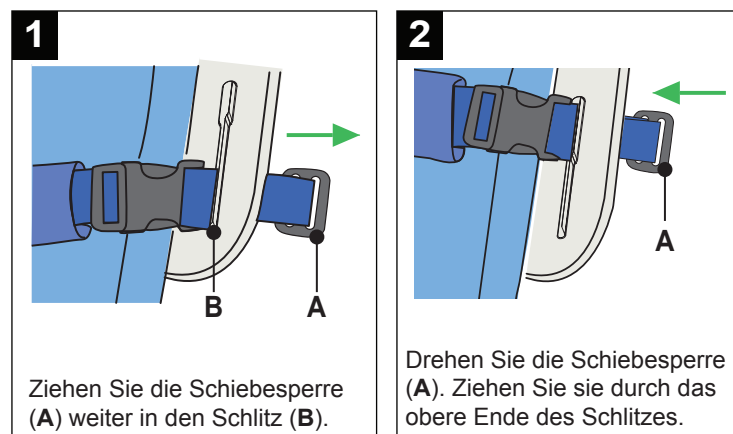


Schließen des Sicherheitsgurts

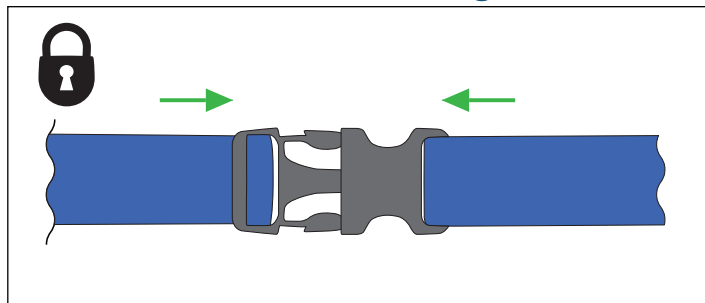


Öffnen des Sicherheitsgurts

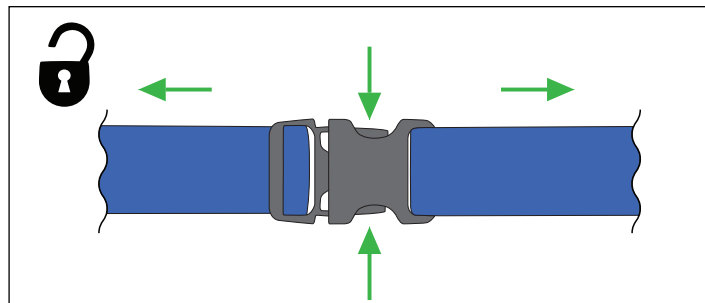

Festziehen des Sicherheitsgurts

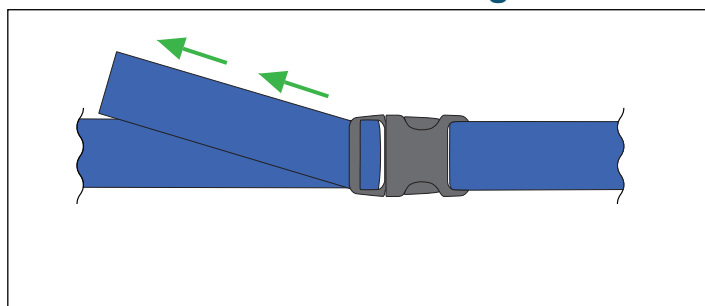


Lockern des Sicherheitsgurts

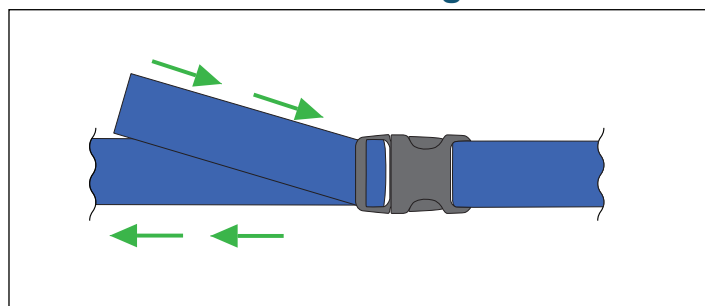

Befestigen der Sicherheitsgurte am Patienten

1 Brustgurt



Blaue Befestigungsbänder
Zwei Sicherheitsschnallen (A)

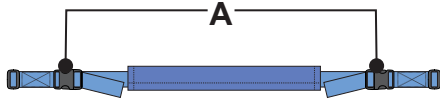

Positionieren Sie den Gurt unter den Armen des Patienten.
Schließen Sie alle Sicherheitsschnallen.
Ziehen Sie den Gurt nicht zu fest.

2 Hüftgurt



Blaue Befestigungsbänder
Zwei Sicherheitsschnallen (A)

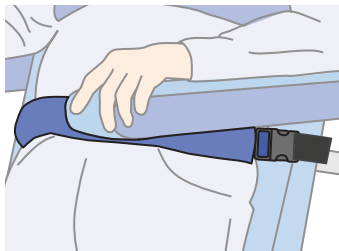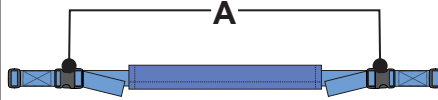

Positionieren Sie den Gurt im Hüftbereich des Patienten.
Schließen Sie alle Sicherheitsschnallen.
Ziehen Sie den Gurt nicht zu fest.

3 Kniegurt


Schwarze Befestigungsbänder
Vier Sicherheitsschnallen (A)

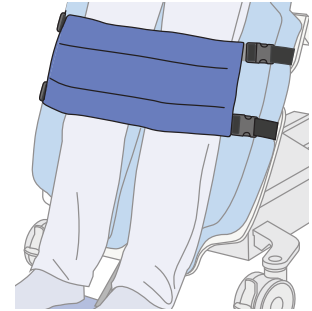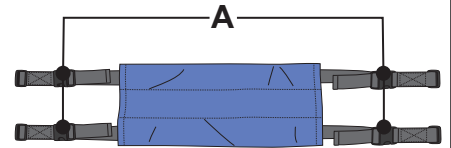


Positionieren Sie den Gurt an den Kniescheiben des Patienten. Schließen Sie alle Sicherheitsschnallen.

4 Schultergurt

Weißer Befestigungsbänder
Zwei Schiebeperrren (A)
Zwei Sicherheitsschnallen (B)
Zwei Schlaufen (C)

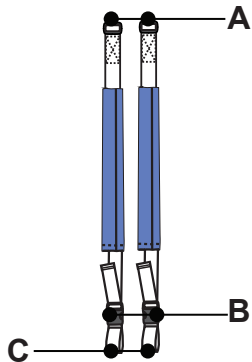

5 Schultergurt

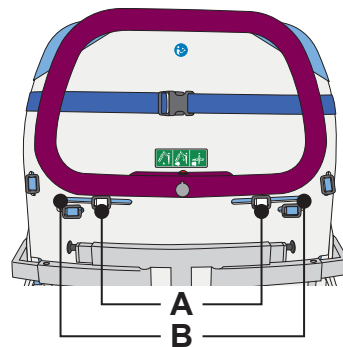

Führen Sie die zwei Schiebeperrren (A) durch die oberen Schlitze (B).


6 Schultergurt



Führen Sie die Gurte über die Schultern des Patienten und unter dem Gurt für den Brustbereich hindurch (A). Lösen und führen Sie den Hüftsicherheitsgurt (B) durch die Endschlaufen (C) des Schultergurtes.

7 Kopfgurt

Eine Sicherheitsschnalle (A)
Zwei Schiebeperrren (B)

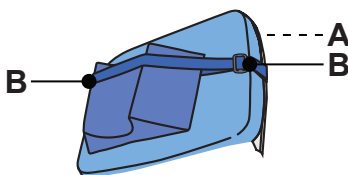

8 Kopfgurt



Schnallen Sie den Gurt an der Rückseite der Matratze (A) fest. Ziehen Sie den Gurt durch die Schiebeperrre (B) an beiden Seiten des Kopfkissens.

9

