



Sara Combilizer




Correas de seguridad

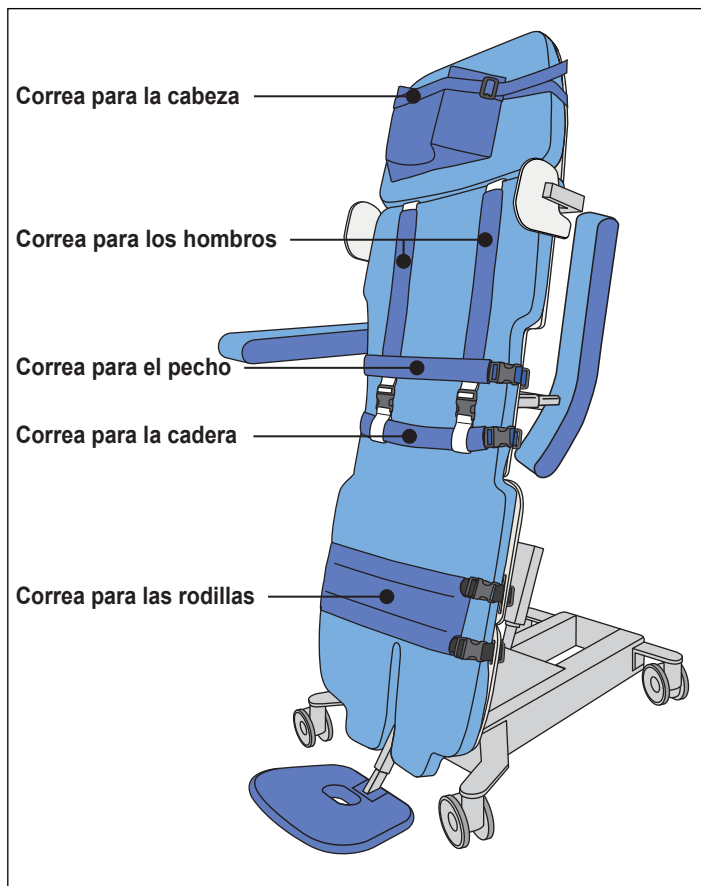


Para poner las correas en el Sara Combilizer

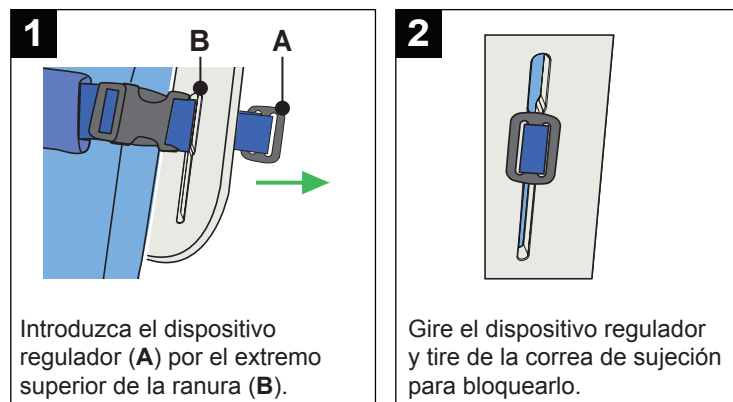


Para retirar las correas del Sara Combilizer

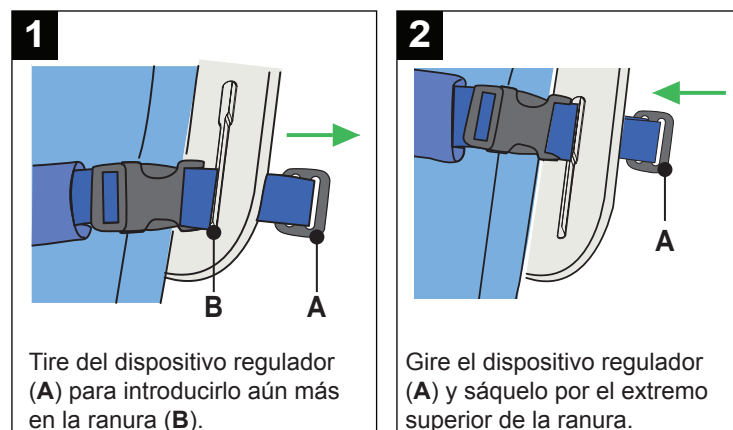


Para abrochar las correas de seguridad

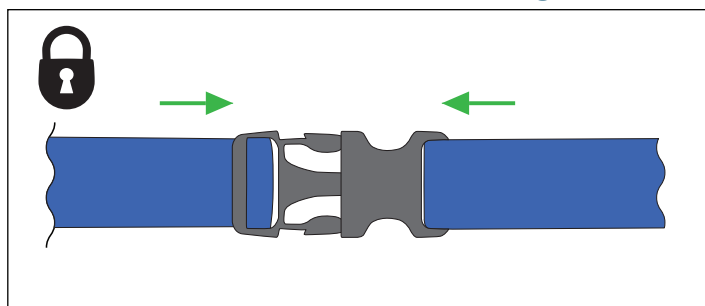


Para desabrochar las correas de seguridad

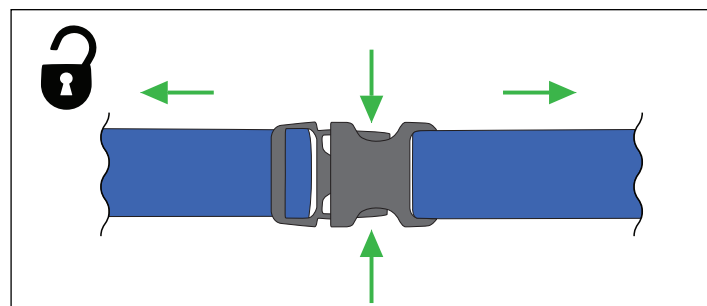

Para apretar las correas de seguridad

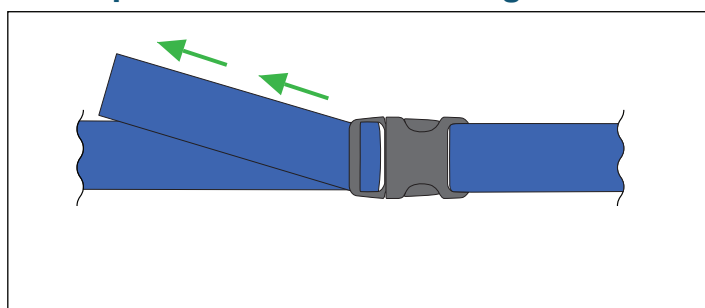


Para aflojar las correas de seguridad

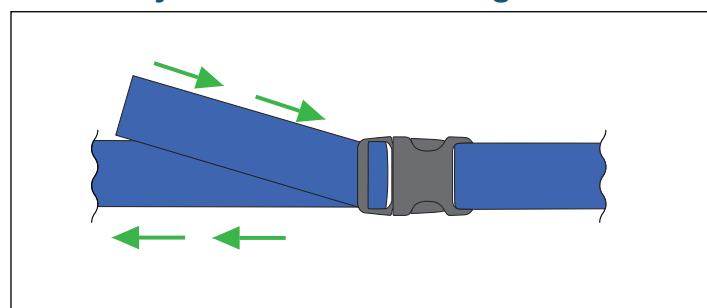



Colocación de las correas de seguridad para el paciente

- 1** Correa para el pecho
Correas de sujeción azules
Dos cierres de seguridad (A)

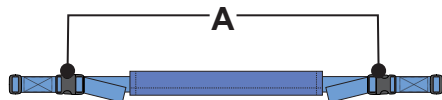



Coloque la correa bajo los brazos del paciente.
Abroche todos los cierres de seguridad.
No apriete demasiado la correa.

- 2** Correa para la cadera
Correas de sujeción azules
Dos cierres de seguridad (A)

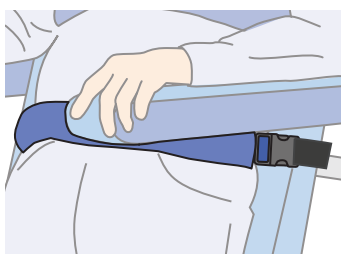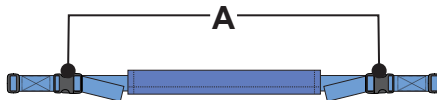


Coloque la correa sobre la cadera del paciente.
Abroche todos los cierres de seguridad.
No apriete demasiado la correa.

- 3** Correa para las rodillas
Correas de sujeción negras
Cuatro cierres de seguridad (A)

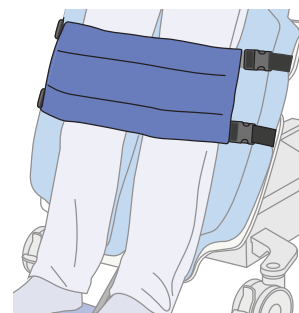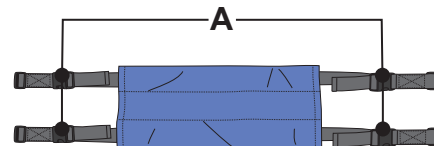


Coloque la correa sobre las rótulas del paciente. Abroche todos los cierres de seguridad.

- 4** Correa para los hombros
Correas de sujeción blancas
Dos dispositivos reguladores (A)
Dos cierres de seguridad (B)
Dos bucles (C)

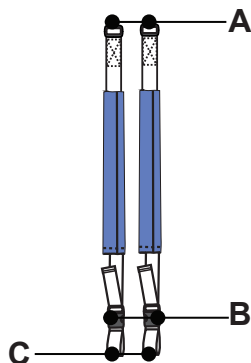

- 5** Correa para los hombros

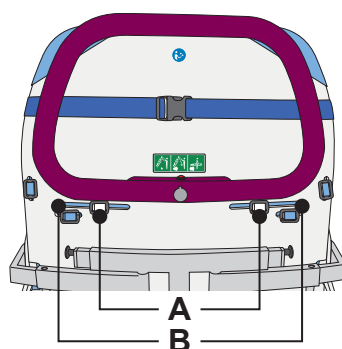


Introduzca los dos dispositivos reguladores (A) por las ranuras superiores (B).

- 6** Correa para los hombros



Coloque las correas sobre los hombros del paciente, por debajo de la correa para el pecho (A).
Desabroche la correa de seguridad para la cadera (B) y pásela por los bucles (C) del extremo de las correas para los hombros.

- 7** Correa para la cabeza
Un cierre de seguridad (A)
Dos dispositivos reguladores (B)

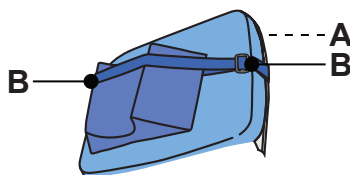

- 8** Correa para la cabeza



Abroche la correa por detrás del colchón (A).
Tire de la correa con ayuda del dispositivo regulador (B) que hay a ambos lados de la almohada.

9

