



# Sara Combilizer




## Cinture di sicurezza

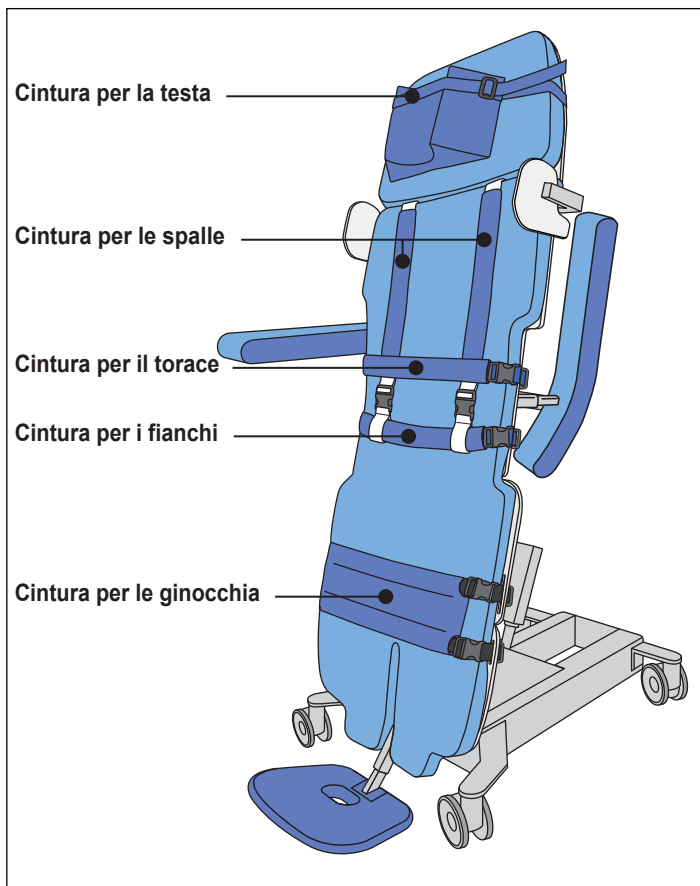


## Aggianciare la cintura a Sara Combilizer

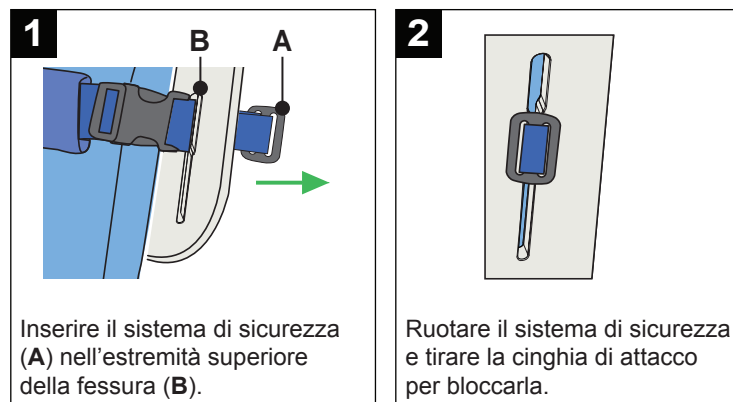


## Rimuovere la cintura da Sara Combilizer

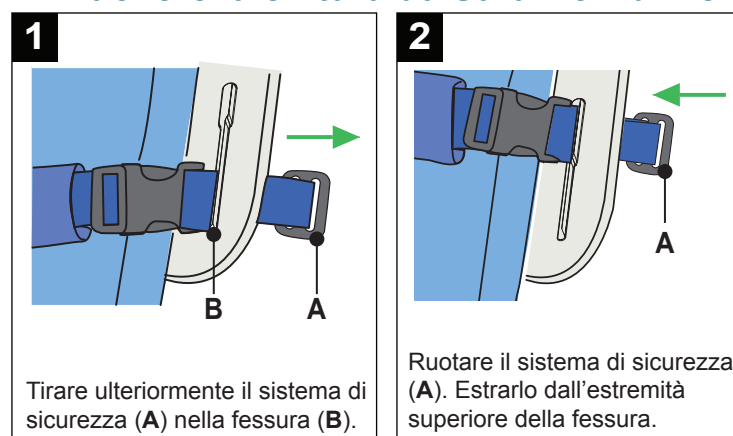


## Allacciare la cintura di sicurezza

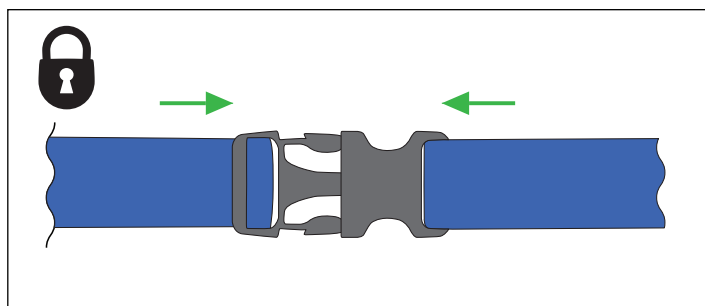


## Slacciare la cintura di sicurezza

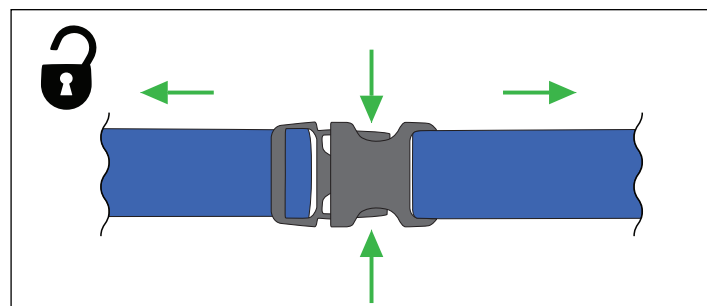

## Stringere la cintura di sicurezza

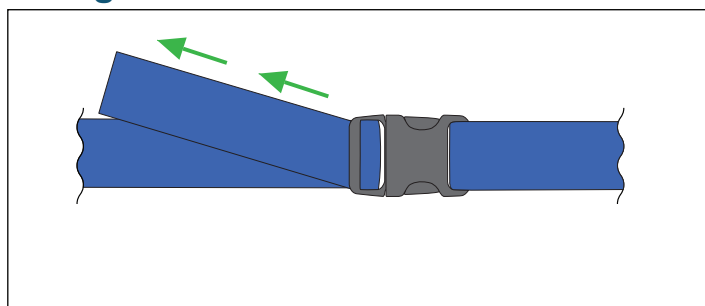


## Allentare la cintura di sicurezza

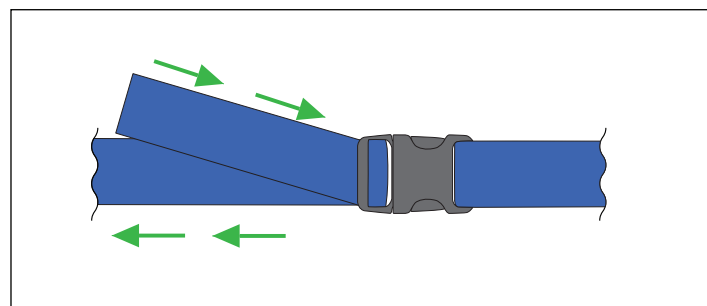



# Fissare le cinture di sicurezza al paziente

- 1** Cintura per il torace  
Cinghie di attacco blu  
Due fibbie di sicurezza (A)

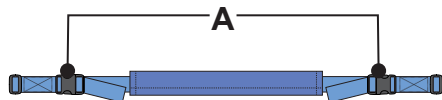



Posizionare la cintura sotto le braccia del paziente.  
Allacciare tutte le fibbie di sicurezza.  
Non stringere troppo la cintura.

- 2** Cintura per i fianchi  
Cinghie di attacco blu  
Due fibbie di sicurezza (A)

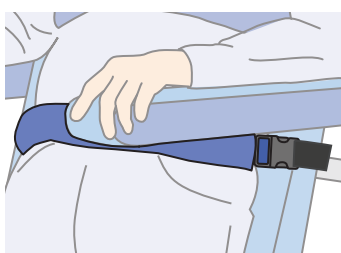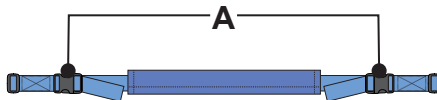


Posizionare la cintura sui fianchi del paziente.  
Allacciare tutte le fibbie di sicurezza.  
Non stringere troppo la cintura.

- 3** Cintura per le ginocchia  
Cinghie di attacco nere  
Quattro fibbie di sicurezza (A)

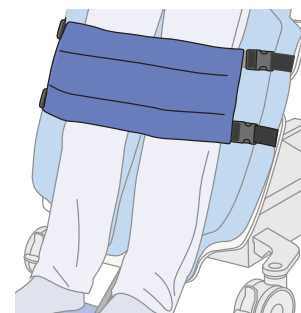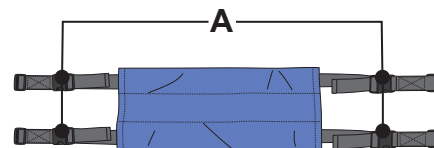


Posizionare la cintura sopra le rotule del paziente. Allacciare tutte le fibbie di sicurezza.

- 4** Cintura per le spalle  
Cinghie di attacco bianche  
Due sistemi di sicurezza (A)  
Due fibbie di sicurezza (B)  
Due asole (C)

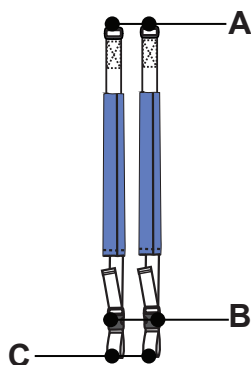

- 5** Cintura per le spalle

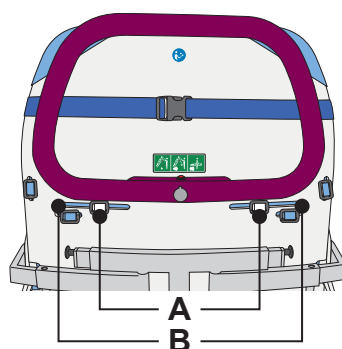


Inserire i due sistemi di sicurezza (A) nelle fessure superiori (B).

- 6** Cintura per le spalle



Posizionare le cinture sopra le spalle del paziente e sotto la cintura per il torace (A).  
Slacciare e inserire la cintura di sicurezza per i fianchi (B) nelle asole terminali (C) delle cinture per le spalle.

- 7** Cintura per la testa  
Una fibbia di sicurezza (A)  
Due sistemi di sicurezza (B)

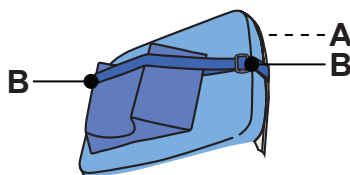

- 8** Cintura per la testa



Allacciare la cintura sul retro del materasso (A). Far passare la cintura nel sistema di sicurezza (B) su entrambi i lati del cuscino.

