



Sara Combilizer




安全ベルト

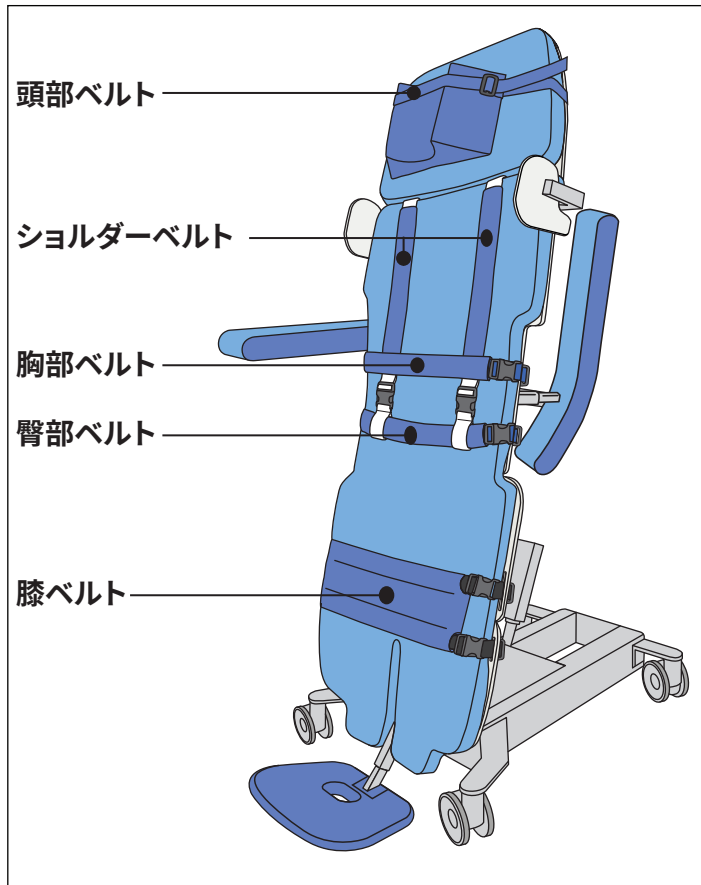


ベルトをSara Combilizerに取り付ける

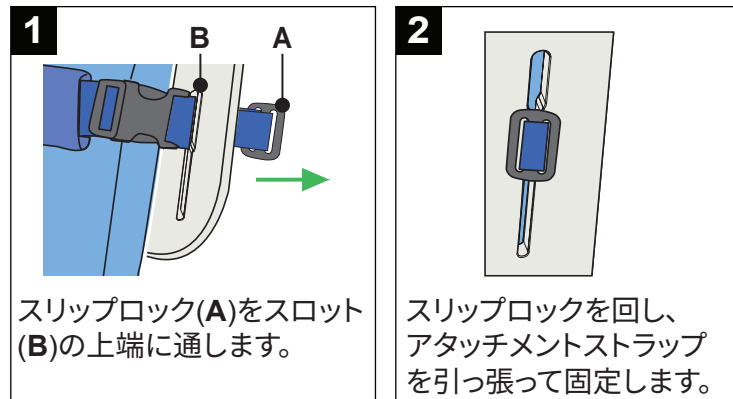


ベルトをSara Combilizerから取り外す

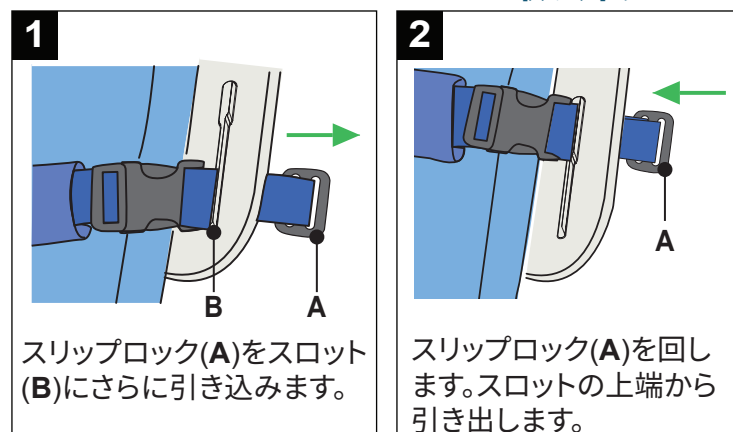


安全ベルトを取り付ける

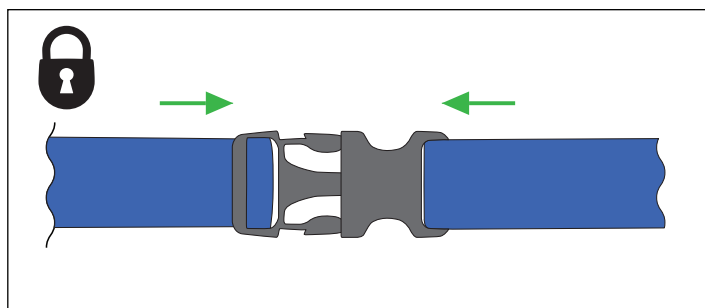


安全ベルトを取り外す

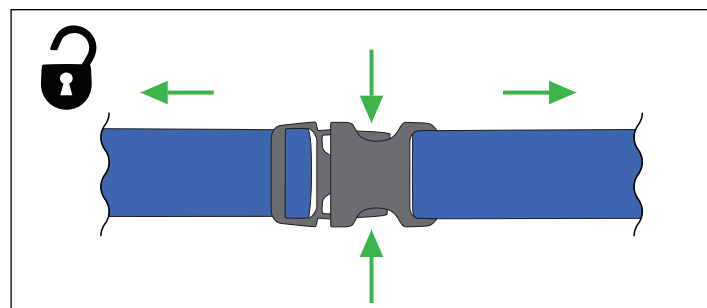

安全ベルトを締める

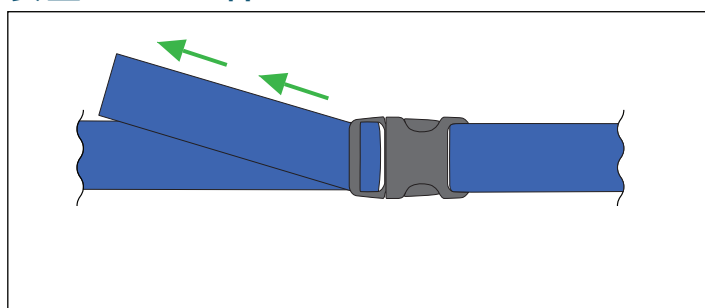


安全ベルトを緩める

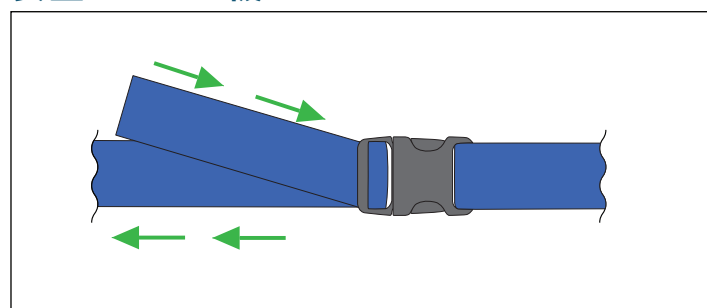


安全ベルトを患者に取り付ける

1 胸部ベルト
青いアタッチメントストラップ
安全バックル

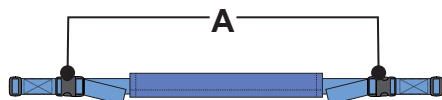



ベルトを患者の腕の下に置きます。
すべての安全バックルを取り付け
ます。
ベルトを締めすぎないでください。

2 臀部ベルト
青いアタッチメントストラップ
安全バックル

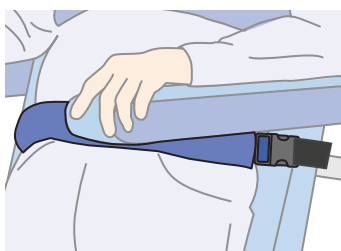


ベルトを患者の腰部に配置します。
すべての安全バックルを締めます。
ベルトを締めすぎないでください。

3 膝ベルト
黒いアタッチメントストラップ
安全バックル(A)4つ

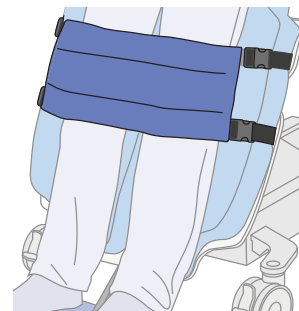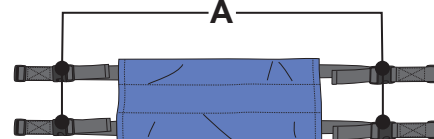


ベルトを患者の膝頭(膝蓋骨)に配
置します。すべての安全バックルを
取り付けます。

4 ショルダーベルト
白いアタッチメントストラップ
スリップロック(A)2つ
安全バックル(B)2つ
ループ(C)2つ

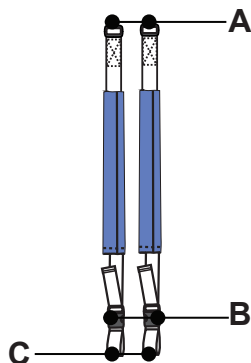

5 ショルダーベルト

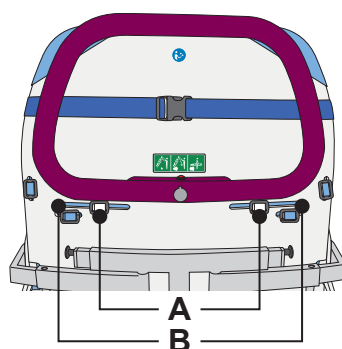


スリップロック(A)2つを上部
スロット(B)に通します。

6 ショルダーベルト



ベルトを患者の肩の上、胸部ベルトの下に配置し
ます(A)。
ヒップ安全ベルト(B)を緩めて、ショルダーベルト
のエンドループ(C)に通します。

7 頭部ベルト
安全バックル(A)1つ
スリップロック(B)2つ

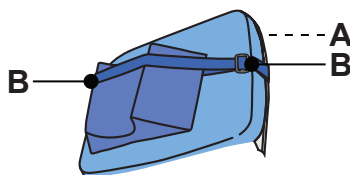

8 頭部ベルト



マットレス(A)の背面にあるバックルベ
ルト。枕の両側のスリップロック(B)にベ
ルトを通します。

