



Sara Combilizer




Veiligheidsriemen

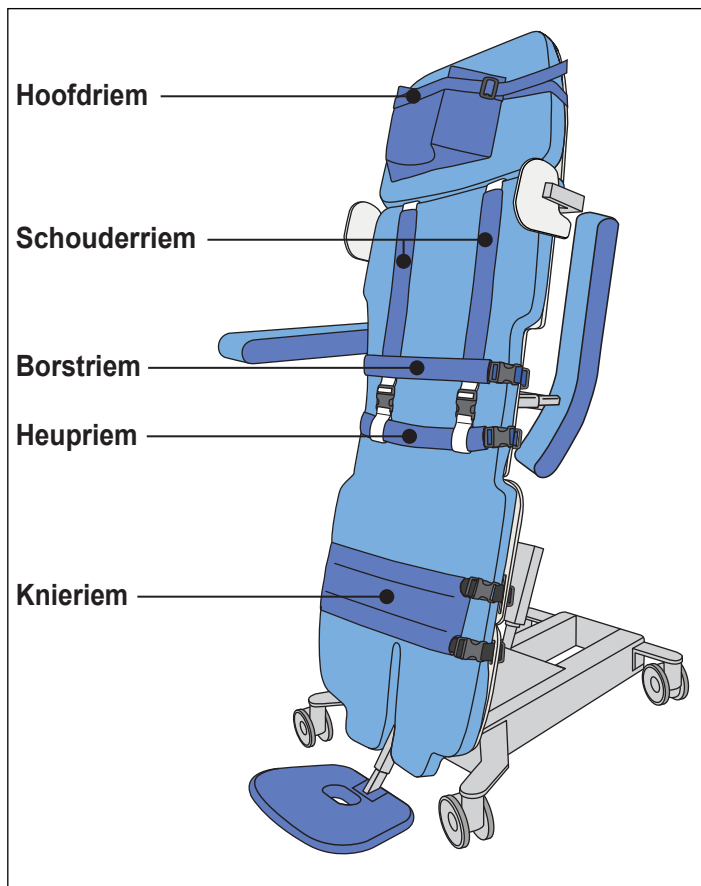


Riem aan Sara Combilizer bevestigen

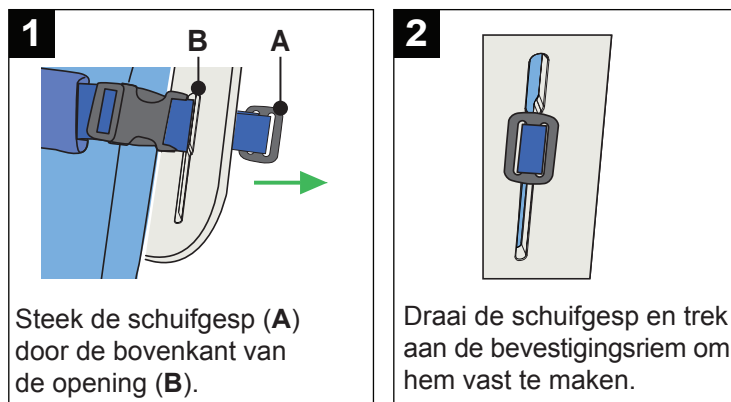


Riem van Sara Combilizer verwijderen

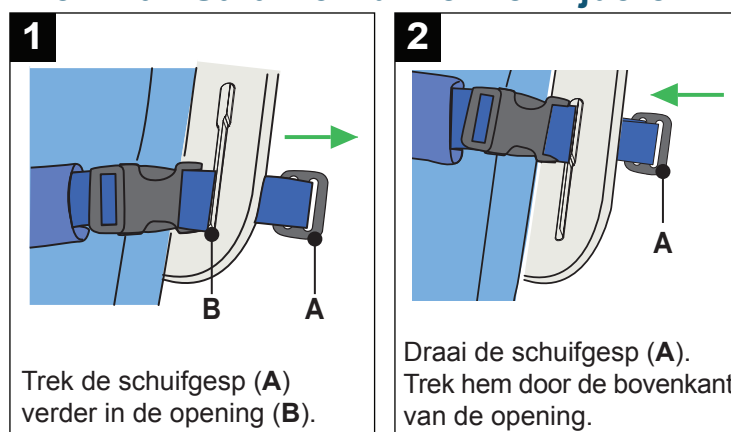


Veiligheidsriem vastgespen

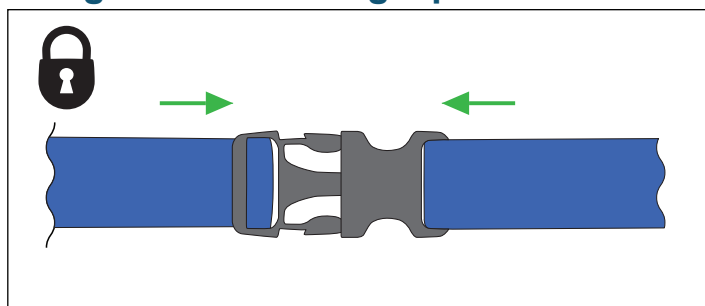


Veiligheidsriem losgespen

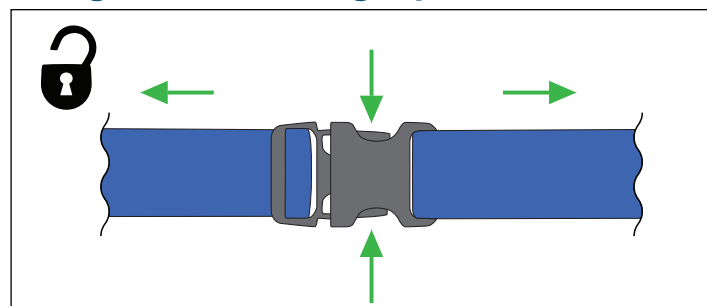

Veiligheidsriem aantrekken

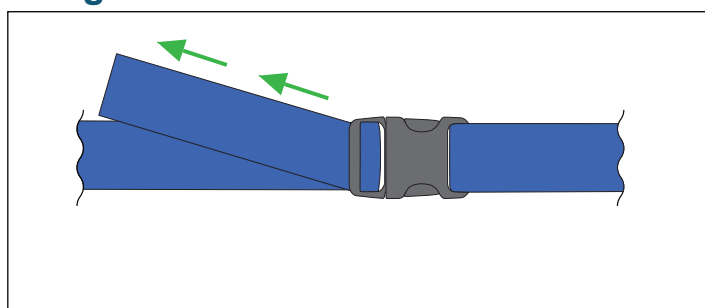


Veiligheidsriem losser maken

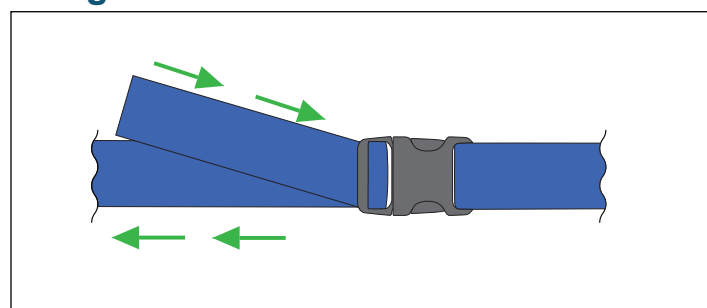

Veiligheidsriemen op de zorgvrager bevestigen

1 Borstriem

Blauwe bevestigingsriemen
Twee veiligheidsgespen (A)

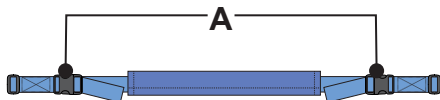



Plaats de riem onder de armen van de zorgvrager.

Gesp alle veiligheidsgespen vast.

Maak de riem niet te strak vast.

2 Heupriem

Blauwe bevestigingsriemen
Twee veiligheidsgespen (A)

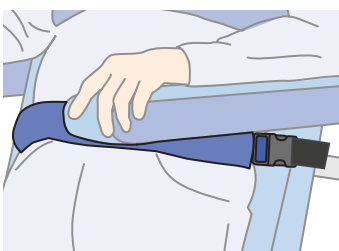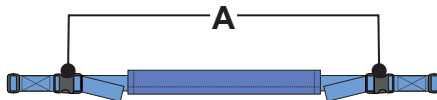



Plaats de riem op het heupgebied van de zorgvrager.

Gesp alle veiligheidsgespen vast.

Maak de riem niet te strak vast.

3 Knieriem


Zwarte bevestigingsriemen
Vier veiligheidsgespen (A)

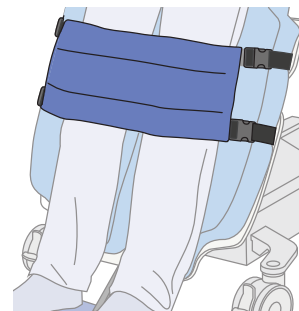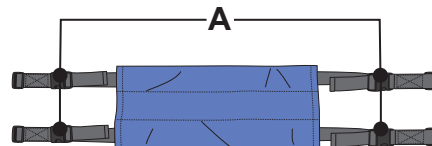


Plaats de riem over de knieschijven van de zorgvrager. Gesp alle veiligheidsgespen vast.

4 Schouderriem

Witte bevestigingsriemen
Twee schuifgespen (A)
Twee veiligheidsgespen (B)
Twee lussen (C)

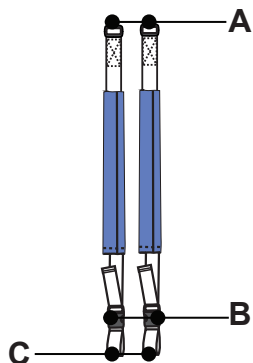

5 Schouderriem

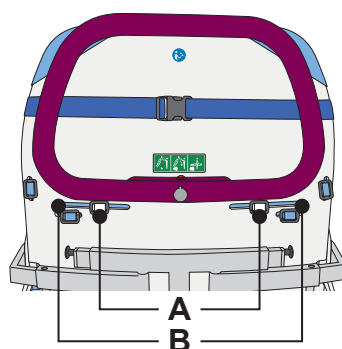

Steek de twee schuifgespen (A) door de bovenste openingen (B).


6 Schouderriem



Plaats de riemen over de schouders van de zorgvrager en onder de borstriem (A). Gesp de heupveiligheidsriem (B) los en plaats hem door de eindlussen (C) van de schouderriemen.

7 Hoofdriem

Eén veiligheidsgesp (A)
Twee schuifgespen (B)

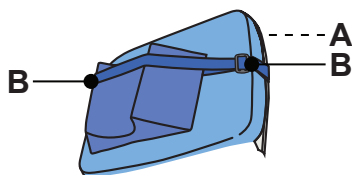

8 Hoofdriem



Gesp de riem vast aan de achterkant van de matras (A). Trek de riem door de schuifgesp (B) aan beide zijden van het kussen.

9

