

Sara Combilizer



Betjeningspanel



Aktiverer **Oprejst position**.



Aktiverer **Normal position**.



Normal position – bevæger stolen eller båren opad.
Oprejst position – hæver båren til vippeleje-position.



Normal position – bevæger stolen eller båren nedad.
Oprejst position – sænker vippelejet til bæreposition.



Normal position – skifter fra bære- til stoleposition.
Oprejst position – ikke tilgængelig.



Normal position – skifter fra stole- til bæreposition.
Oprejst position – ikke tilgængelig.



Normal position – venstre pil – vipper stolen eller båren opad til vandret position.

Oprejst position – ikke tilgængelig.

Normal position – højre pil – vipper stolen bagud eller vipper båren tilbage til Trendelenburg-position.

Oprejst position – ikke tilgængelig.




Normal position – vipper stolen eller båren til venstre.
Oprejst position – vipper vippelejet til venstre.




Normal position – vipper stolen eller båren til højre.
Oprejst position – vipper vippelejet til højre.


Håndbetjening

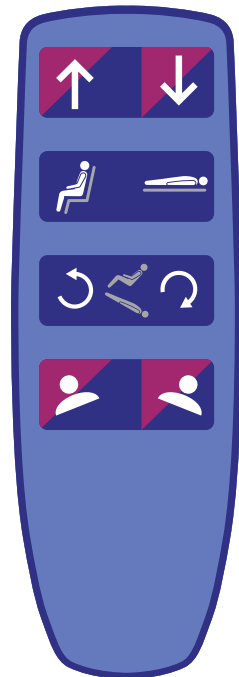


Stol – Op eller Ned Båre – Op eller Ned

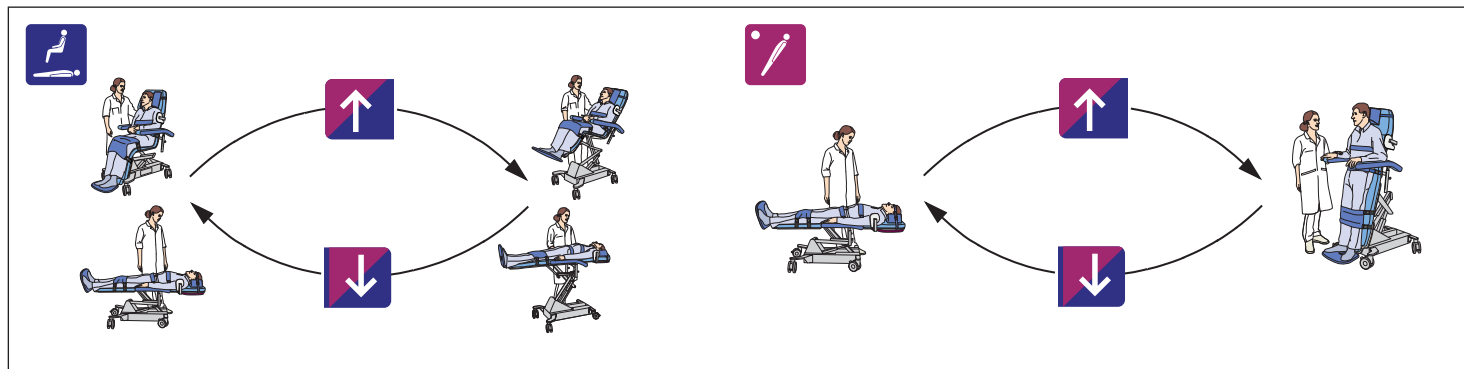


Båre til vippeleje – Vippeleje til båre

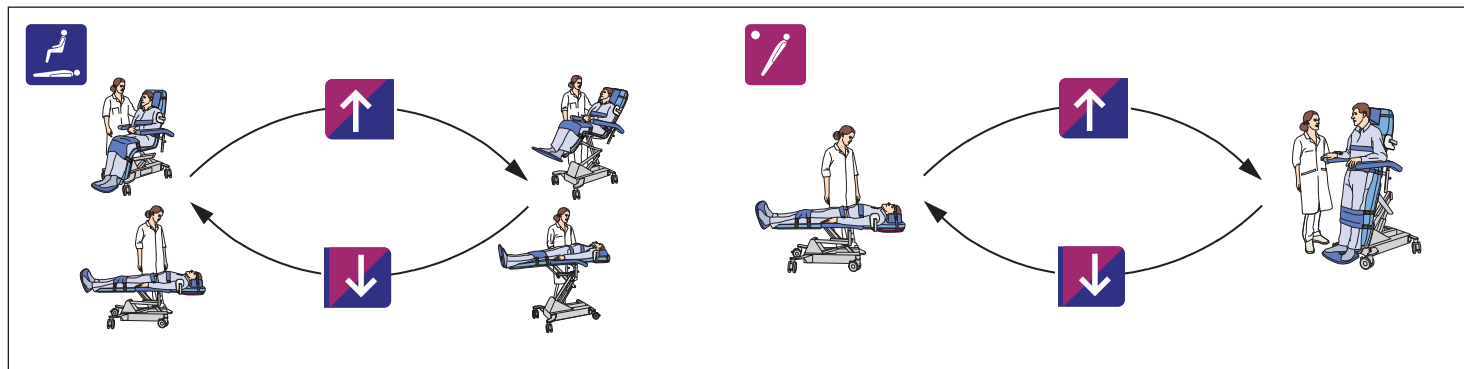


Båre til stol – Stol til båre

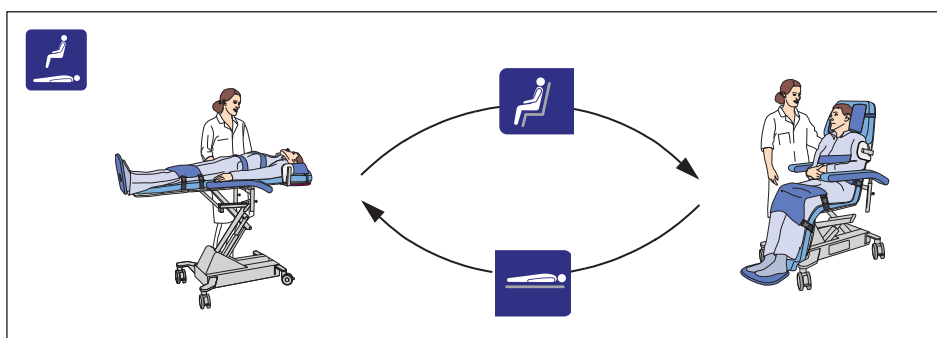

Vip stol bagud – Vip stol opret

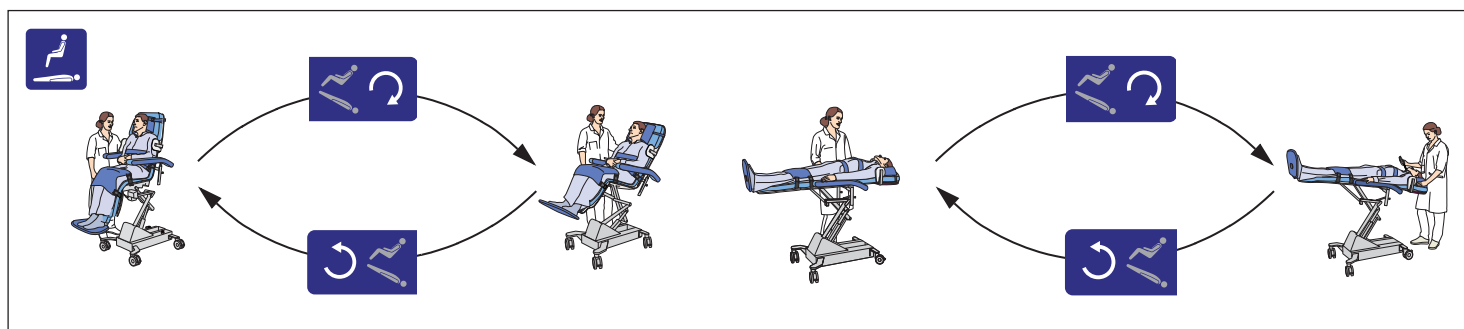

Båre til Trendelenburg – Trendelenburg til båre

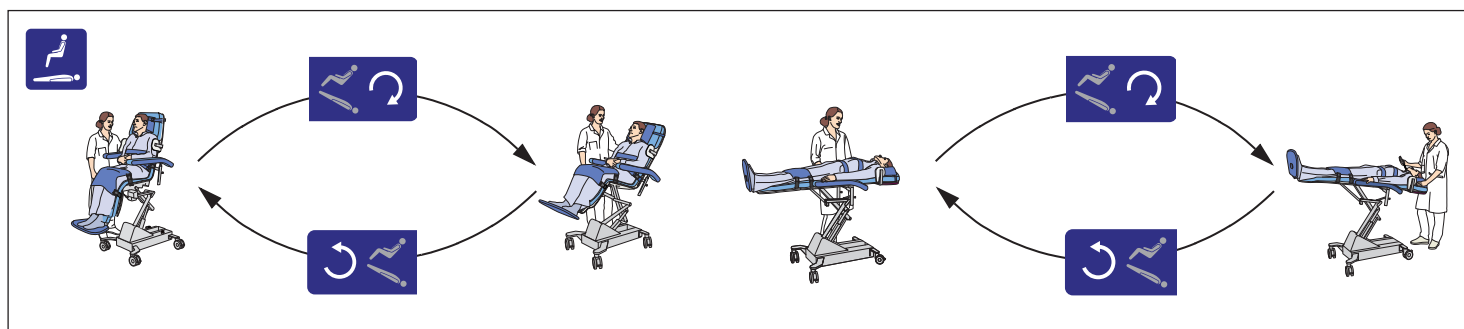

Vip til venstre eller højre

