

## Pannello di controllo



Attiva la **modalità eretta**.



Attiva la **modalità normale**.



**Modalità normale:** alza la sedia o barella.

**Modalità eretta:** alza la barella fino a raggiungere la funzione posizione eretta.



**Modalità normale:** abbassa la sedia o barella.

**Modalità eretta:** abbassa il lettino per posizione eretta fino alla posizione a barella.



**Modalità normale:** passa dalla posizione a barella a quella a sedia.

**Modalità eretta:** non disponibile.



**Modalità normale:** passa dalla posizione a sedia a quella a barella.

**Modalità eretta:** non disponibile.



**Modalità normale - freccia a sinistra:** inclina in avanti la sedia o la barella fino a raggiungere una posizione orizzontale.

**Modalità eretta:** non disponibile.

**Modalità normale - freccia a destra:** inclina indietro la sedia o la barella fino a raggiungere la posizione Trendelenburg.

**Modalità eretta:** non disponibile.



**Modalità normale:** inclina a sinistra la sedia o la barella.


**Modalità eretta:** inclina a sinistra il lettino per posizione eretta.



**Modalità normale:** inclina a destra la sedia o la barella.


**Modalità eretta:** inclina a destra il lettino per posizione eretta.

## Pulsantiera di controllo

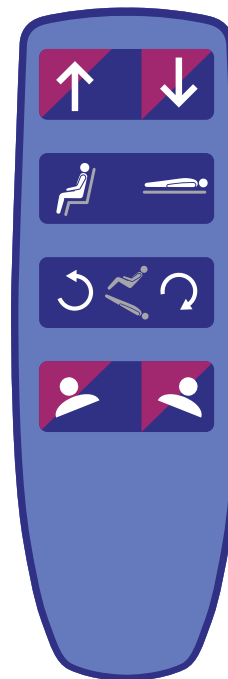


**Sedia: su o giù**  
**Barella: su o giù**

**Da posizione a barella a posizione eretta –  
 e viceversa**

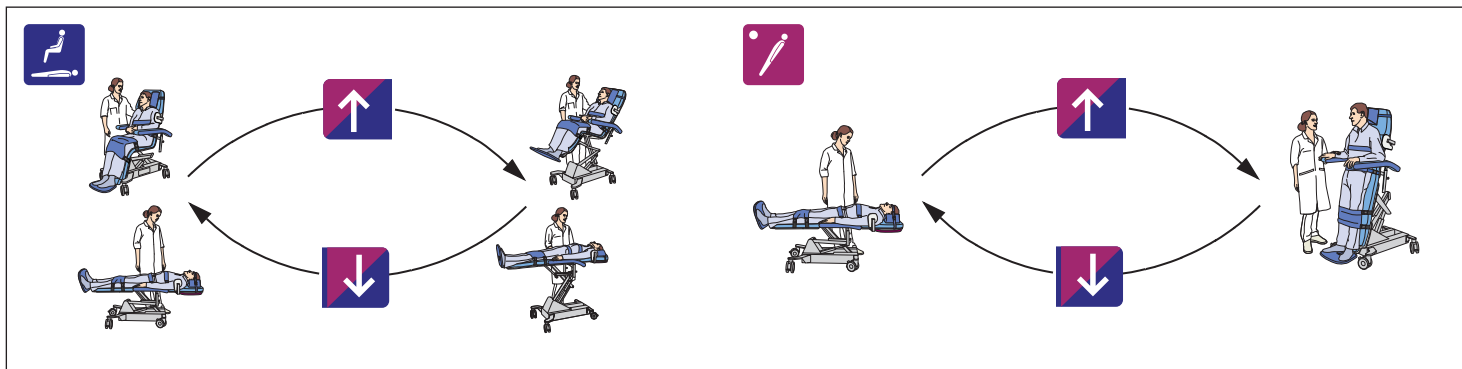


**Da posizione a barella a posizione a sedia –  
 e viceversa**

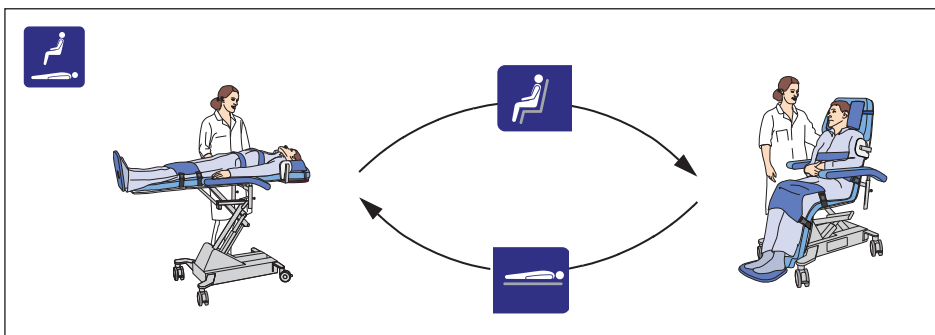

**Inclinazione indietro della sedia –  
 Inclinazione in avanti della sedia**

**Da posizione a barella a Trendelenburg –  
 E viceversa**

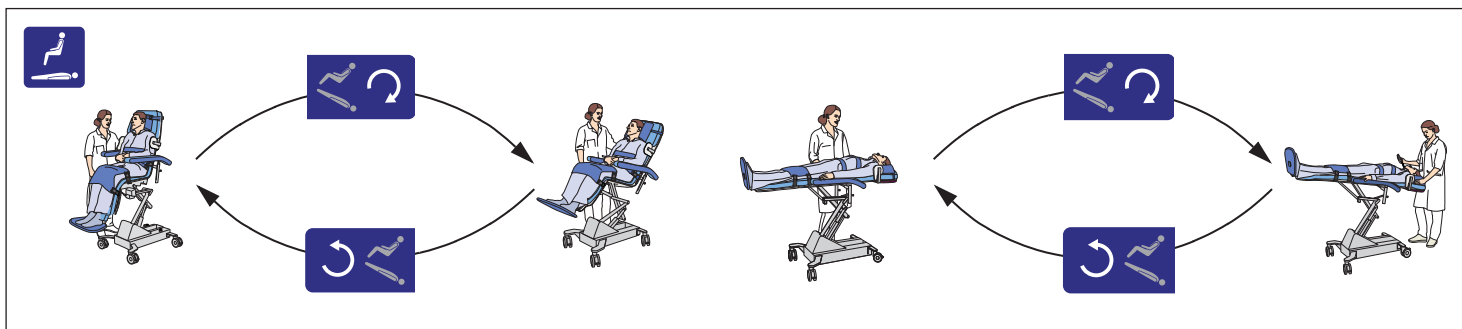

**Inclinazione a sinistra o a destra**

