

Sara Combilizer



Bedieningspaneel



Activeert **staande modus**.



Activeert **normale modus**.



Normale modus – beweegt stoel of stretcher omhoog.
Staande modus – beweegt stretcher omhoog naar kanteltafelpositie.



Normale modus – beweegt stoel of stretcher omlaag.
Staande modus – beweegt kanteltafel omlaag naar stretcherpositie.



Normale modus – gaat van stretcher- naar stoelpositie.
Staande modus – niet beschikbaar.



Normale modus – gaat van stoel- naar stretcherpositie.
Staande modus – niet beschikbaar.



Normale modus – linkerpijl – kantelt stoel of stretcher omhoog naar horizontale positie.

Staande modus – niet beschikbaar.

Normale modus – rechterpijl – kantelt stoel achterover of kantelt stretcher naar Trendelenburgpositie.

Staande modus – niet beschikbaar.




Normale modus – kantelt stoel of stretcher naar links.
Staande modus – kantelt kanteltafel naar links.




Normale modus – kantelt stoel of stretcher naar rechts.
Staande modus – kantelt kanteltafel naar rechts.

Afstandsbediening

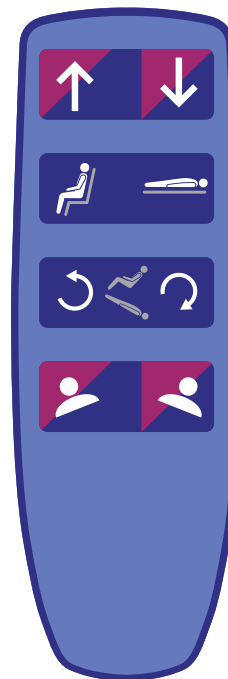


Stoel – omhoog of omlaag
Stretcher – omhoog of omlaag

Stretcher naar kanteltafel –
Kanteltafel naar stretcher

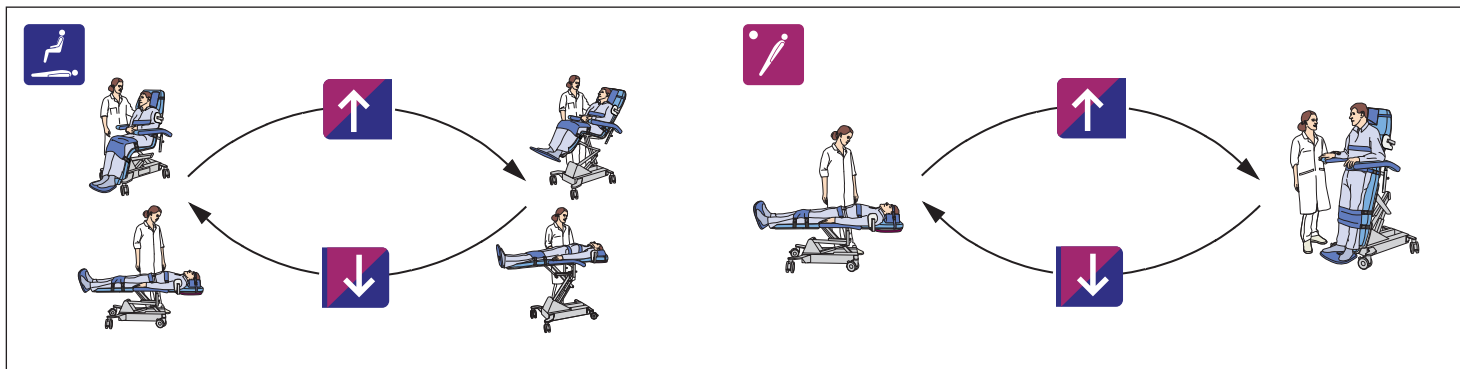


Stretcher naar stoel –
Stoel naar stretcher

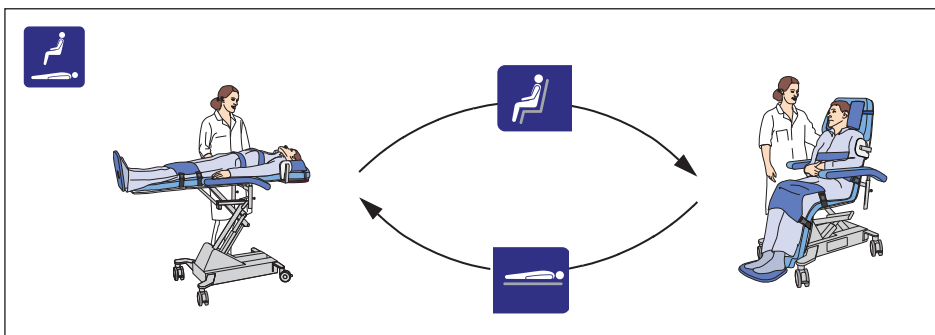

Stoel achterover kantelen –
Stoel rechtop kantelen

Stretcher naar Trendelenburg –
Trendelenburg naar stretcher

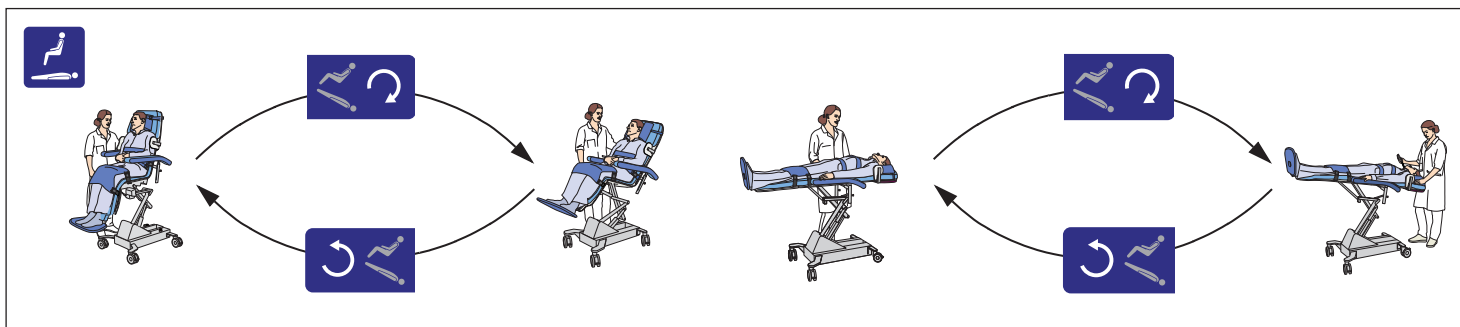

Kantel naar links of rechts

