

Sara Combilizer



Kontrollpanel



Aktiverer **stående modus**.



Aktiverer **normal modus**.



Normal modus – beveger stolen eller båren oppover.
Stående modus – hever båren til vippebordposisjon.



Normal modus – beveger stolen eller båren nedover.
Stående modus – senker vippebordet til bæreposisjon.



Normal modus – endrer fra bære til stolposisjon.
Stående modus – ikke tilgjengelig.



Normal modus – endrer fra stol til bæreposisjon.
Stående modus – ikke tilgjengelig.



Normal modus – pil til venstre – vipper stol eller bære opp til horisontal posisjon.

Stående modus – ikke tilgjengelig.

Normal modus – pil til høyre – vipper stolen bakover eller vipper båren tilbake til Trendelenburg-posisjon.

Stående modus – ikke tilgjengelig.




Normal modus – vipper stolen eller båren til venstre.
Stående modus – vipper vippebordet til venstre.




Normal modus – vipper stolen eller båren til høyre.
Stående modus – vipper vippebordet til høyre.

Håndkontroll

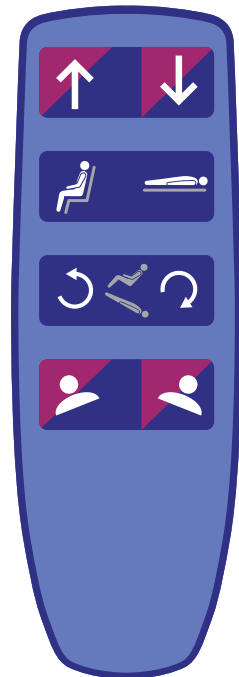


Stol – opp eller ned
Båre – opp eller ned

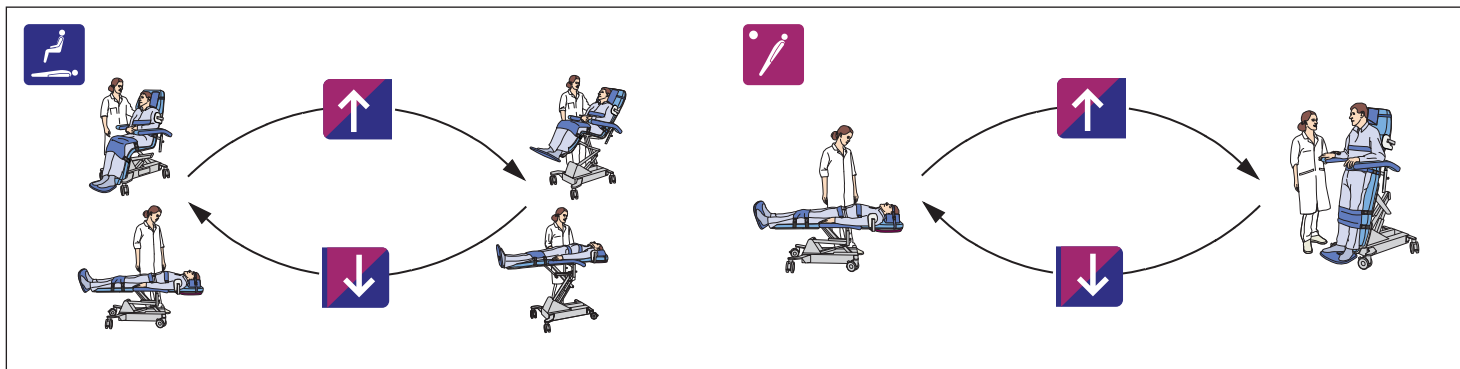


Båre til vippebord –
Vippebord til båre

Båre til stol –
Stol til båre

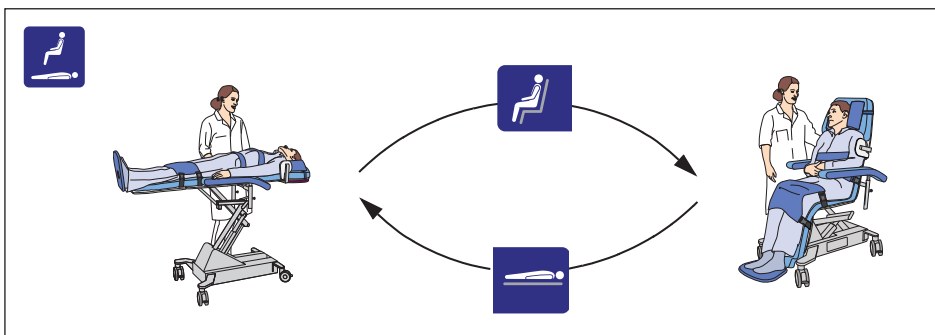

Båre til Trendelenburg –
Trendelenburg til båre

Vipp stol tilbake –
Vipp stol opp

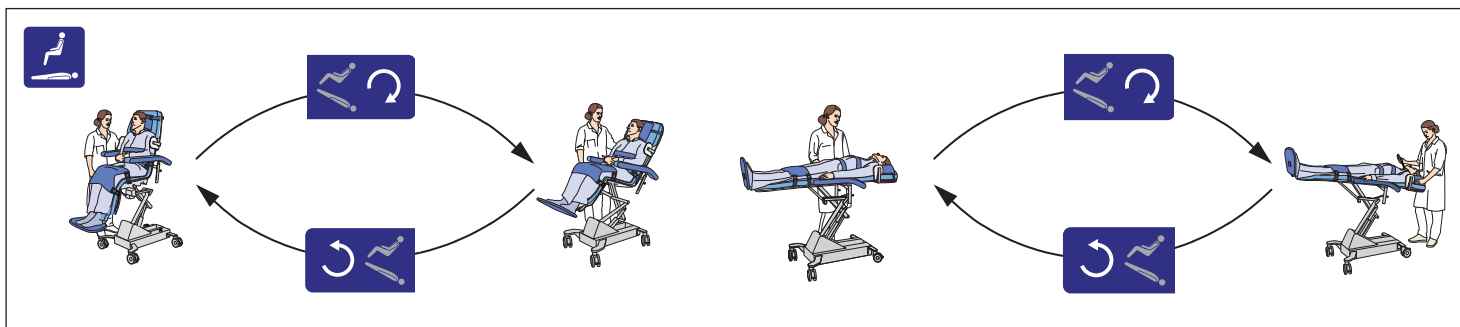

Vipp til venstre eller høyre

