


Sara Combilizer



Панель управления

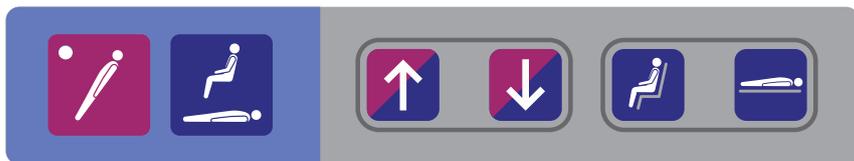

Активация **положения стоя**.



Активация **нормального режима**.



Нормальный режим: поднятие кресла или каталки.
Режим положения стоя: поднятие каталки в положение наклоняющейся кушетки.



Нормальный режим: опускание кресла или каталки.
Режим положения стоя: опускание наклоняющейся кушетки в положение каталки.



Нормальный режим: изменение положения каталки в положение кресла.
Режим положения стоя: недоступен.



Нормальный режим: переключение из положения кресла в положение каталки.
Режим положения стоя: недоступен.



Нормальный режим, стрелка влево: наклон кресла или каталки в горизонтальное положение.

Режим положения стоя: недоступен.

Нормальный режим, стрелка вправо: наклон кресла или каталки назад в положение Тренделенбурга.

Режим положения стоя: недоступен.




Нормальный режим: наклон кресла или каталки влево.
Режим положения стоя: наклон кушетки влево.




Нормальный режим: наклон кресла или каталки вправо.
Режим положения стоя: наклон кушетки вправо.

Пульт дистанционного управления

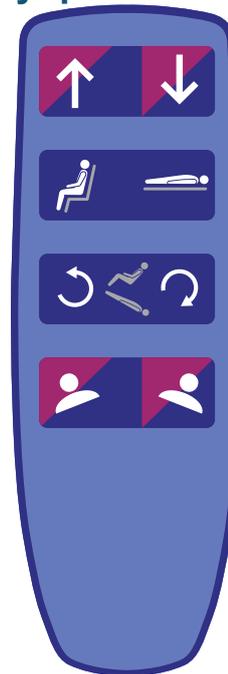


Кресло: поднятие и опускание
Каталка: поднятие и опускание

Из положения каталки в положение наклоняющейся кушетки,
из положения наклоняющейся кушетки в положение каталки

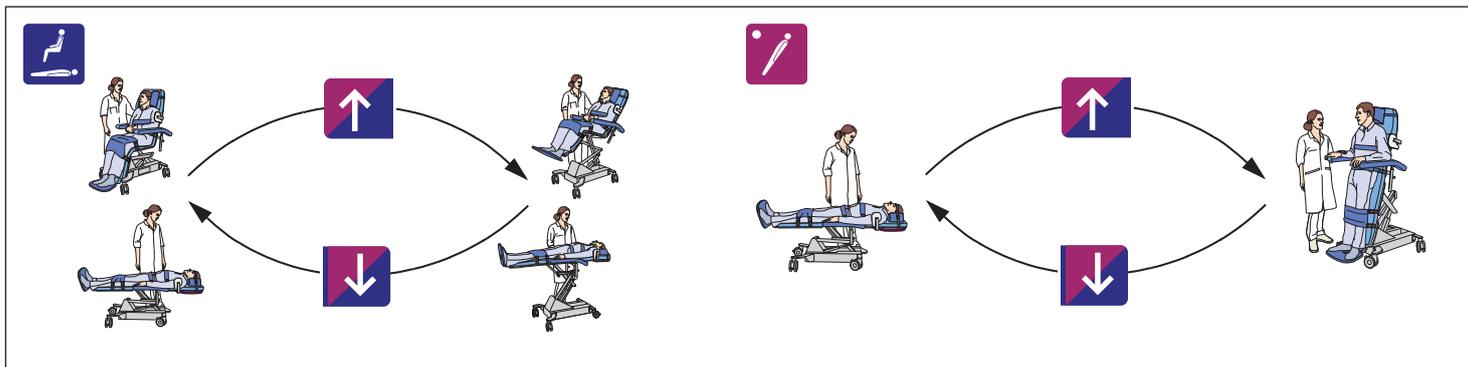


Из положения каталки в положение кресла,
из положения кресла в положение каталки

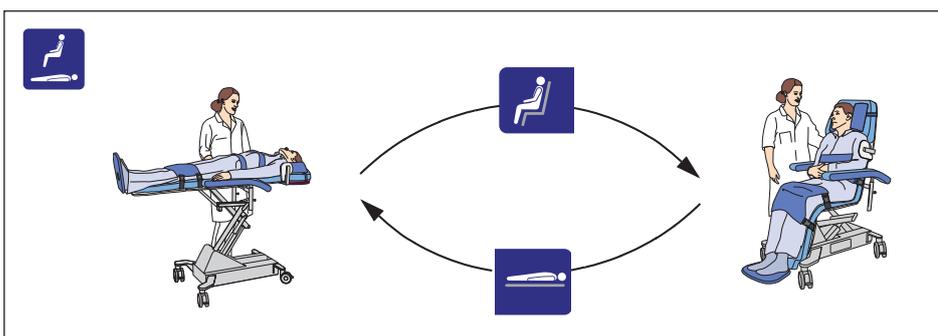

Наклон кресла назад,
подъем кресла в вертикальное положение

Из положения каталки в положение Тренделенбурга,
из положения Тренделенбурга в положение каталки

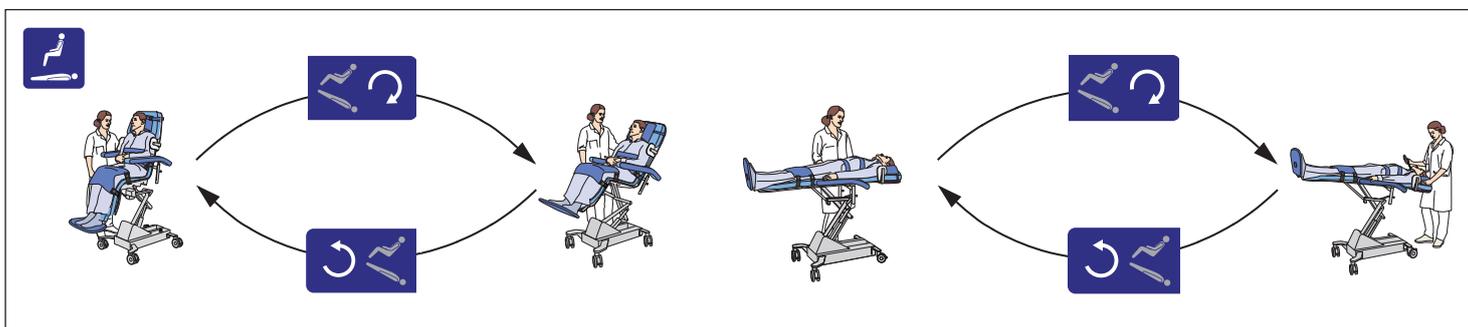

Наклон влево или вправо

