



Sara Combilizer






Klemsikringsbøjle

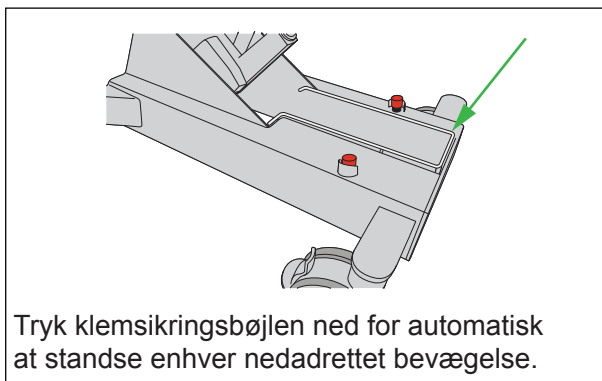



Nødstopknapper

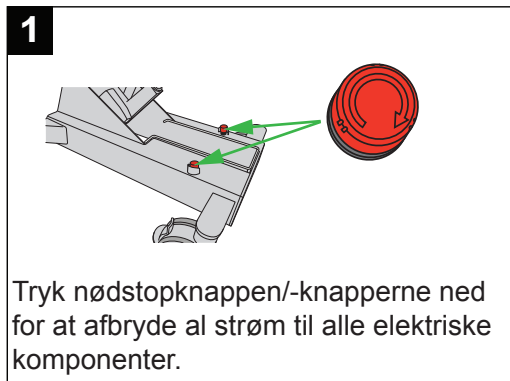

Nødfunktionsboks

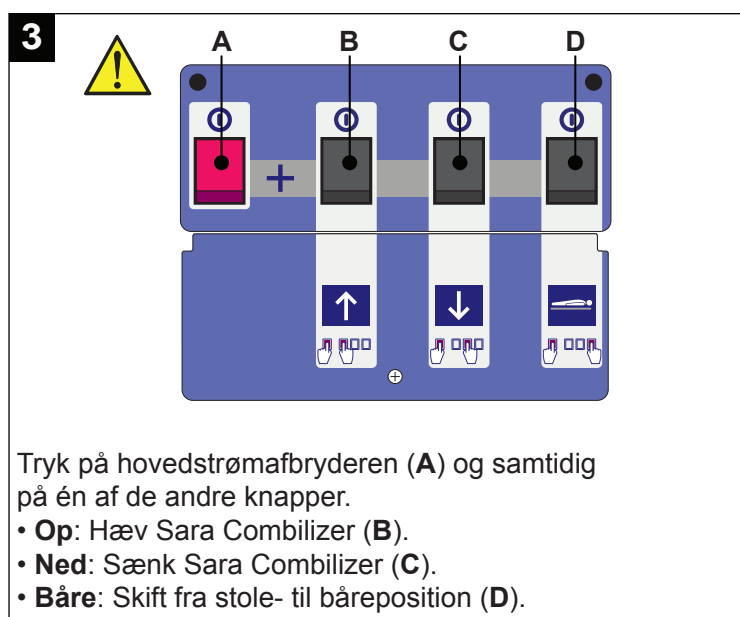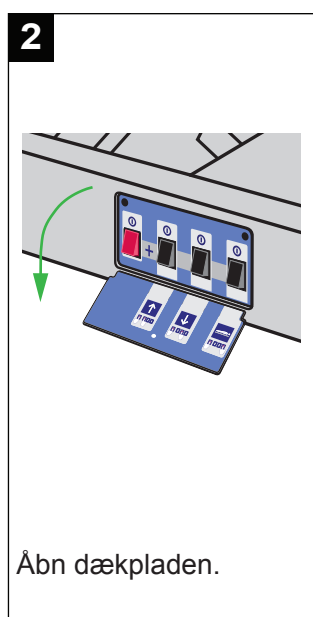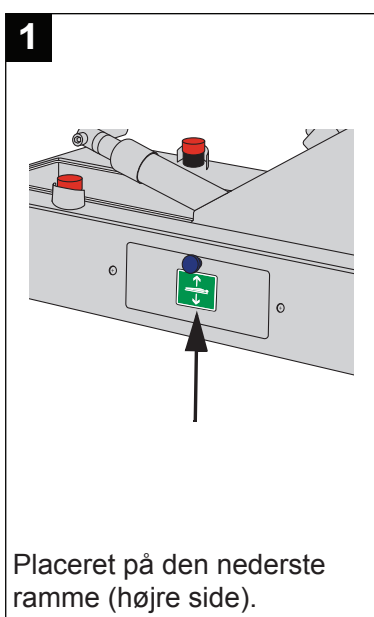

Udløser til vippeleje

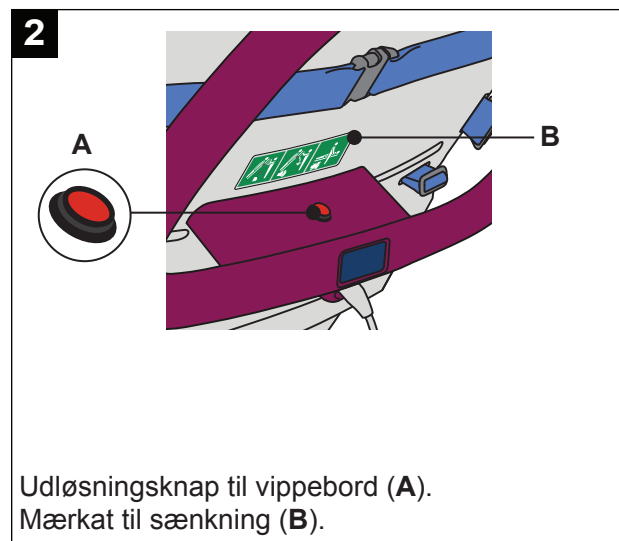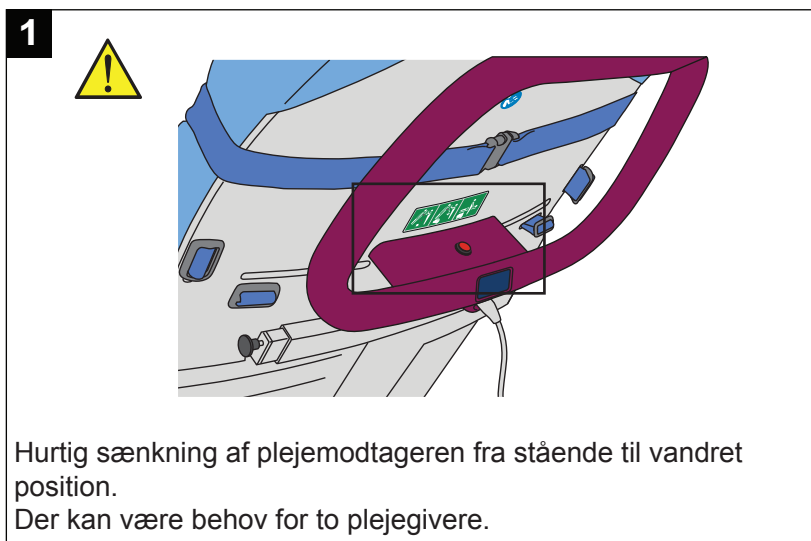


Sådan anvendes udløseren til vippelejet


1



Aktivér bremserne på Sara Combilizer

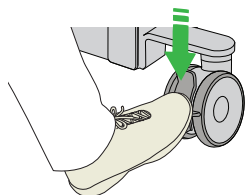

2

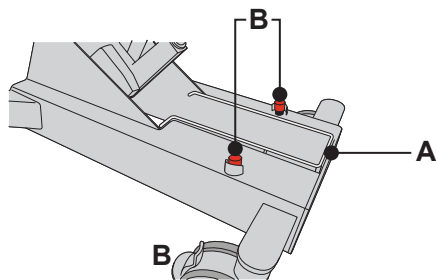


Aktivér ikke klemsikringsbøjlen (A) eller nødknapperne (B).

3




Sørg for, at plejemodtagerens hoved hviler på puderne eller madrassen under hele processen.

4

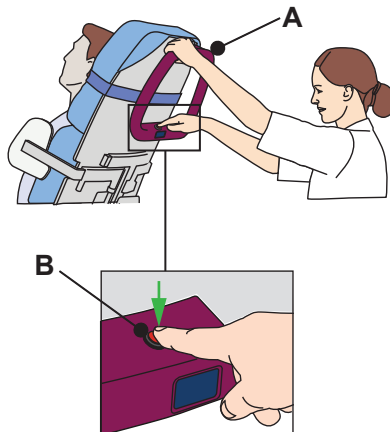


Skub på kørehåndtaget (A). Tryk på udløsningsknap til vippebord (B), indtil der høres et "klik". "Bip"-lyd starter.

5

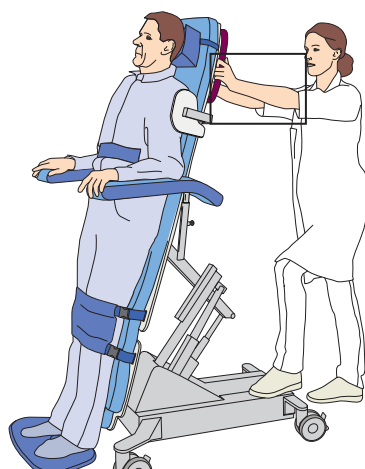

Læg begge hænder på kørehåndtaget, og hold godt fast. Hold den ene fod på chassisets bom for at give bedre støtte.

6

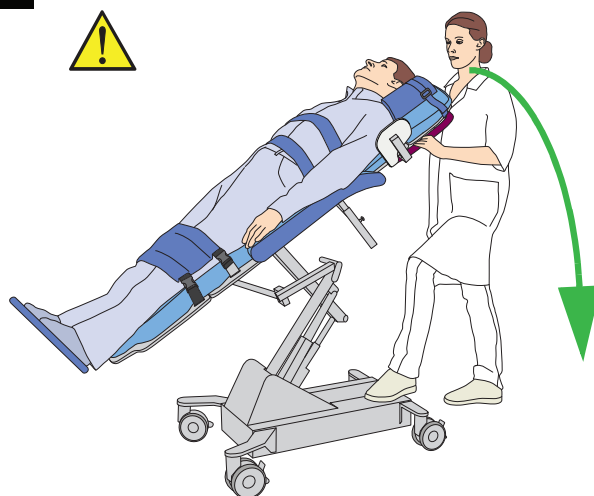


Træk vippelejet ned i fuld vandret position. Hold den ene fod på chassisets bom for at give støtte.

7




Tryk lejet ned, indtil bip-lyden stopper. Sara Combilizer er låst i vandret position i tilstanden Normal.

8

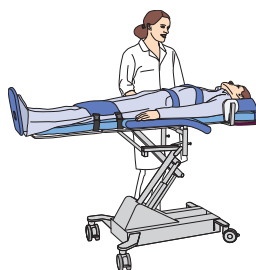

Justér om nødvendigt bære højden.

9

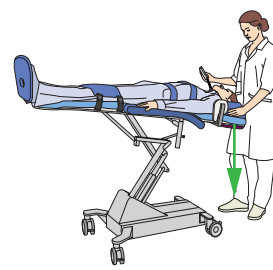

Anbring om nødvendigt plejemodtageren i Trendelenburg-stilling.

