



Sara Combilizer






Barra di protezione anti-schiacciamento

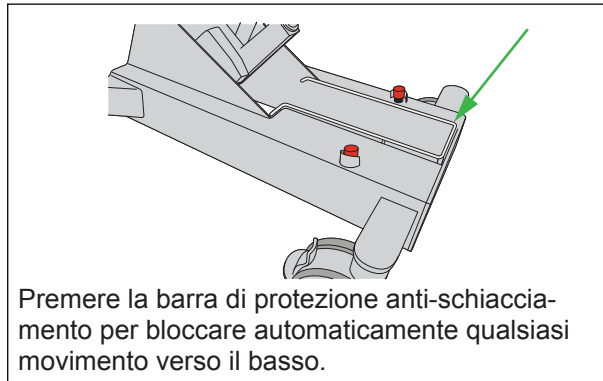



Pulsanti di arresto di emergenza

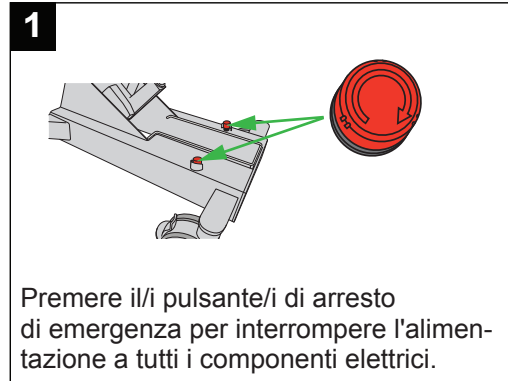

Alloggiamento per le funzioni di emergenza

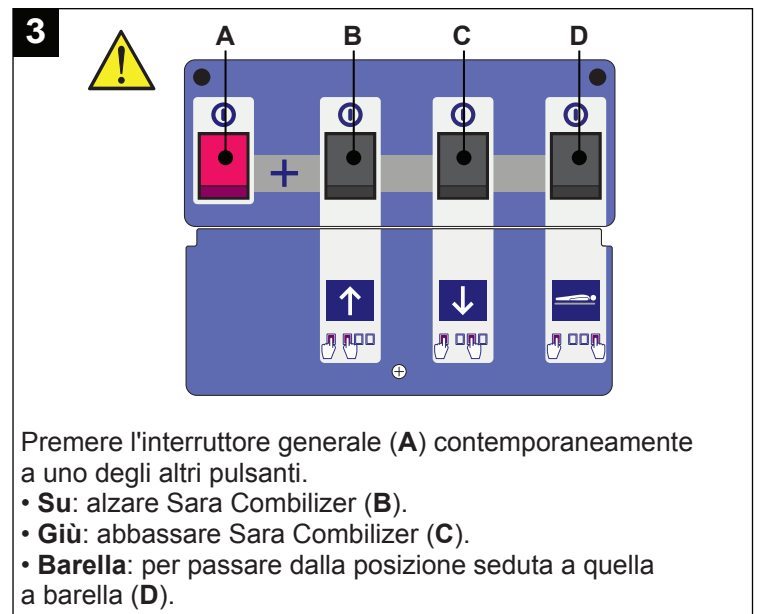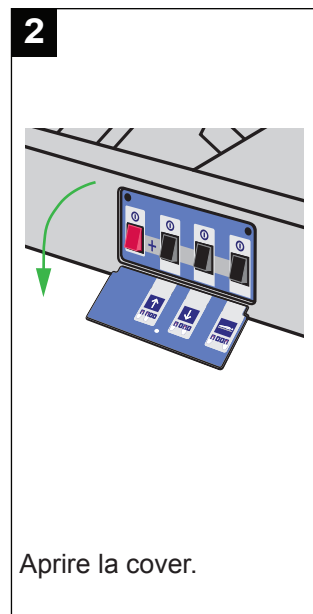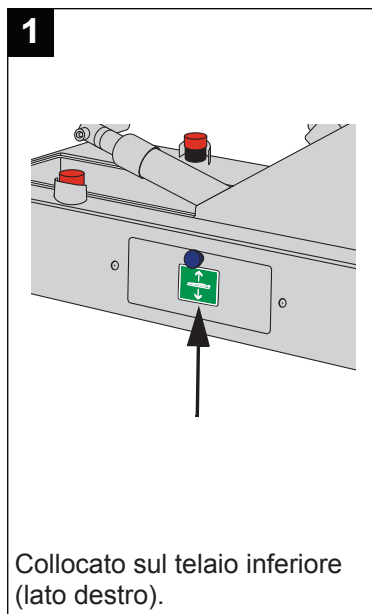

Sblocco della funzione tilt

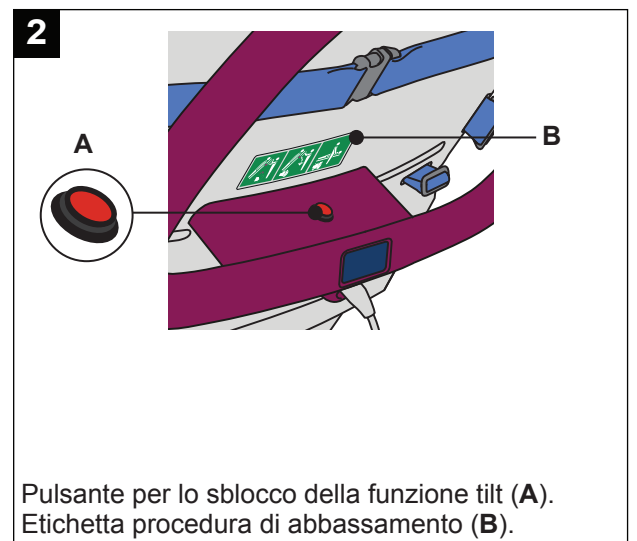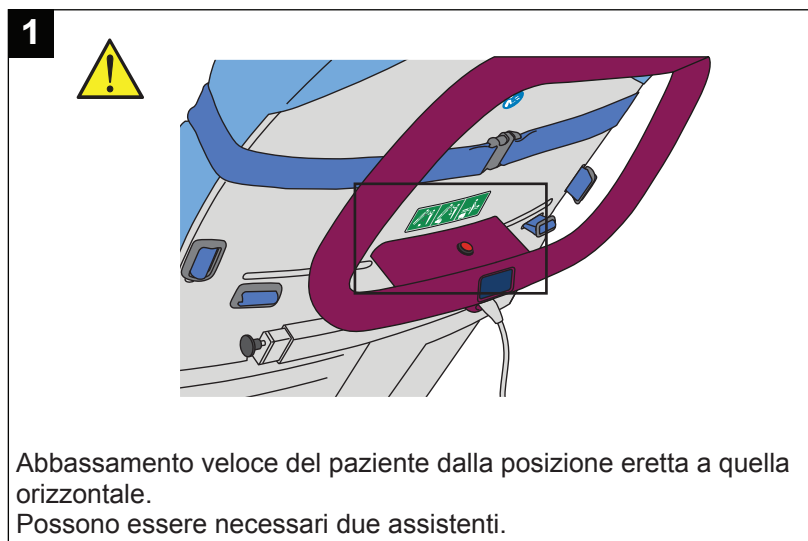


Come usare lo sblocco della funzione tilt


1



Inserire i freni di Sara Combilizer

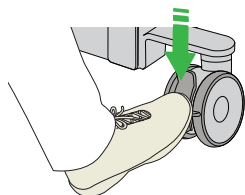

2

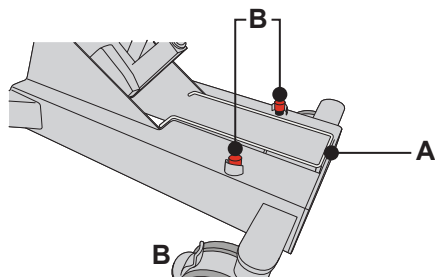



Non attivare la barra di protezione anti-schiacciamento (A) né i pulsanti di emergenza (B).

3




Durante l'intera procedura mantenere la testa del paziente sul cuscino o materasso.

4

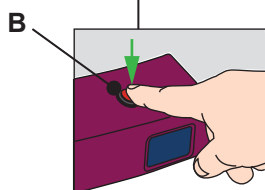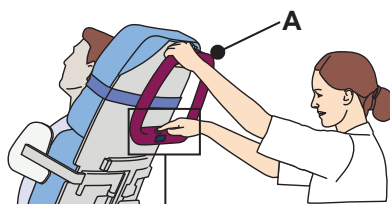


Premere l'impugnatura di trasporto (A). Premere il pulsante per lo sblocco della funzione tilt (B) fino al "clic". Si attiva un bip.

5

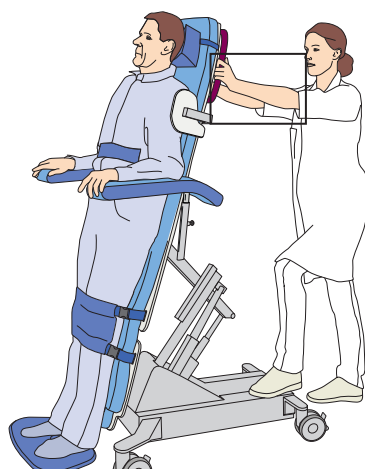

Posizionare saldamente le mani sull'impugnatura di trasporto. Per garantire un sostegno più efficace tenere un piede sulla traversa dello chassis.

6

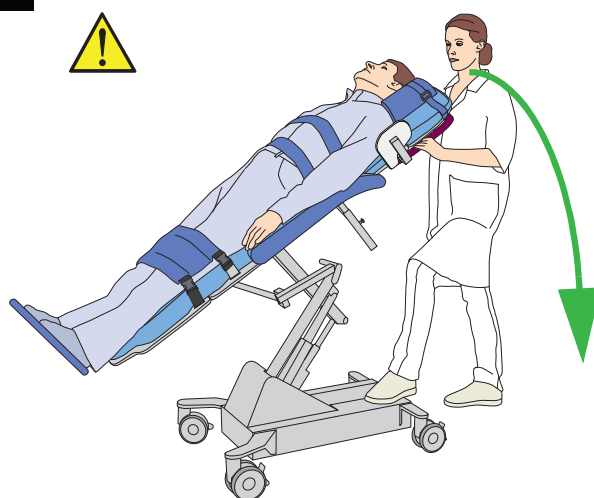

Abbassare il lettino fino alla posizione orizzontale. Per un maggior sostegno tenere un piede sulla traversa dello chassis.

7




Spingere la barella verso il basso fino a che il bip non si interrompe. Sara Combilizer è ora bloccato nella posizione orizzontale in modalità normale.

8



Se necessario, regolare l'altezza della barella.

9

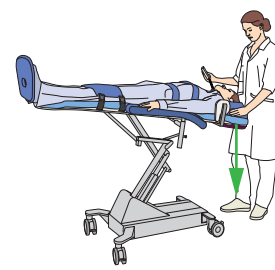

Se necessario, posizionare il paziente nella posizione Trendelenburg.

