



Sara Combilizer






Beveiligingsbalk tegen beknelling

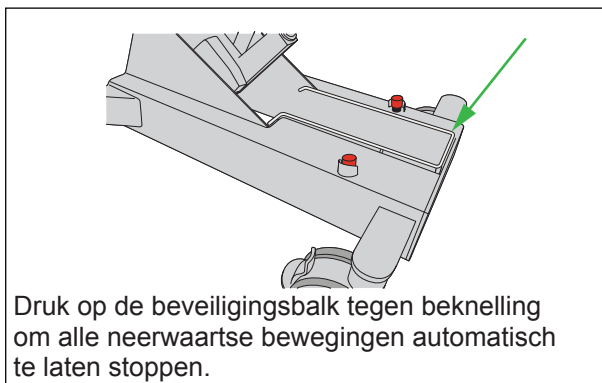


Noodstopknoppen

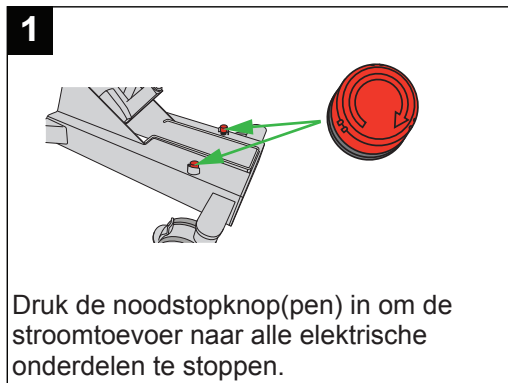

Noodfunctiepaneel

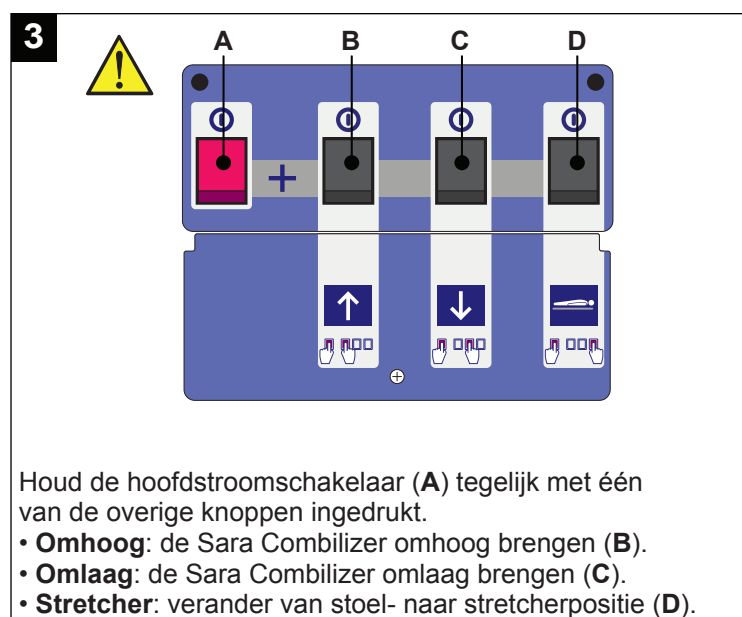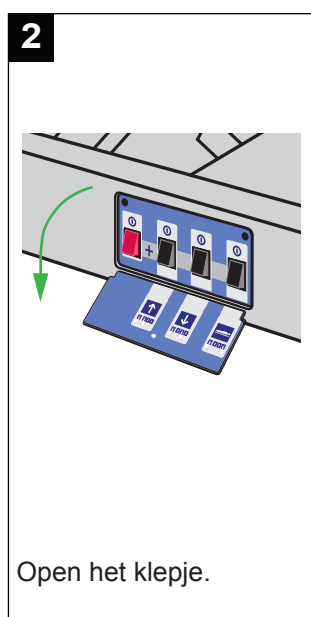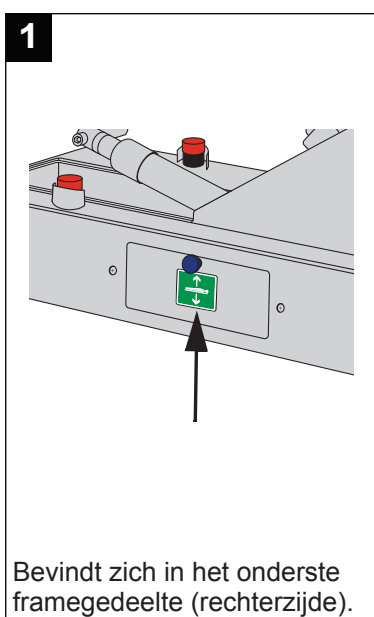

Ontgrendelfunctie kanteltafel

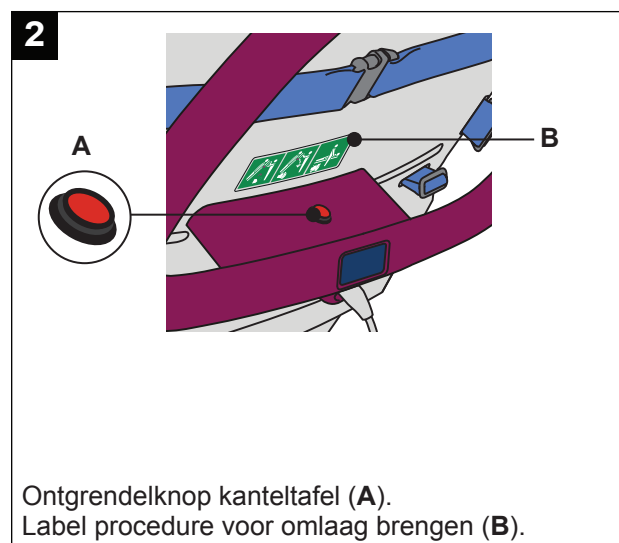


De ontgrendelfunctie van de kanteltafel gebruiken


1



Zet de Sara Combilizer op de rem

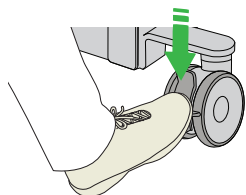


2

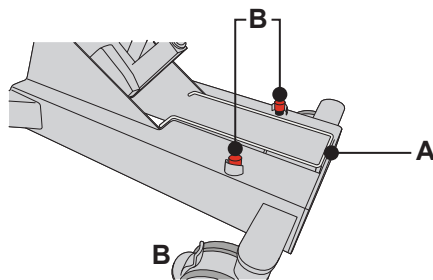


Activeer de knop beveiligingsbalk tegen beknelling (A) of de noodstopknop (B) niet.

3

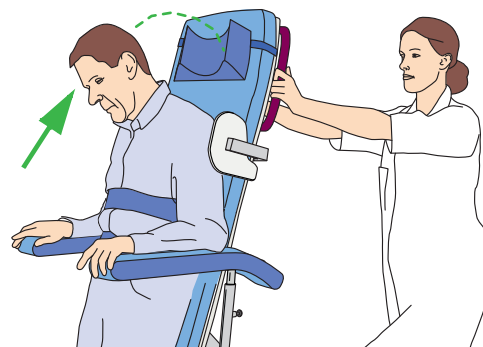


Zorg dat het hoofd van de zorgvrager gedurende de volledige procedure op het hoofdkussen of de matras rust.

4

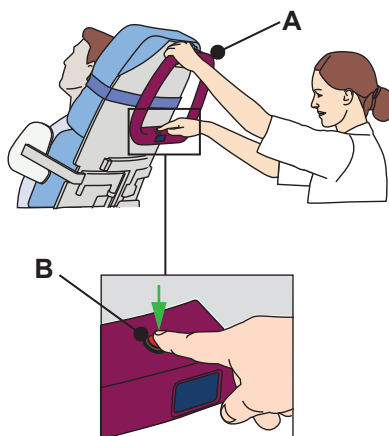


Druk op de transporthandgreep (A). Druk op de ontgrendelknop kanteltafel (B) tot er een klik hoorbaar is. Er klinkt een piepton.

5

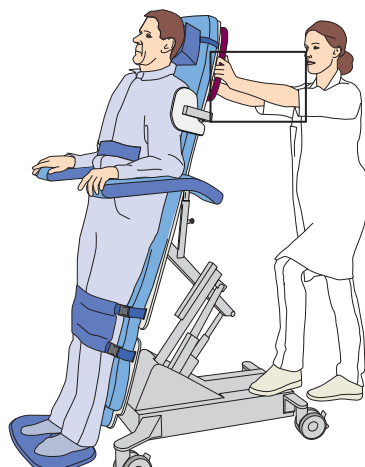

Plaats beide handen stevig op de transporthandgreep. Zet één voet op het onderstel voor meer steun.

6

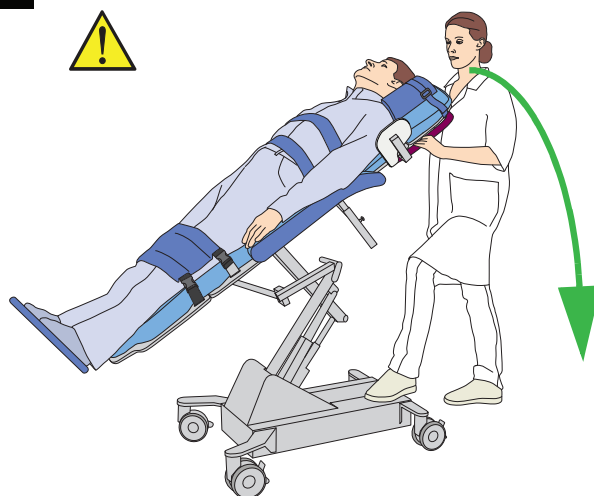


Trek de kanteltafel omlaag totdat deze in een volledig horizontale positie staat. Zet ter ondersteuning één voet op het onderstel.

7




Druk de stretcher omlaag totdat er geen piepton meer klinkt. De Sara Combilizer is vergrendeld in een horizontale positie in de normale modus.

8

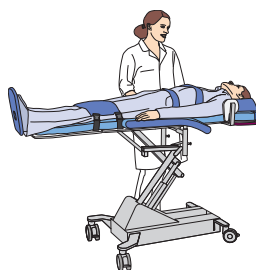

Wijzig zo nodig de hoogte van de stretcher.

9

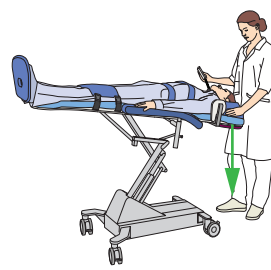

Plaats de zorgvrager zo nodig in de Trendelenburg-positie.

