



Sara Combilizer






Klämskydd

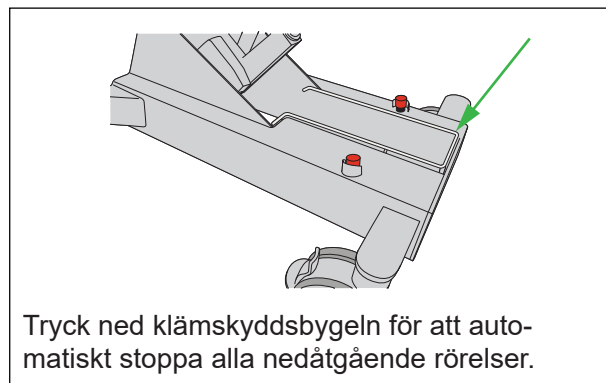



Nödstoppsknappar

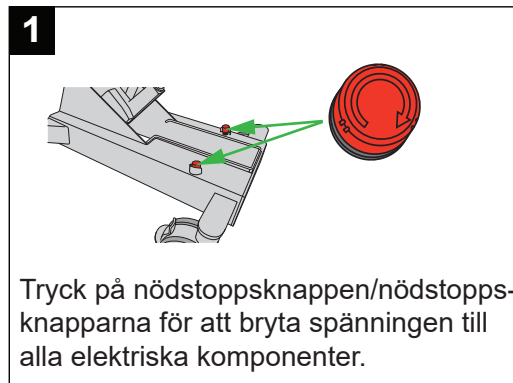

Nödfunktionsbox

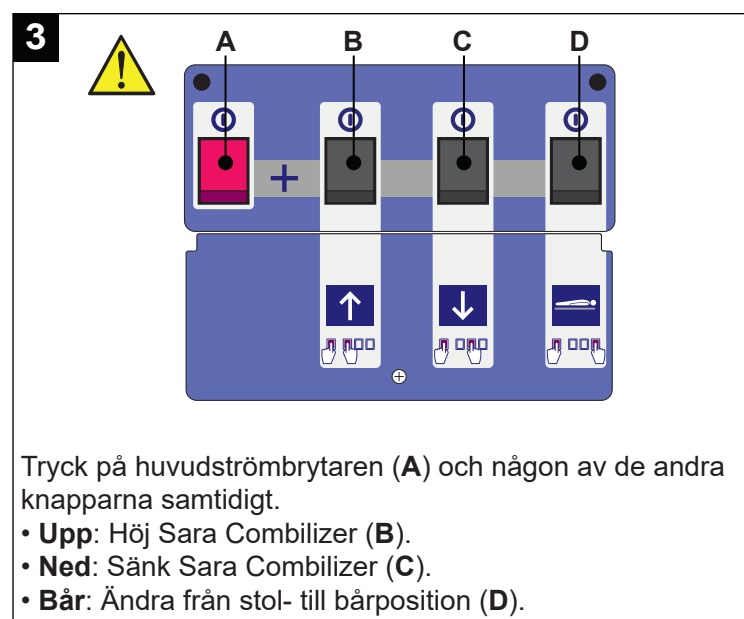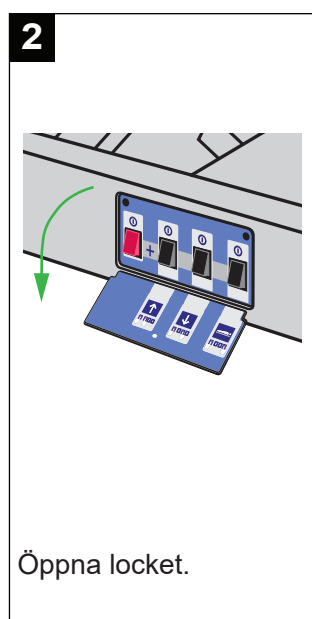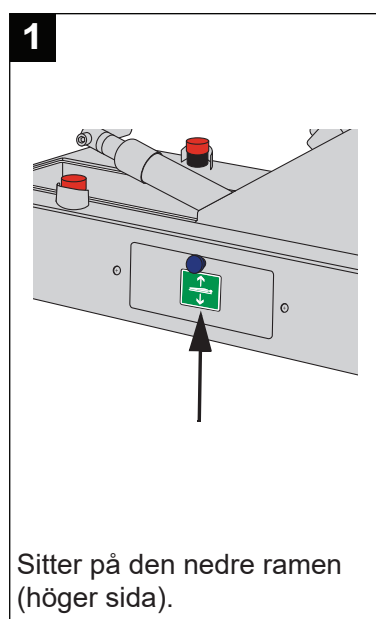

Lossningsmekanism för tippbrädet

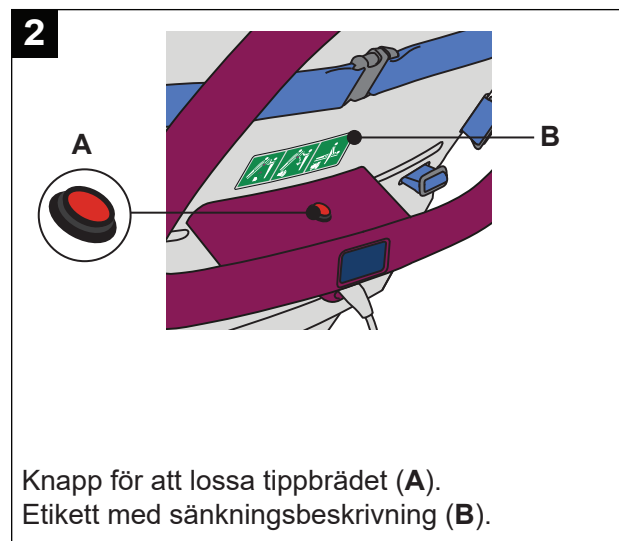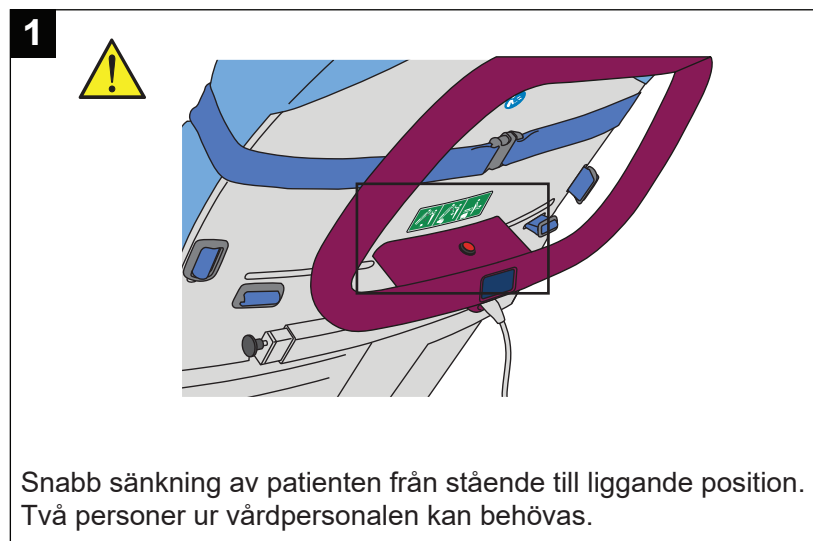


Använda lossningsmekanismen för tippbrädet


1



Lås bromsarna på Sara Combilizer

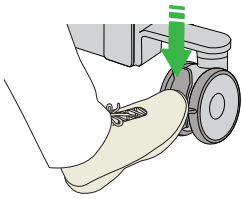


2

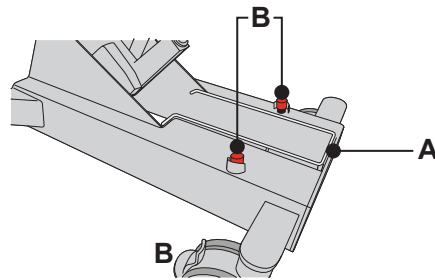


Aktivera inte klämskyddet (A) eller nödstoppsknapparna (B).

3

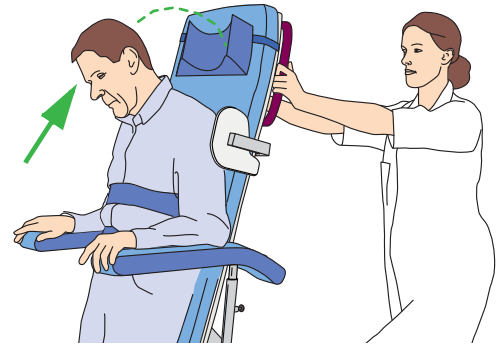


Se till att patienten har huvudet på kudden eller madrassen under hela processen.

4

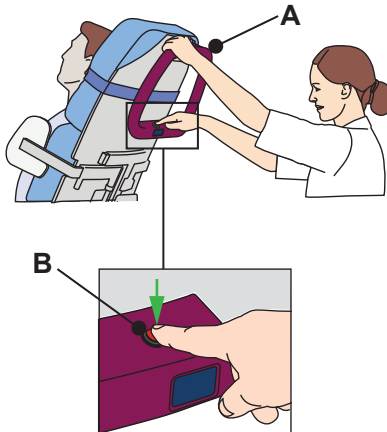


Tryck på transporthandtaget (A). Tryck på knappen för att lossa tippbrädet (B) tills ett klick hörs. Ett pip ljud hörs.

5

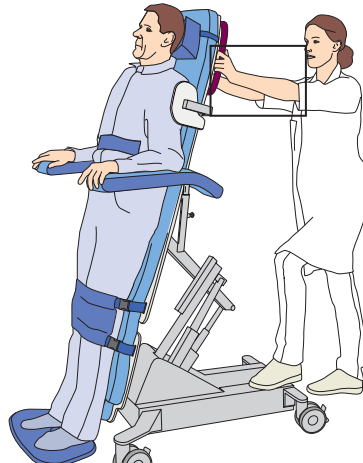

Ta ett stadigt grepp om transporthandtaget med båda händerna. Håll en fot på chassits balk för bättre stöd.

6

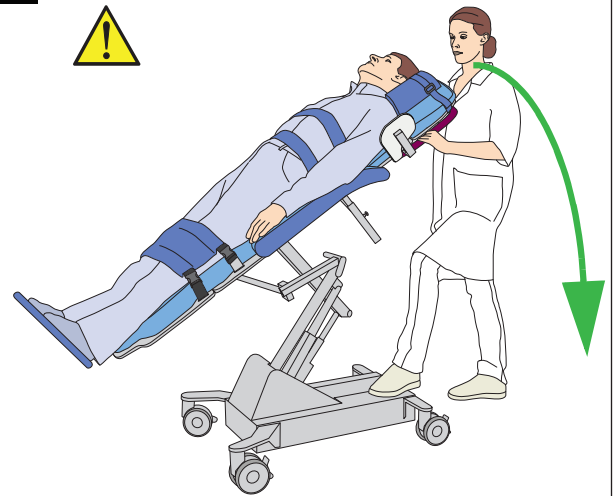


Dra tippbrädet nedåt till fullständigt horisontal position. Håll en fot på chassits balk för att få stöd.

7




Tryck baren nedåt tills pipljudet upphör. Sara Combilizer är nu låst i horisontal position i normalt läge.

8

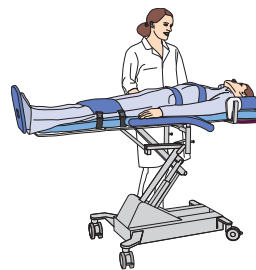

Justera bårens höjd om det behövs.

9

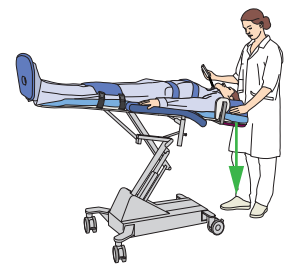

Placera vid behov patienten i Trendelenburg-läge.

