

Sara Combilizer

Aus dem Bett



1

Bringen Sie den Sara Combilizer in die waagerechte Position.
 Klappen Sie die Schulterstützen herunter (A).
 Bringen Sie die Armstützen in die waagerechte Position auf einer Höhe mit der Matratze (B).
 Entfernen Sie das Kopfkissen (C).
 Falten Sie die Sicherheitsgurte weg (D).

2

Arretieren Sie die Bremsen des Bettes.

3

Sorgen Sie dafür, dass auf jeder Seite des Bettes eine Pflegefachkraft steht.
 Klappen Sie das Bettgitter auf der Transferseite nach unten.
 Legen Sie eine Gleitmatte unter den Patienten.
 Legen Sie ein Kissen unter den Kopf des Patienten.

4

Positionieren Sie den Sara Combilizer neben dem Bett.
 Richten Sie die Hüfte des Patienten auf die Lücke zwischen der Rückenstütze und der Sitzfläche aus.

5

Heben oder senken Sie andere Geräte nicht an bzw. ab

Positionieren Sie den Sara Combilizer so, dass er 2 bis 5 cm (1 bis 2 Zoll) niedriger als das Bett ist (A). Stellen Sie die Fußstütze ein (B), um zu vermeiden, dass der Patient beim Transfer mit den Füßen dagegen stößt.

6

Stellen Sie die Bremsen am Sara Combilizer fest.


Fahren Sie mit den Schritten auf der nächsten Seite fort

Aus dem Bett – Fortsetzung

7



Es sind mindestens zwei Pflegekräfte erforderlich
Achten Sie stets auf den Kopf und die Füße des Patienten

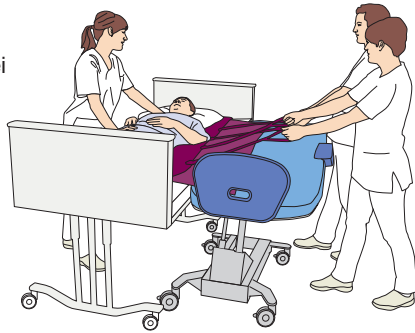


Führen Sie den Patiententransfer auf den Sara Combilizer aus.

8



Bringen Sie den Patienten in die korrekte Position

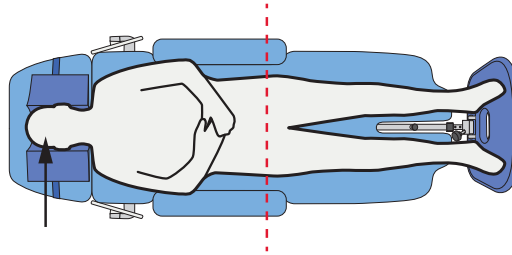


Positionieren Sie den Kopf des Patienten. Richten Sie die Hüfte des Patienten auf die Lücke zwischen der Rückenstütze und der Sitzfläche aus.

9



Schließen Sie die Sicherheitsgurte
Schwere Fußplatte

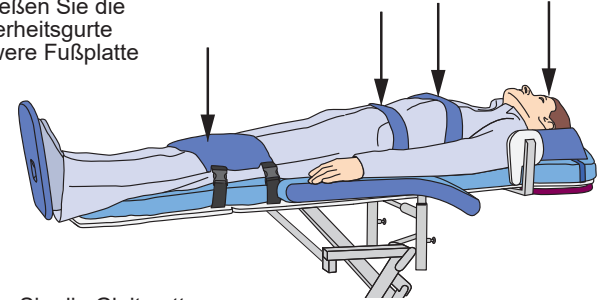


Entfernen Sie die Gleitmatte.
Sichern Sie den Patienten mit den Sicherheitsgurten für den Brust-, Hüft-, Knie- und Kopfbereich.
Klappen Sie die Schulterstützen nach vorne und passen Sie deren Weite an den Patienten an.
Bringen Sie die Fußstütze an.

Ins Bett

1




Aktivieren Sie die Bremsen
Arretieren Sie die Seitenstützen

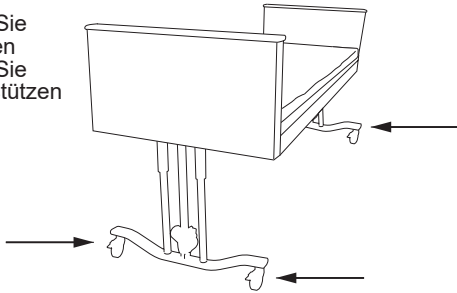

Arretieren Sie die Bremsen des Bettes.
Klappen Sie das Bettgitter auf der Transferseite nach unten, falls vorhanden.

2

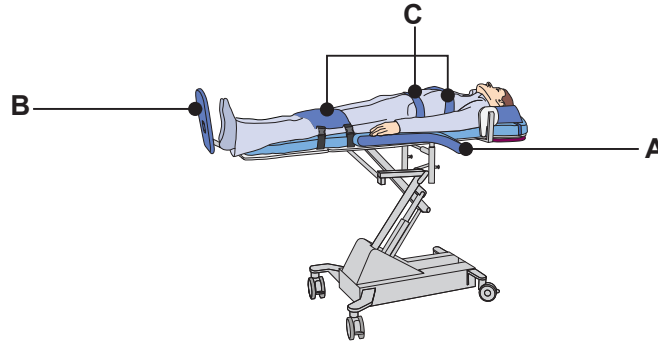


Bringen Sie die Armstützen in die waagerechte Position (A).
Ziehen Sie die Fußstützen weg vom Patienten (B).
Öffnen Sie alle Sicherheitsgurte an der Bettseite und klappen Sie sie weg (C).

3



Legen Sie eine Gleitmatte unter den Patienten.

4

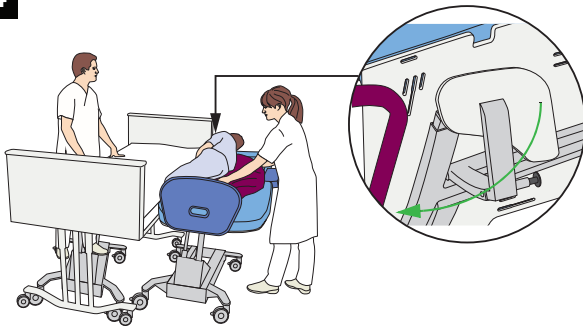


Klappen Sie die Schulterstütze (B) an der Bettseite des Sara Combilizers herunter.

5




Heben oder senken Sie andere Geräte nicht an bzw. ab

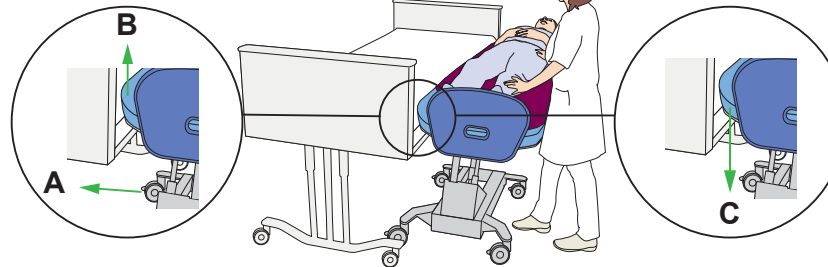

Platzieren Sie den Sara Combilizer nahe am Bett (A).
Stellen Sie die Höhe des Sara Combilizers so ein, dass er 5 cm (2 Zoll) höher als das Bett ist (B).
Senken Sie den Sara Combilizer ab, sodass er auf dem Bett aufliegt, um einen reibungslosen Transfer zu ermöglichen (C).

6

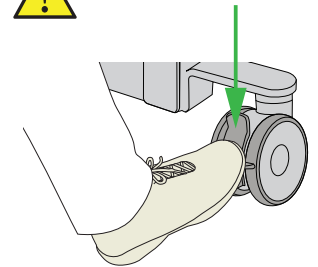

Stellen Sie die Bremsen am Sara Combilizer fest.


Fahren Sie mit den Schritten auf der nächsten Seite fort

Ins Bett – Fortsetzung

7




Es sind mindestens zwei Pflegekräfte erforderlich
Achten Sie stets auf den Kopf und die Füße des Patienten

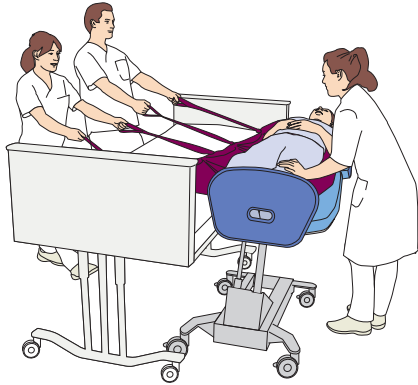

Sorgen Sie dafür, dass sich eine Pflegefachkraft neben dem Sara Combilizer und eine Pflegefachkraft auf der gegenüberliegenden Seite des aufnehmenden Bettes befindet.
Überführen Sie den Patienten mit der Gleitmatte auf das Bett, ohne dabei den Kopf oder die Füße des Patienten anzustoßen.

8

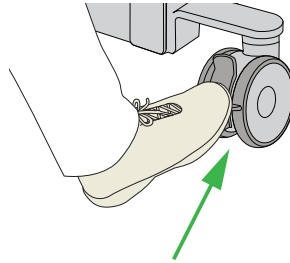


Lösen Sie die Bremsen und ziehen Sie den Sara Combilizer vom Bett weg.

9




Entfernen Sie die Gleitmatte
Arretieren Sie die Seitenstützen

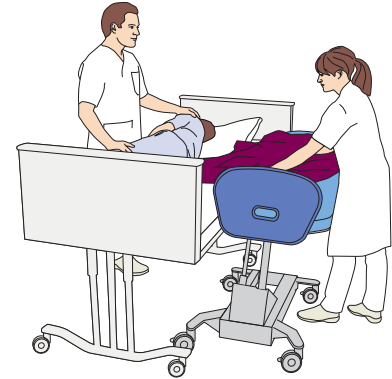

Ziehen Sie die Gleitmatte unter dem Patienten hervor.
Streichen Sie Falten oder Unregelmäßigkeiten auf der Matratze oder dem Bettzeug des Patienten glatt, um druckbedingte Verletzungen oder Unbehagen zu vermeiden.
Klappen Sie die Bettgitter hoch, falls vorhanden.

Von der Sitzposition in den Stand

1

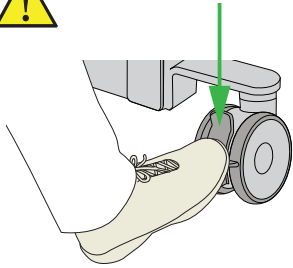

Bereiten Sie das Hilfsmittel in der Nähe vor und halten Sie es bereit. Stellen Sie die Bremsen am Sara Combilizer fest.

2



Stellen Sie den Sara Combilizer in gerader Stuhlposition auf der niedrigsten Höhe ein.

3




Klappen Sie die Schulterstütze weg und entfernen Sie die Armstützen auf der Transferseite. Nehmen Sie alle Sicherheitsgurte ab. Drehen Sie den Patienten vorsichtig zur Transferseite hin.

4




Kippen Sie den Sara Combilizer vorsichtig zur Transferseite, sodass die Füße des Patienten den Boden berühren.

5

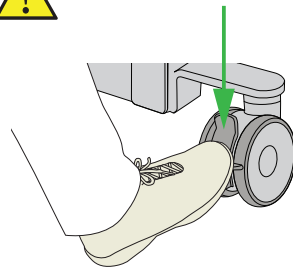

Stellen Sie ein Hilfsmittel vor den Patienten. Stellen Sie die Bremsen des Hilfsmittels fest.


6

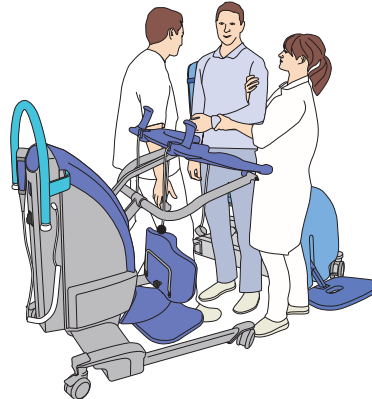

Helfen Sie dem Patienten in den Stand. Stützen Sie den Patienten und führen Sie den Patienten zum Hilfsmittel.

Vom Stand in die Sitzposition

1

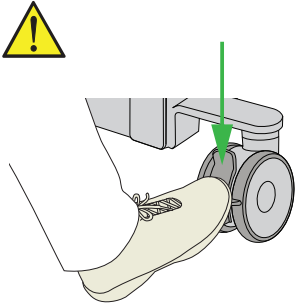


Bereiten Sie das Hilfsmittel in der Nähe vor und halten Sie es bereit. Stellen Sie die Bremsen am Sara Combilizer fest.

2




Stellen Sie den Sara Combilizer in gerader Stuhlposition auf der niedrigsten Höhe ein.

3

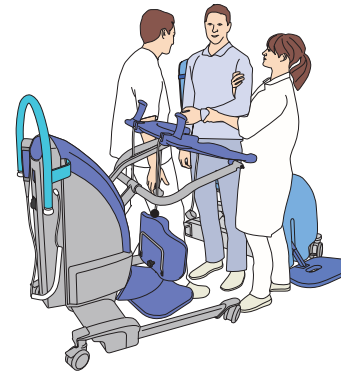

Klappen Sie die Schulterstütze weg und entfernen Sie die Armstützen auf der Transferseite. Befördern Sie den Patienten mit dem Hilfsmittel nahe an den Sara Combilizer heran.

4

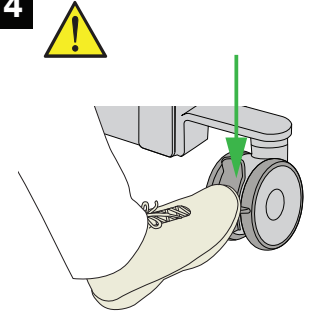

Stellen Sie die Bremsen des Hilfsmittels fest.

5



Stellen Sie den Sara Combilizer auf die Sitzhöhe des Patienten ein. Kippen Sie den Sara Combilizer leicht in Richtung Transferseite. Stützen Sie den Patienten während der Hinsetzbewegung ab.

6



Kippen Sie den Sara Combilizer in die waagerechte Stuhlposition. Stützen Sie dabei den Patienten.

7



Drehen Sie den Patienten in eine Sitzposition, bei der das Gesicht nach vorne zeigt. Heben Sie die Füße des Patienten an und stellen Sie sie auf die Fußstütze.

8



Befestigen Sie die erforderlichen Sicherheitsgurte und passen Sie sie an den Patienten an. Befestigen Sie die Armstütze und passen Sie deren Weite und Höhe an. Klappen Sie die Schulterstütze nach vorne und passen Sie deren Weite an.