


# Sara Combilizer




## Vanuit bed

**1**

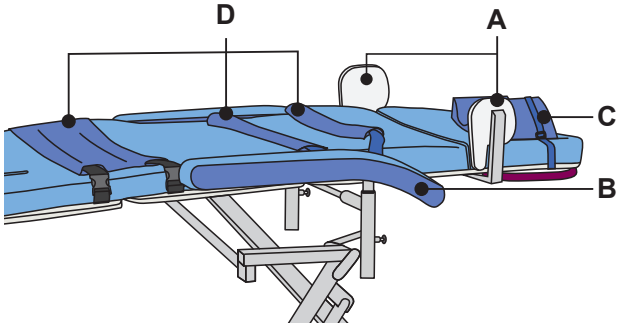

Plaats Sara Combilizer in horizontale positie. Klap schoudersteunen (A) omlaag.  
Plaats armleuningen in horizontale positie, op gelijke hoogte met matras (B).  
Verwijder kussen (C).  
Vouw veiligheidsriemen (D) weg.

**2**

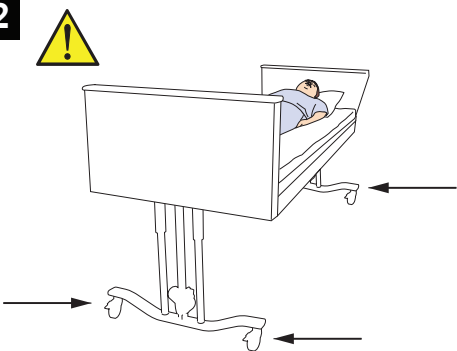

Zet het bed op de rem.

**3**




Zorg dat er aan weerszijden van het bed een zorgverlener staat  
Klap beddek aan kant van transfer omlaag.  
Plaats glijzeil onder zorgvrager.  
Leg een kussen onder het hoofd van de zorgvrager.

**4**



Plaats Sara Combilizer naast het bed.  
Lijn de heup van de zorgvrager uit met de opening tussen rugsteunplaat en zitplaat.

**5**

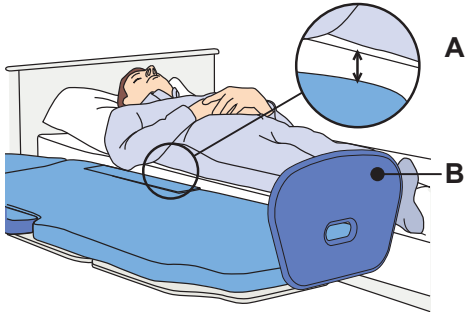

Breng geen andere apparatuur omhoog of omlaag

Plaats Sara Combilizer 2 tot 5 cm (1 tot 2 inch) (A) lager dan het bed.  
Verstel voetsteun (B) om te voorkomen dat de voeten van de zorgvrager tijdens de transfer worden geraakt.

**6**



Zet Sara Combilizer op de rem.


Ga door met de stappen op de volgende pagina.

## Vervolg van Vanuit bed

7



Twee of meer  
zorgverleners  
nodig  
Let op hoofd  
en voeten van  
zorgvrager

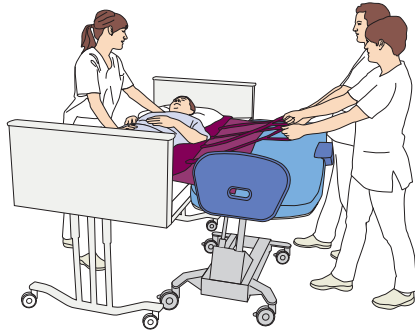


Breng zorgvrager over op de Sara Combilizer.

8



Plaats zorgvrager  
correct

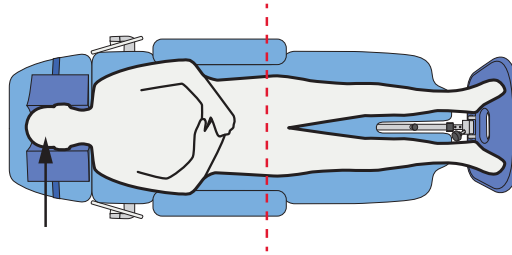


Positioneer hoofd van zorgvrager. Lijn de heup van de zorgvrager uit met de opening tussen rugsteunplaat en zitplaat.

9



Maak veiligheidsriemen vast  
Zware voetplaat

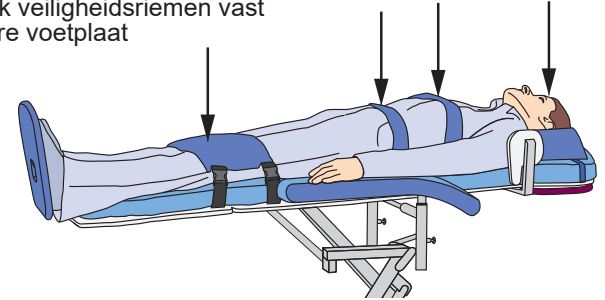


Verwijder glijzeil.  
Maak zorgvrager vast met veiligheidsriemen voor borstkas, heupen, knieën en hoofd.  
Klap schoudersteunen omhoog, pas breedte aan zorgvrager aan.  
Bevestig voetensteun.

## Naar bed

1




Activeer de remmen  
Vergrendel zijsteun

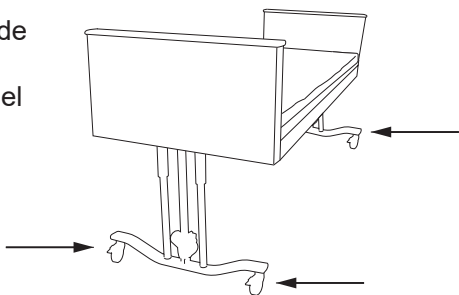


Zet het bed op de rem.  
Klap bedhek (indien aanwezig)  
aan kant van transfer omlaag.

2

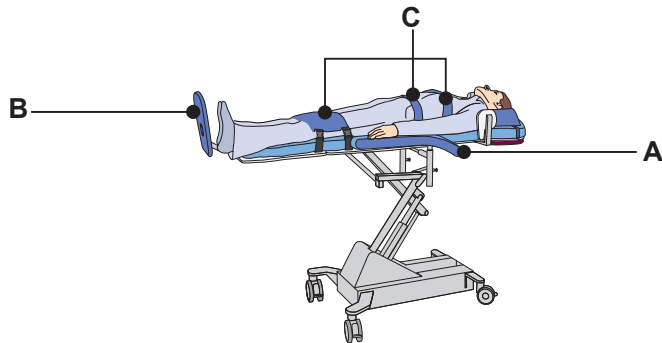


Plaats armleuningen in horizontale positie (A).  
Verstel voetsteun (B) weg van de voeten van de zorgvrager.  
Maak alle veiligheidsriemen (C) aan de kant van het bed los  
en vouw ze weg.

3

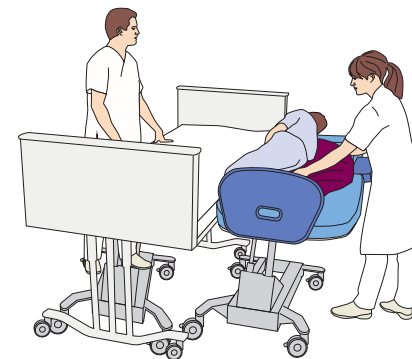

Plaats glijzeil onder zorgvrager.

4

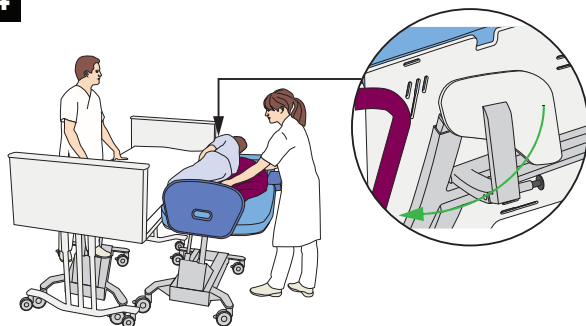


Klap schoudersteun (B) op de bedkant  
van Sara Combilizer omlaag.

5




Breng geen andere apparatuur  
omhoog of omlaag

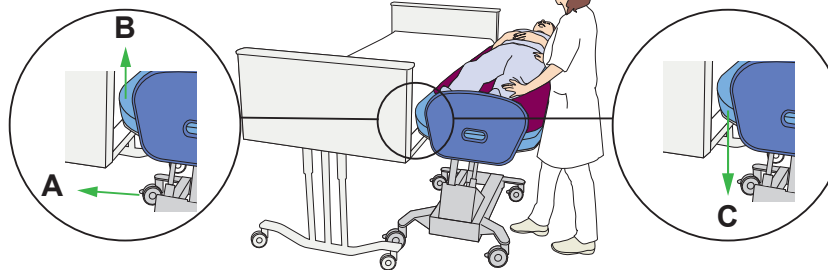

Plaats Sara Combilizer dicht bij bed (A).  
Stel hoogte van Sara Combilizer af tot 5 cm (2 inch) boven het bed (B).  
Breng Sara Combilizer omlaag op het bed voor een vlakke transfer (C).

6

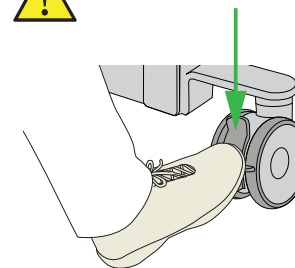

Zet Sara Combilizer op de rem.


Ga door met de stappen op de volgende pagina.

## Vervolg van Naar bed

7




Twee of meer  
zorgverleners  
nodig  
Let op hoofd  
en voeten van  
zorgvrager

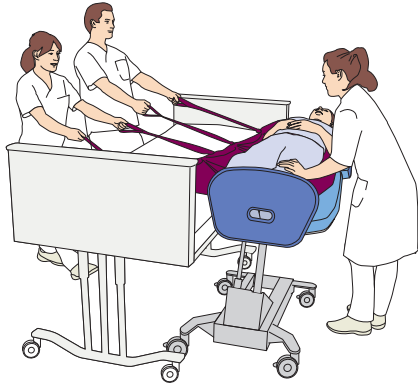

Zorg dat er een zorgverlener staat aan de kant van de Sara Combilizer en één aan de tegenovergestelde kant van het bed waarheen de zorgvrager wordt verplaatst.  
Verplaats de zorgvrager met behulp van het glijzeil naar het bed zonder het hoofd of de voeten van de zorgvrager te raken.

8

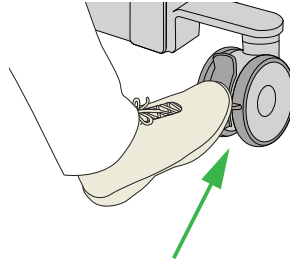


Ontgrendel remmen en beweeg  
Sara Combilizer van het bed weg.

9


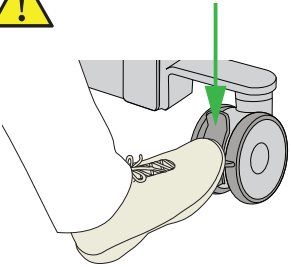


Verwijder  
glijzeil  
Vergrendel  
zijsteun

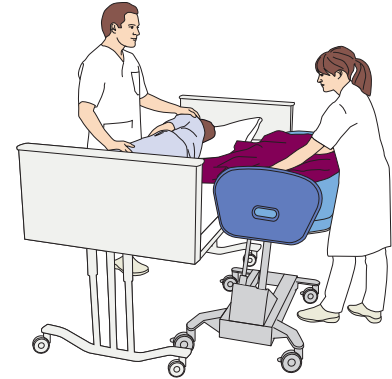

Neem het glijzeil onder zorgvrager weg.  
Verwijder rimpels of ongelijkmatigheid op matras of kleding  
van zorgvrager om druk of ongemak te voorkomen.  
Klap beddek (indien aanwezig) omhoog.

## Vanuit een zittende naar een staande positie

**1**  


Bereid het hulpmiddel en plaats het dichtbij. Zet Sara Combilizer op de rem.

**2** 


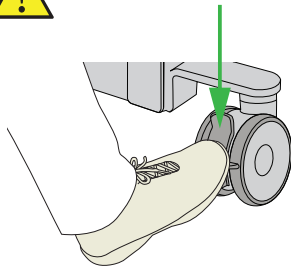
Plaats de Sara Combilizer in een verticale stoelpositie en op de laagste stoelstand.

**3** 


Klap de schoudersteun omlaag en verwijder de armleuningen aan kant van de transfer. Maak alle veiligheidsriemen los. Draai de zorgvrager voorzichtig naar de kant van de transfer.

**4** 

Kantel de Sara Combilizer voorzichtig naar de kant van de transfer, zodat de voeten van de zorgvrager de grond kunnen raken.

**5**  


Plaats hulpmiddel voor de zorgvrager. Zet het hulpmiddel op de rem.

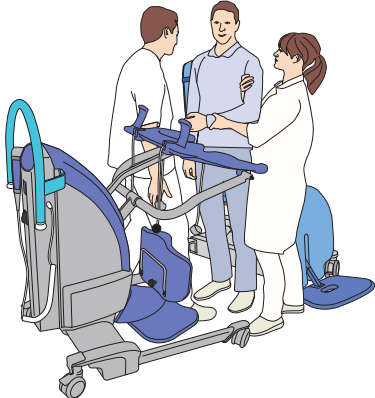**6** 

Help de zorgvrager in een staande positie. Steun en begeleid de zorgvrager in de richting van het hulpmiddel.

## Vanuit een staande naar een zittende positie

1

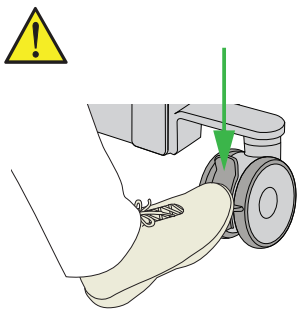


Bereid het hulpmiddel en plaats het dichtbij. Zet Sara Combilizer op de rem.

2




Plaats de Sara Combilizer in een verticale stoelpositie en op de laagste stoelstand.

3

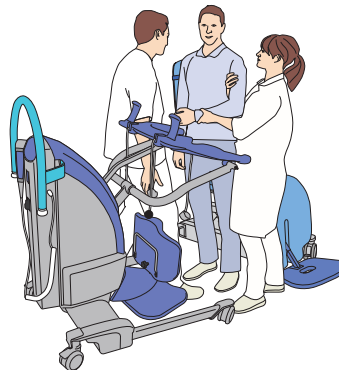

Klap de schoudersteun omlaag en verwijder de arMLEUNINGEN aan de kant van de transfer. Beweeg de zorgvrager met het hulpmiddel naar de Sara Combilizer.

4

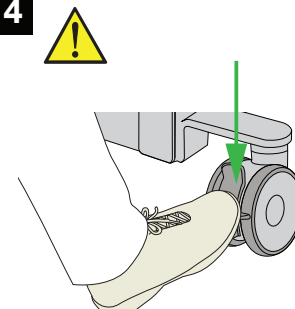

Zet het hulpmiddel op de rem.

5



Stel de Sara Combilizer af op de zithoogte van de zorgvrager. Kantel de Sara Combilizer licht naar de kant van de transfer. Ondersteun zorgvrager tijdens beweging naar een zittende positie.

6



Kantel de Sara Combilizer naar een horizontale stoelpositie. Ondersteun de zorgvrager.

7



Draai zorgvrager zodat hij/zij recht in de stoel zit. Breng de voeten van de zorgvrager omhoog en zet ze op de voetensteun.

8



Breng de nodige veiligheidsriemen aan en stel ze af. Bevestig arMLEUNING en stel breedte en hoogte ervan af. Klap schoudersteun omhoog en stel breedte af.