


Sara Combilizer




Fra seng

1

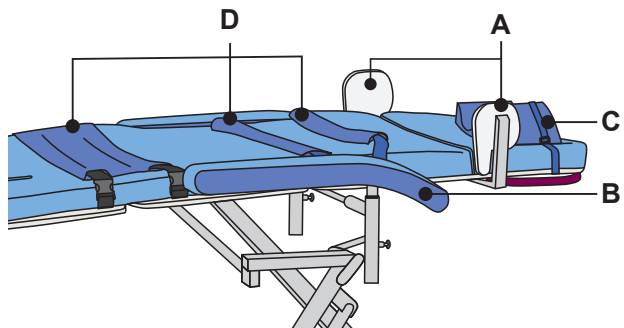

Sett Sara Combilizer i horisontal stilling. Fell ned skulderstøttene (A).
Sett armlenene i horisontal stilling, på nivå med madrassen (B).
Fjern puten (C).
Brett unna sikkerhetsbeltene (D).

2

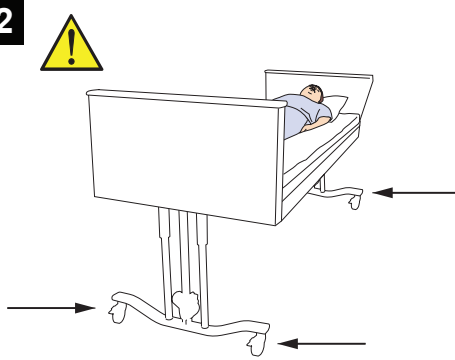


Sett på bremsene på sengen.

3




Plasser en pleier på hver side av sengen.
Fell ned sengegjerdet på forflytningssiden.
Legg et sklihjelpemiddel under pasienten.
Legg en pute under pasientens hode.

4

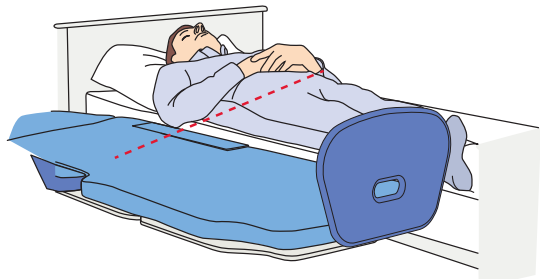

Plasser Sara Combilizer inntil sengen.
Innrett pasientens hofte mot mellomrommet mellom ryggstøtteplaten og seteplaten.


5

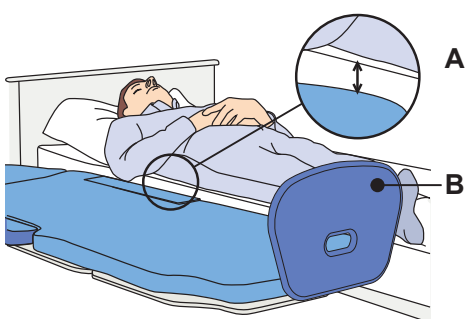

Ikke hev eller senk annet utstyr

Plasser Sara Combilizer 2 til 5 cm (1 til 2 tommer) (A) lavere enn sengen. Juster fotstøtten (B) slik at den ikke treffer pasientens føtter under forflytningen.

6

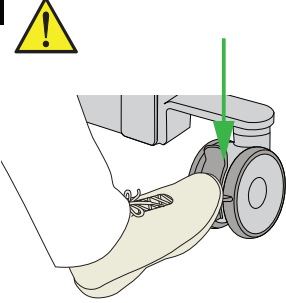

Sett på bremsene på Sara Combilizer.


Fortsett med trinnene på neste side.

Fra sengen forts.

7



Det trengs to eller flere pleiere. Hold øye med pasientens hode og føtter.

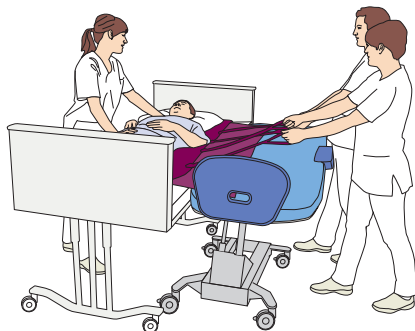


Flytt pasienten til Sara Combilizer.

8



Plasser pasienten riktig

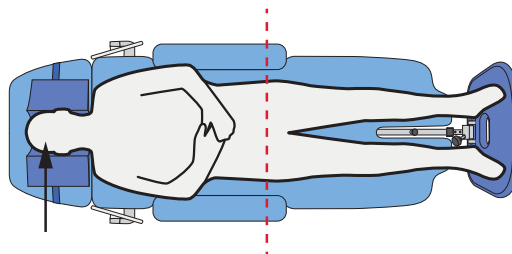


Posisjoner pasientens hode. Innrett pasientens hofte mot mellomrommet mellom ryggstøtteplaten og seteplaten.

9



Fest sikkerhetsbeltene
Tung fotplate

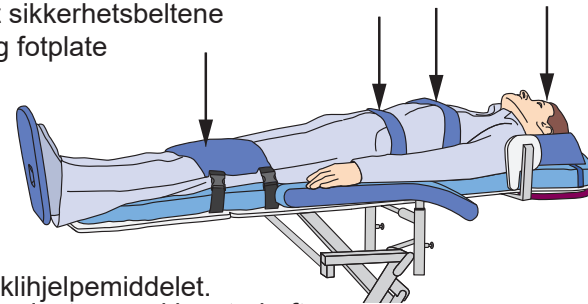


Fjern sklihjelpemiddelet. Sikre pasienten med bryst-, hofte-, kne- og hodesikkerhetsbelter. Fell opp skulderstøttene og juster bredden i forhold til pasienten. Fest fotstøtten.

Til seng

1




Sett på bremsene
Lås sidestøtten

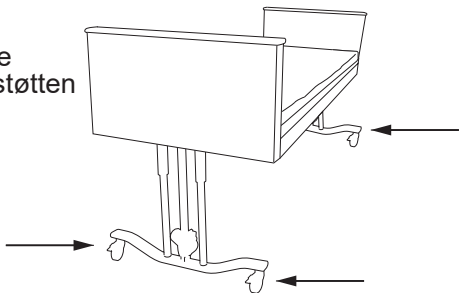


Sett på bremsene på sengen.
Fell ned sengegjerdet på forflytningssiden,
hvis montert.

2

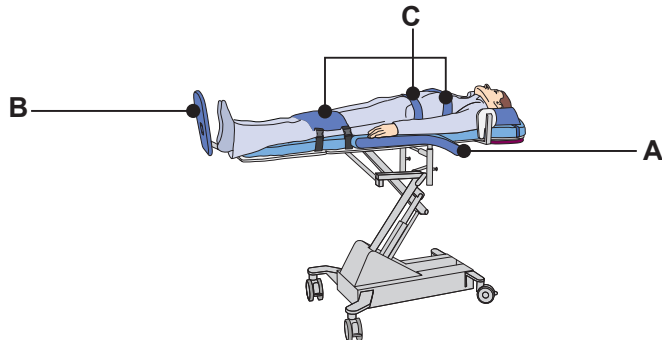


Sett armlenene i horisontal stilling (A).
Juster fotstøtten (B) bort fra pasientens føtter.
Løsne og brett unna alle sikkerhetsbelter (C)
på den siden som vender mot sengen.

3

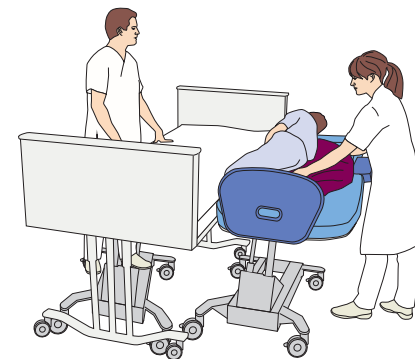

Legg et sklihjelpemiddel under pasienten.

4

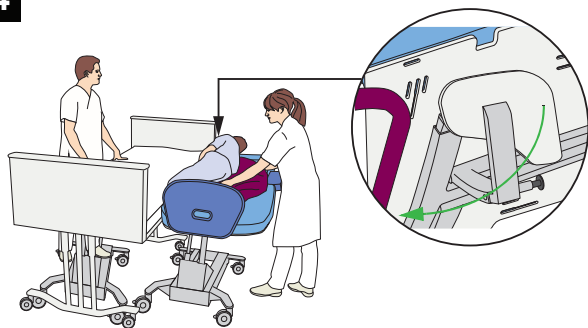


Fell ned skulderstøtten (B) på sengesiden
på Sara Combilizer.

5




Ikke hev eller senk
annet utstyr

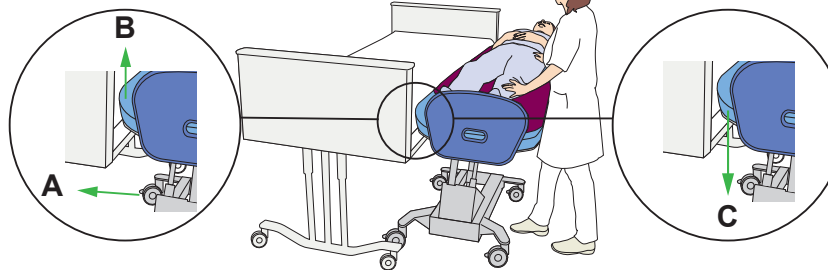

Plasser Sara Combilizer ved sengen (A).
Juster høyden på Sara Combilizer til 5 cm (2 tommer) høyere
enn sengen (B).
Senk Sara Combilizer over sengen for jevn forflytning (C).

6

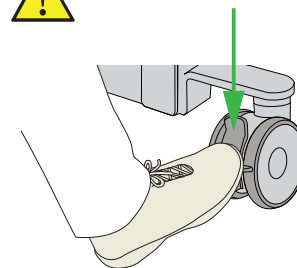

Sett på bremsene på
Sara Combilizer.


Fortsett med trinnene på neste side.

Til sengen forts.

7




Det trengs to eller flere pleiere. Hold øye med pasientens hode og føtter.

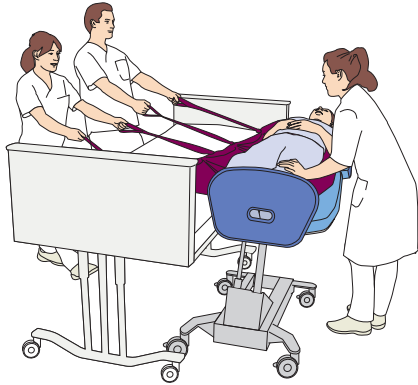

Plasser én pleier på siden av Sara Combilizer og én på motsatt side av sengen pasienten skal flyttes til. Flytt pasienten med sklihjelpemiddelet til sengen, uten å slå pasientens hode eller føtter.

8

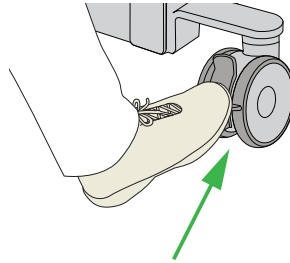


Løsne bremsene og flytt Sara Combilizer bort fra sengen.

9




Fjern sklihjelpemiddelet
Lås sidestøtten

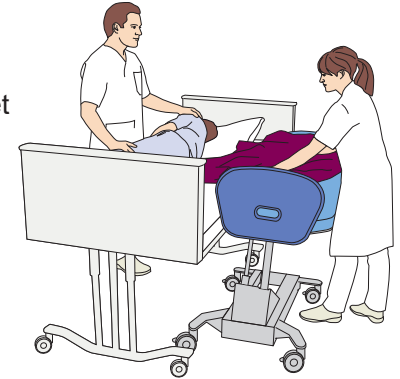

Fjern sklihjelpemiddelet under pasienten. Fjern krøller eller ujevnheter på madrassen eller pasientens klær for å hindre trykk og ubehag. Trekk opp sengegjerdet, hvis montert.

Fra sittende til stående stilling

1

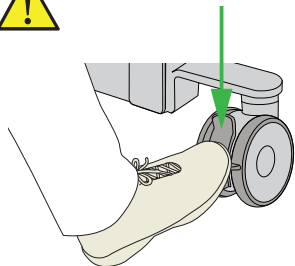

Gjør hjelpemiddelet klart og plasser det i nærheten. Sett på bremsene på Sara Combilizer.

2



Sett Sara Combilizer i oppreist og laveste stolposisjon.

3




Fell ned skulderstøtten og fjern armlenene på forflytningssiden.
Løsne alle sikkerhetsbelter.
Roter pasienten forsiktig til forflytningssiden.

4




Vipp Sara Combilizer forsiktig mot forflytningssiden slik at pasientens føtter når gulvet.

5

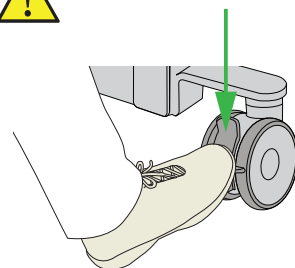

Sett et hjelpemiddel foran pasienten.
Sett på bremsene på hjelpemiddelet.


6

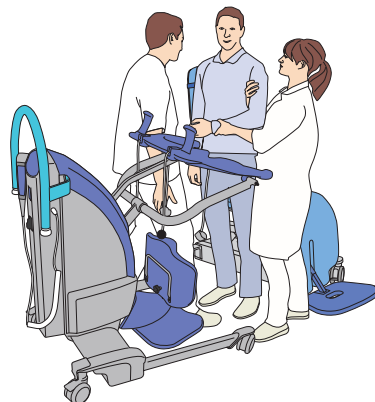

Hjelp pasienten til å komme opp i stående stilling.
Støtt og veiled pasienten mot hjelpemiddelet.

Fra stående til sittende stilling

1

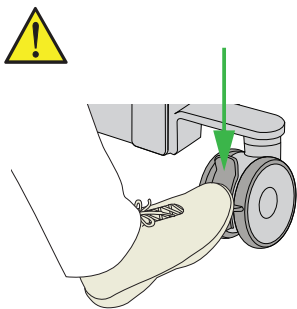


Gjør hjelpemiddelet klart og plasser det i nærheten. Sett på bremsene på Sara Combilizer.

2




Sett Sara Combilizer i oppreist og laveste stolposisjon.

3

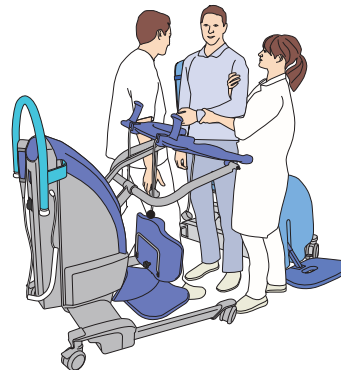

Fell ned skulderstøtten og fjern armlenene på forflytningssiden. Flytt pasienten med hjelpemiddelet inntil Sara Combilizer.

4

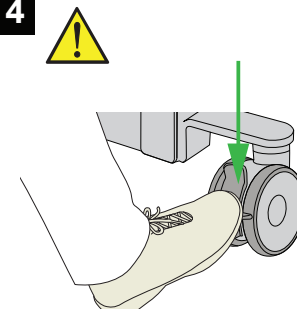

Sett på bremsene på hjelpemiddelet.

5



Juster Sara Combilizer til pasientens sittehøyde. Vipp Sara Combilizer litt mot forflytningssiden. Støtt pasienten under bevegelsen til sittende stilling.

6



Vipp Sara Combilizer til horisontal stolposisjon. Støtt pasienten.

7



Roter pasienten til forovervendt sittestilling. Løft opp pasientens føtter og plasser dem på fotstøtten.

8



Fest og juster nødvendige sikkerhetsbelter. Fest armlenet og juster bredden og høyden. Fell opp skulderstøtten og juster bredden.