


Sara Combilizer

Из кровати



1

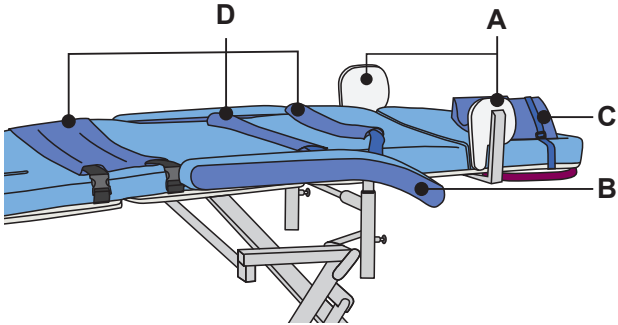

Установите Sara Combilizer в горизонтальное положение. Опустите опоры для плеч (A).
Переведите подлокотники в горизонтальное положение на уровне матраса (B).
Снимите подушку (C).
Уберите ремни безопасности (D).

2



Задействуйте тормоза кровати.

3




С каждой стороны кровати должно находиться одно лицо, осуществляющее уход.
Опустите ограждение кровати на стороне перемещения пациента.
Подложите под пациента скользящую простыню.
Подложите под голову пациента подушку.

4



Расположите Sara Combilizer рядом с кроватью.
Расположите пациента так, чтобы его бедра находились напротив зазора между опорной пластиной для спины и тазовой секцией.

5

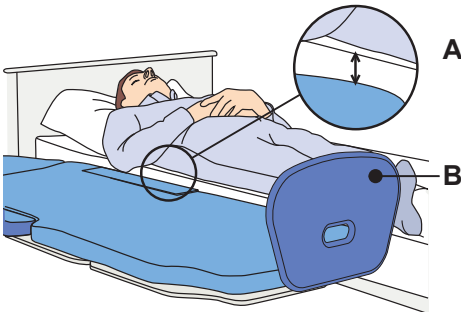

Не поднимайте и не опускайте другое оборудование

Установите Sara Combilizer на уровень на 2–5 см (1–2 дюйма) (A) ниже кровати.
Отрегулируйте положение опоры для стоп (B) так, чтобы не допустить удара ног пациента при перемещении.

6



Задействуйте тормоза Sara Combilizer.


Продолжение на следующей странице

Из кровати (продолжение)

7



Необходимо двое или более лиц, осуществляющих уход. Следите за головой и стопами пациента.

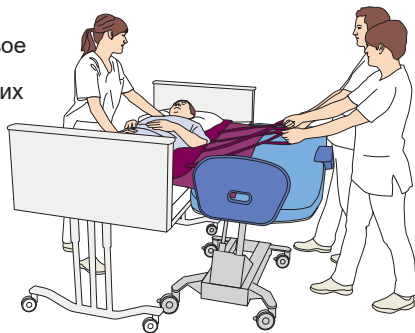


Переместите пациента на Sara Combilizer.

8



Разместите пациента правильно.

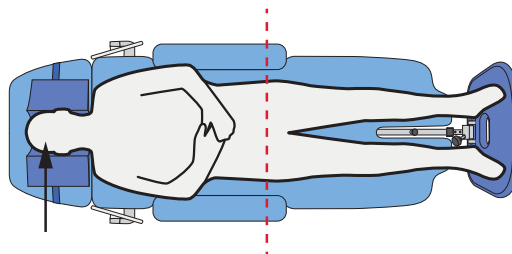


Уложите голову пациента. Расположите пациента так, чтобы его бедра находились напротив зазора между опорной пластиной для спины и тазовой секцией.

9



Закрепите ремни безопасности. Тяжелая пластина опоры для стоп.

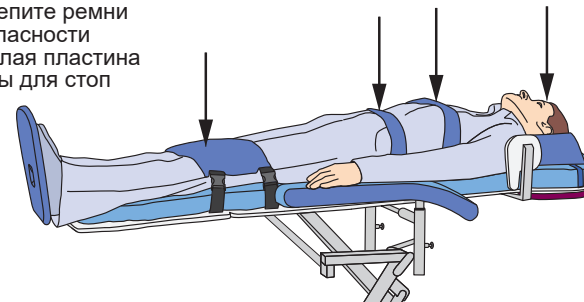


Уберите скользящую простыню. Пристегните пациента ремнями безопасности для фиксации на уровне груди, бедер, колен и головы. Поднимите опоры для плеч и отрегулируйте расстояние между ними так, чтобы пациент чувствовал себя комфортно. Присоедините опору для стоп.

На кровать

1




Задействуйте тормоза
Закрепите боковое ограждение

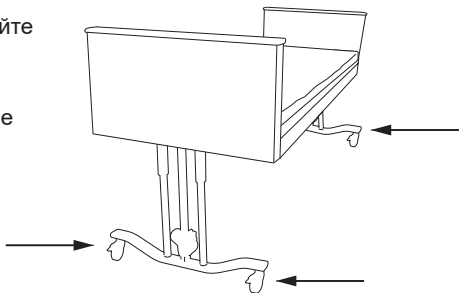


Задействуйте тормоза кровати.
Опустите ограждение кровати, если оно есть, на стороне перемещения пациента.

2

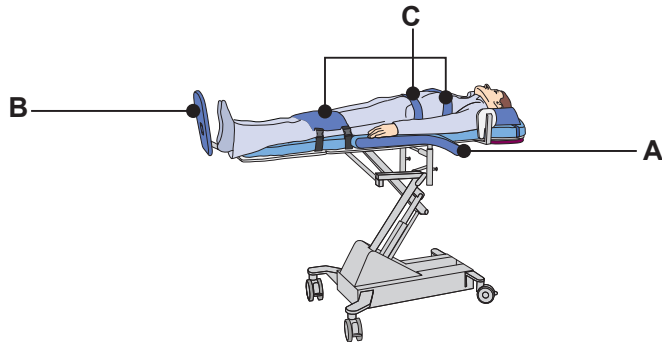


Переведите подлокотники в горизонтальное положение (A).
Отведите опору для стоп (B) от стоп пациента.
Отсоедините и уберите все ремни безопасности (C) на стороне, обращенной к кровати.

3

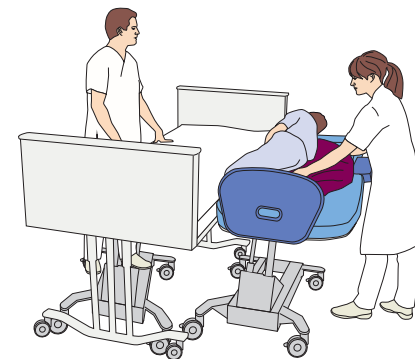

Подложите под пациента скользящую простыню.

4

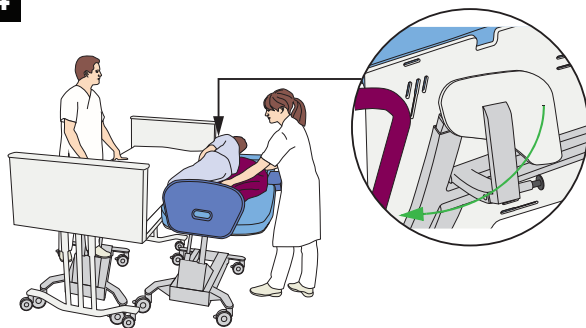


Опустите опору для плеч (B) на стороне Sara Combilizer, обращенной к кровати.

5




Не поднимайте и не опускайте другое оборудование

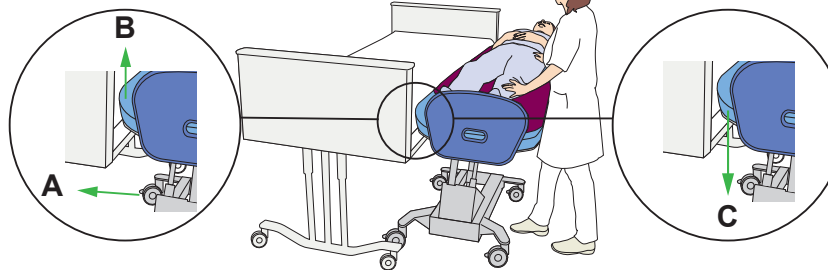

Разместите Sara Combilizer рядом с кроватью (A).
Отрегулируйте Sara Combilizer по высоте на уровень на 5 см (2 дюйма) выше кровати (B).
Опустите Sara Combilizer на кровать для плавного перемещения пациента (C).

6

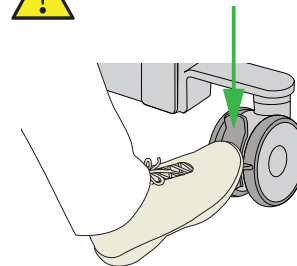

Задействуйте тормоза Sara Combilizer.


Продолжение на следующей странице

На кровать (продолжение)

7




Необходимо двое или более лиц, осуществляющих уход.
Следите за головой и стопами пациента

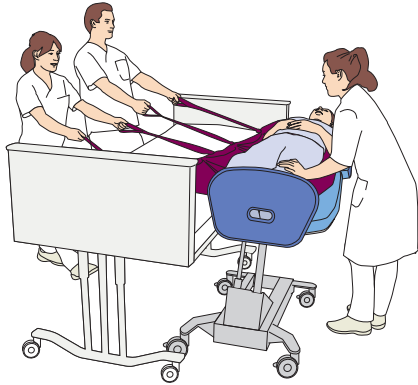

На стороне Sara Combilizer должно находиться лицо, осуществляющее уход. Еще один человек должен находиться с противоположной стороны принимающей кровати. Переместите пациента на кровать с помощью скользящей простыни, следя за тем, чтобы не ударить голову или ноги пациента.

8

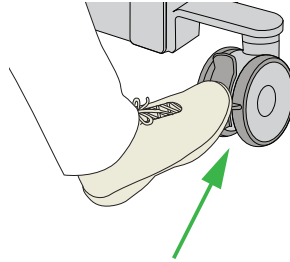


Снимите устройство Sara Combilizer с тормозов и отодвиньте его от кровати.

9




Уберите скользящую простыню.
Закрепите боковое ограждение

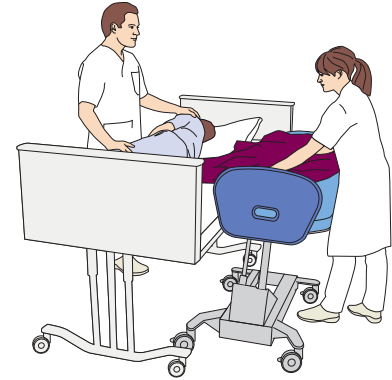

Извлеките скользящую простыню из-под пациента. Расправьте морщины или неровности на матрасе и одежде пациента, чтобы предотвратить надавливание или дискомфорт. Поднимите ограждения кровати, если есть.

Из положения сидя в положение стоя

1 

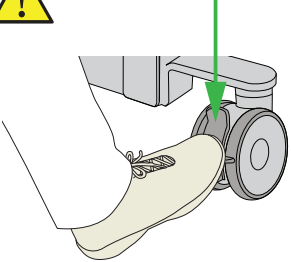

Подготовьте и установите вспомогательное приспособление поблизости. Задействуйте тормоза Sara Combilizer.

2




Установите Sara Combilizer вертикально, а кресло опустите в нижнее положение.

3



Опустите опору для плеч и уберите подлокотники со стороны перемещения пациента. Снимите все ремни безопасности. Осторожно поверните пациента к стороне перемещения.

4



Осторожно наклоните Sara Combilizer в сторону перемещения, чтобы ноги пациента могли коснуться пола.

5 



Поставьте вспомогательное приспособление перед пациентом. Приведите в действие тормоза на вспомогательном приспособлении.

6



Помогите пациенту встать. Поддержите его и проводите к вспомогательному приспособлению.

Из положения стоя в положение сидя

1  

Подготовьте и установите вспомогательное приспособление поблизости. Задействуйте тормоза Sara Combilizer.

2 

Установите Sara Combilizer вертикально, а кресло опустите в нижнее положение.

3 


Опустите опору для плеча и уберите подлокотники со стороны перемещения пациента. Подведите пациента со вспомогательным приспособлением к устройству Sara Combilizer.

4  


Приведите в действие тормоза на вспомогательном приспособлении.

5  

Отрегулируйте Sara Combilizer в соответствии с ростом пациента в сидячем положении. Слегка наклоните Sara Combilizer в сторону перемещения пациента. Поддерживайте пациента при перемещении в сидячее положение.

6 

Наклоните устройство Sara Combilizer в горизонтальное положение кресла. Поддерживайте пациента.

7 

Поверните пациента и помогите ему сесть лицом вперед. Поднимите ноги пациента и поставьте их на опору для стоп.

8 

Закрепите и пристегните необходимые ремни безопасности. Установите подлокотник и отрегулируйте его высоту и расстояние между подлокотниками. Поднимите опоры для плеч и отрегулируйте расстояние между ними.