

Sara Combilizer

Från en säng



1

Placera Sara Combilizer i horisontellt läge. Fäll ned axelstöden (A). Placera armstöden i horisontellt läge i nivå med madrassen (B). Ta bort kudden (C). Vik undan säkerhetsbältena (D).

2

Lås bromsarna på sängen.

3

Se till att en person ur vårdpersonalen står på vardera sida om sängen. Fäll ned sänggrinden på förflyttningssidan. Placera det friktionsminskande hjälpmedlet under patienten. Lägga en kudde under patientens huvud.

4

Placera Sara Combilizer bredvid sängen. Rikta in patientens höft i förhållande till mellanrummet mellan ryggstödsplattan och sitsplattan.

5

Undvik att höja eller sänka annan utrustning

Placera Sara Combilizer så att den är 2–5 cm (1–2 tum) (A) lägre än sängen. Justera fotstödet (B) så att det inte stöter emot patientens fötter under förflyttningen.

6

Lås bromsarna på Sara Combilizer.


Fortsätt med stegen på nästa sida

Från en säng, fortsättning

7



Minst två personer ur vårdpersonalen behövs
Håll ögonen på patientens huvud och fötter

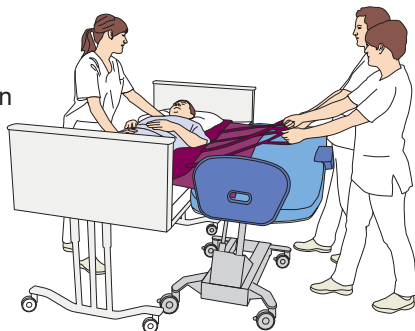


Flytta patient till Sara Combilizer.

8



Placera patienten på rätt sätt

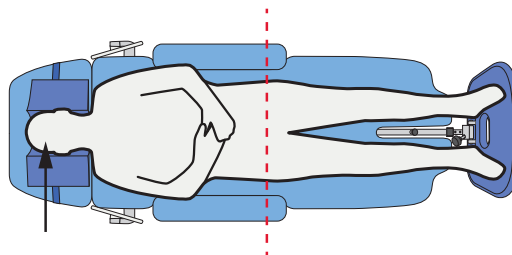


Placera patientens huvud. Rikta in patientens höft i förhållande till mellanrummet mellan ryggstödsplattan och sitsplattan.

9



Spänn fast säkerhetsbältena
Tung fotplatta

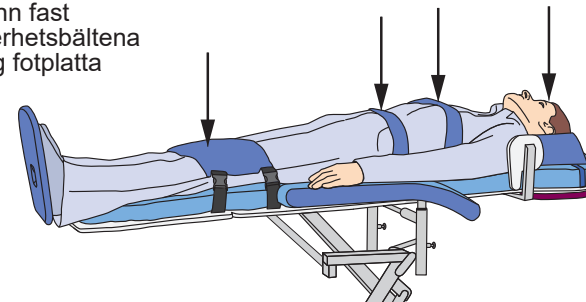


Ta bort det friktionsminskande hjälpmedlet
Fäst patienten med bröst-, höft-, knä- och huvudsäkerhetsbälten.
Fäll upp axelstöden och justera bredden så att de passar patienten.
Fäst fotstödet.

Till en säng

1




Aktivera
bromsarna
Lås
sidogrinden

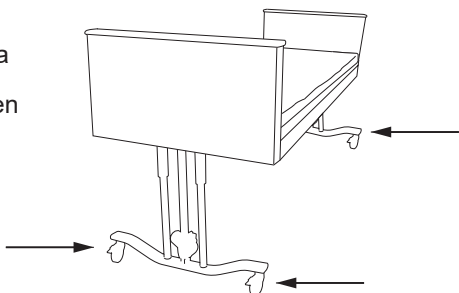


Lås bromsarna på sängen.
Fäll ned eventuell sänggrind på förflyttningssidan.

2

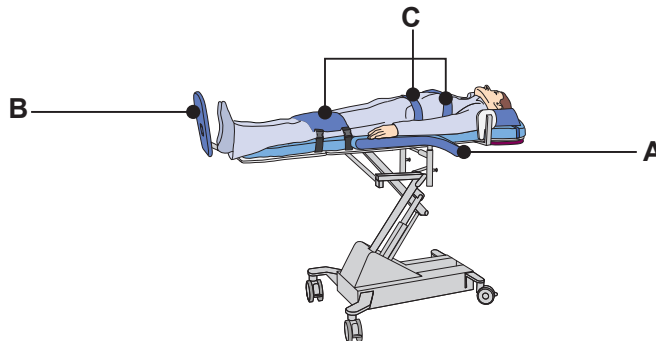


Placera armstöden i horisontellt läge (A).
Justera fotstödet (B) så att det är riktat bort från patientens fötter.
Lossa och vik undan alla säkerhetsbälten (C) på sidan som är närmast sängen.

3

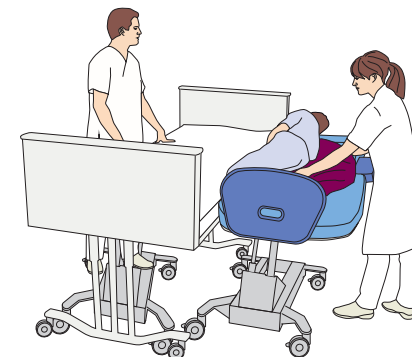

Placera det friktionsminskande hjälpmedlet under patienten.

4

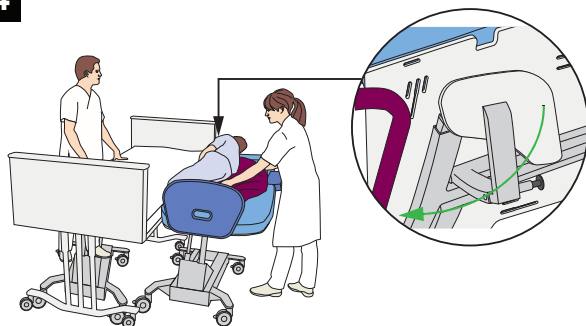


Fäll ned axelstödet (B) på Sara Combilizers sängsida.

5




Undvik att höja eller sänka
annan utrustning

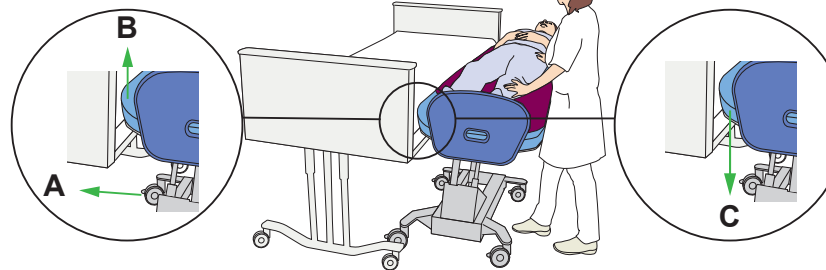

Placera Sara Combilizer nära sängen (A).
Justera höjden på Sara Combilizer till 5 cm (2 tum) ovanför sängen (B).
Sänk ned Sara Combilizer på sängen så att förflyttningen går lätt (C).

6

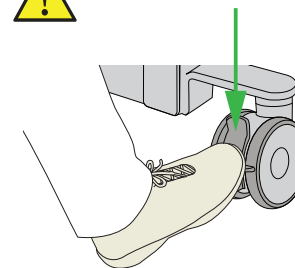

Lås bromsarna på Sara Combilizer.


Fortsätt med stegen på nästa sida

Till en säng, fortsättning

7




Minst två personer ur vårdpersonalen behövs
Håll ögonen på patientens huvud och fötter

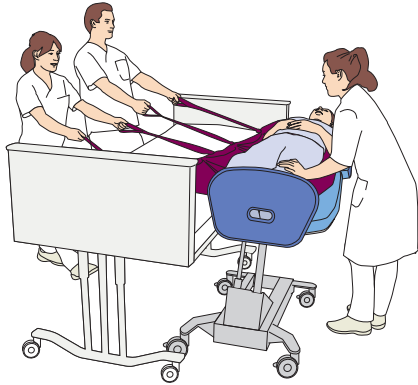

Placera en person ur vårdpersonalen vid sidan av Sara Combilizer och en person ur vårdpersonalen på andra sidan av sängen. Flytta patienten med det friktionsminskande hjälpmedlet till sängen och se till så att patienten inte slår i huvudet eller fötterna.

8

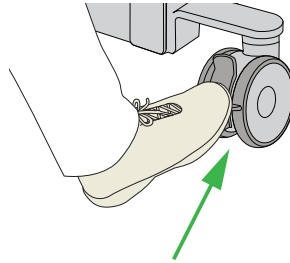


Lossa bromsarna och flytta Sara Combilizer bort från sängen.

9




Ta bort friktionsminskande hjälpmedel
Lås sidogrinden

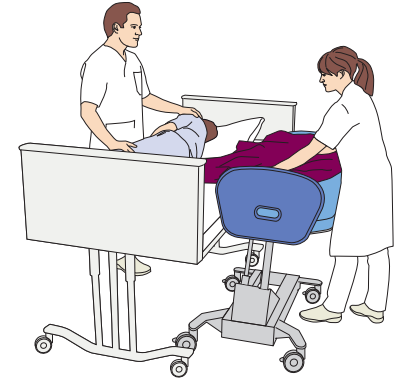

Ta bort det friktionsminskande hjälpmedlet under patienten. Slåta ut skrynlor eller ojämnheter på madrassen eller patientens klädsel för att förebygga tryck eller obehag. Fäll upp eventuella sänggrindar.

Från sittande till stående position

1

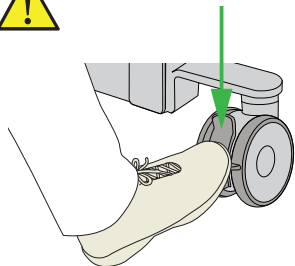

Förbered och placera hjälpmedlet i närheten. Lås bromsarna på Sara Combilizer.

2



Placera Sara Combilizer i upprätt position och lägsta stolposition.

3




Fäll ned axelstödet och ta bort armstöden på förflyttningssidan. Lossa alla säkerhetsbälten. Vänd försiktigt patienten till förflyttningssidan.

4




Tippa försiktigt Sara Combilizer mot förflyttningssidan så att patientens fötter når golvet.

5

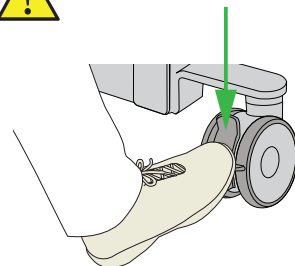

Placera hjälpmedlet framför patienten. Lås bromsarna på hjälpmedlet.


6

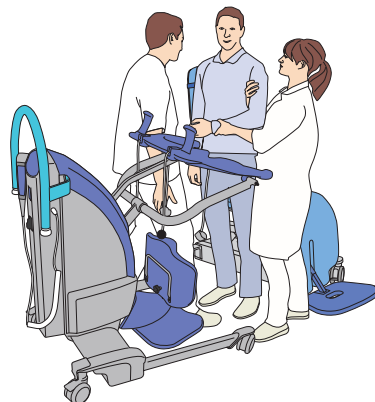

Hjälプ patienten att resa sig till stående position. Stötta och led patienten mot hjälpmedlet.

Från stående till sittande position

1

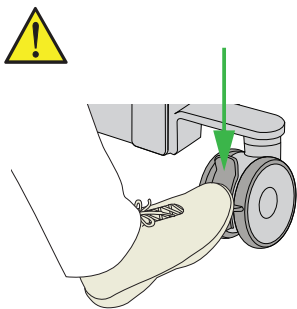


Förbered och placera hjälpmedlet i närheten. Lås bromsarna på Sara Combilizer.

2




Placera Sara Combilizer i upprätt position och lägsta stolposition.

3

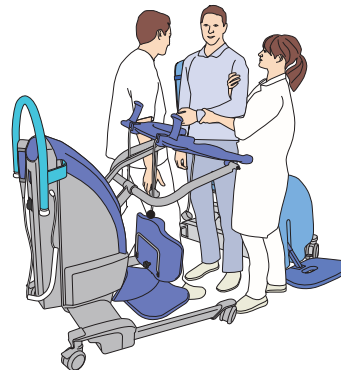

Fäll ned axelstödet och ta bort armstöden på förflyttningssidan. Använd hjälpmedlet och flytta patienten nära Sara Combilizer.

4

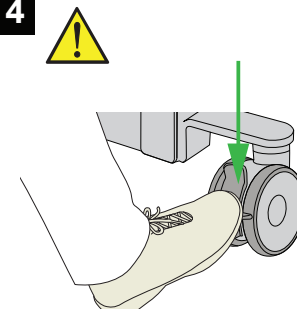

Lås bromsarna på hjälpmedlet.

5



Justera Sara Combilizer till patientens sitthöjd. Tippa Sara Combilizer lite grann mot förflyttningssidan. Stötta patienten under förflyttningen till sittande position.

6



Tippa Sara Combilizer till en horisontal stolposition. Stötta patienten.

7



Vänd patienten så att ansiktet är riktat framåt i sittande position. Lyft upp patientens fötter och placera dem på fotstödet.

8



Spänn fast och ställ in nödvändiga säkerhetsbältena. Fäst armstödet och justera bredden och höjden. Fäll upp axelstödet och justera bredden.