

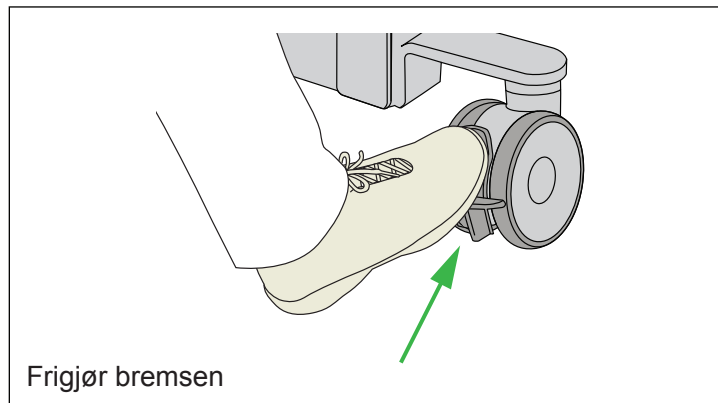
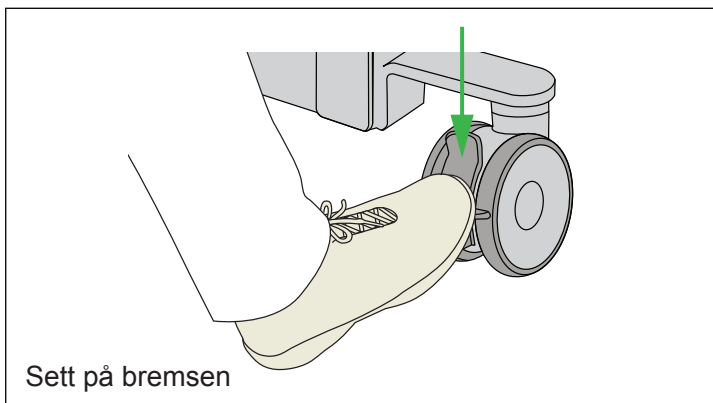



## Sette på og frigjøre bremsen

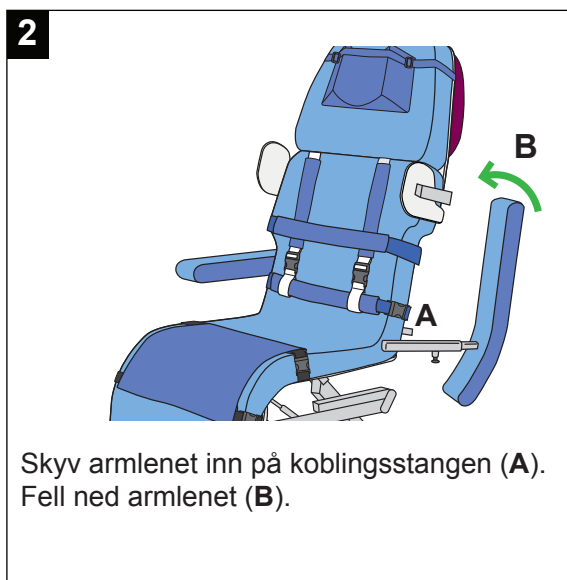



## Feste armlenet

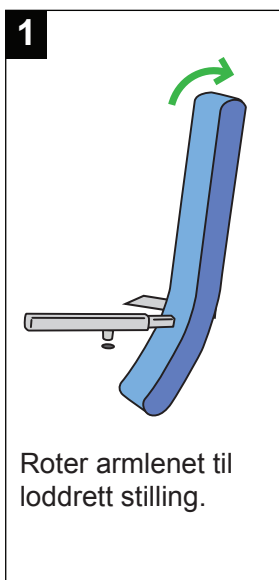



## Justere armlenehøyden

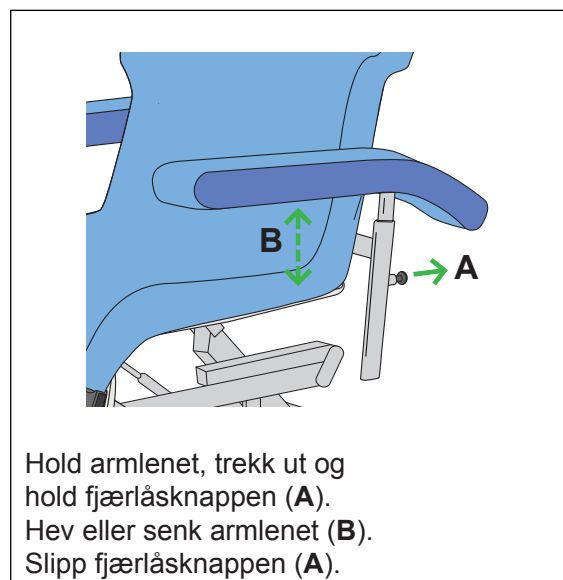


## Justere armlenebredden

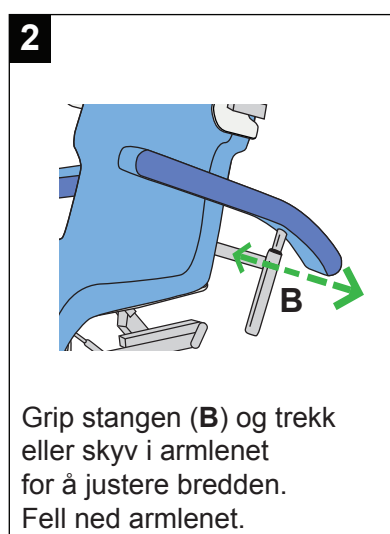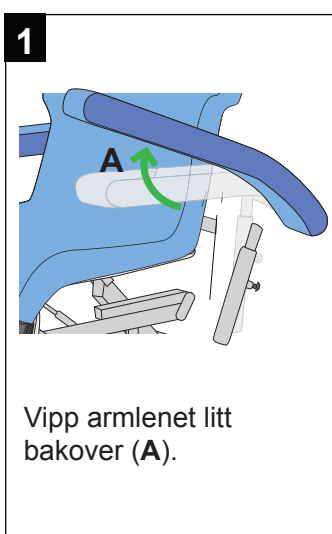

## Fjerne armlenet

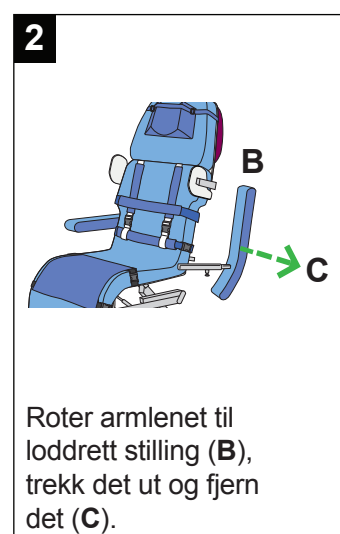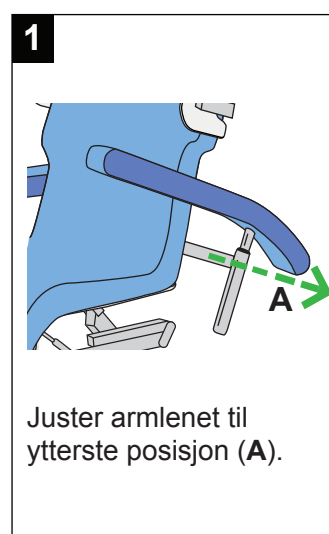


## Justere fotstøttens lengde

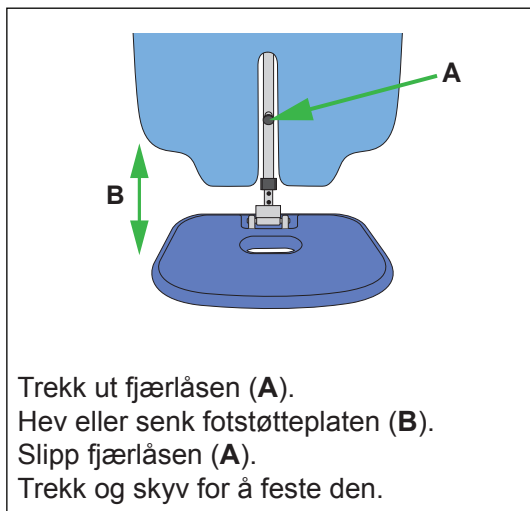


Trekk ut fjærlåsen (A).  
Hev eller senk fotstøtteplaten (B).  
Slipp fjærlåsen (A).  
Trekk og skyv for å feste den.

## Justere fotstøttens lengde ytterligere

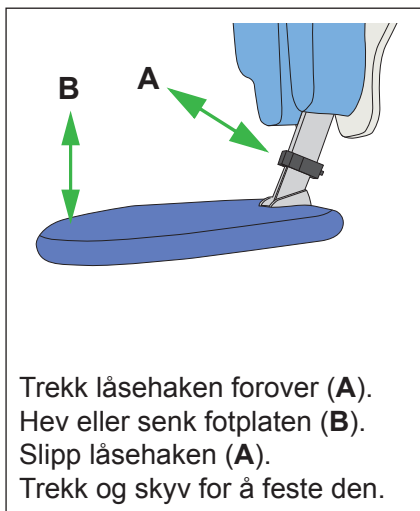


Trekk låsehaken forover (A).  
Hev eller senk fotplaten (B).  
Slipp låsehaken (A).  
Trekk og skyv for å feste den.

## Fjerne fotstøtten

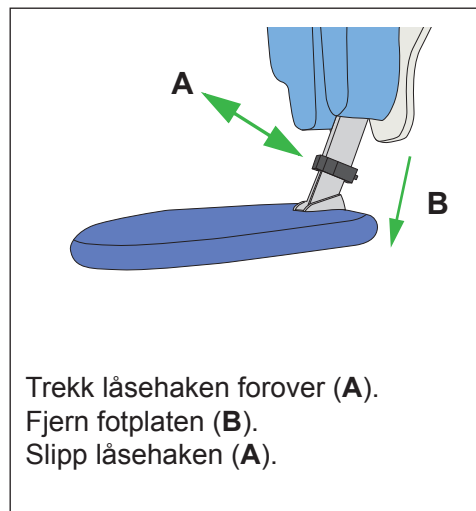


Trekk låsehaken forover (A).  
Fjern fotplaten (B).  
Slipp låsehaken (A).

## Justere skulderstøttens bredde

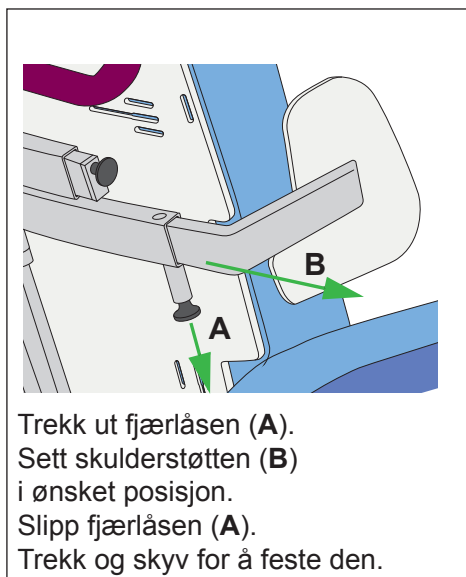

Trekk ut fjærlåsen (A).  
Sett skulderstøtten (B)  
i ønsket posisjon.  
Slipp fjærlåsen (A).  
Trekk og skyv for å feste den.

## Fell ned skulderstøtten

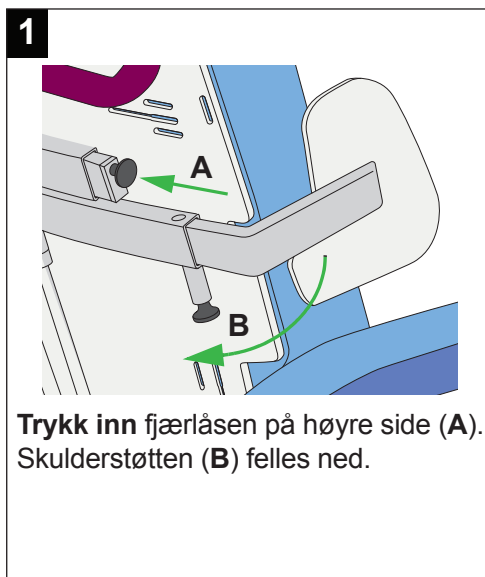

**1**  
Trykk inn fjærlåsen på høyre side (A).  
Skulderstøtten (B) felles ned.




**2**  
Trekk ut fjærlåsen på venstre side (A).  
Skulderstøtten (B) felles ned.

## Felle opp skulderstøtten




Løft opp skulderstøtten til den låses på plass.  
Trekk og skyv for å feste den.

## Batteri

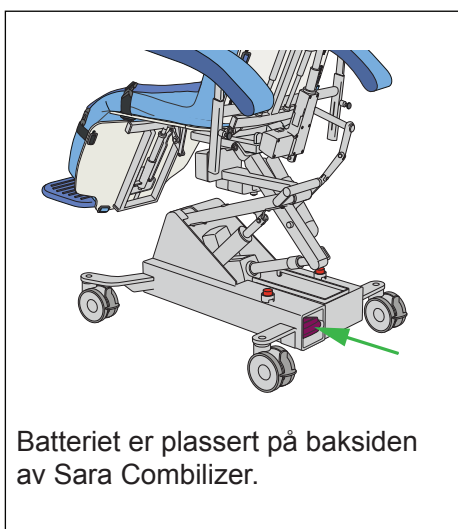


Batteriet er plassert på baksiden av Sara Combilizer.

## Fjerne batteriet

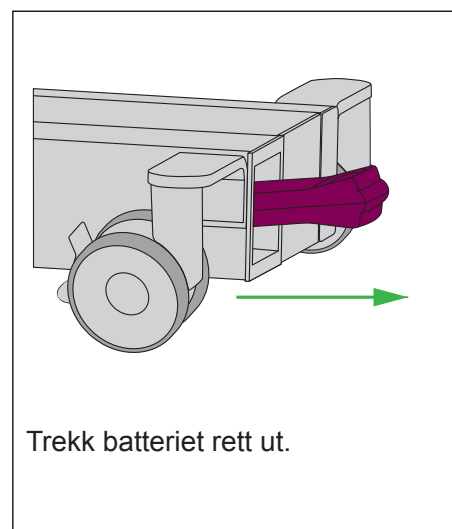


Trekk batteriet rett ut.


## Madrasser

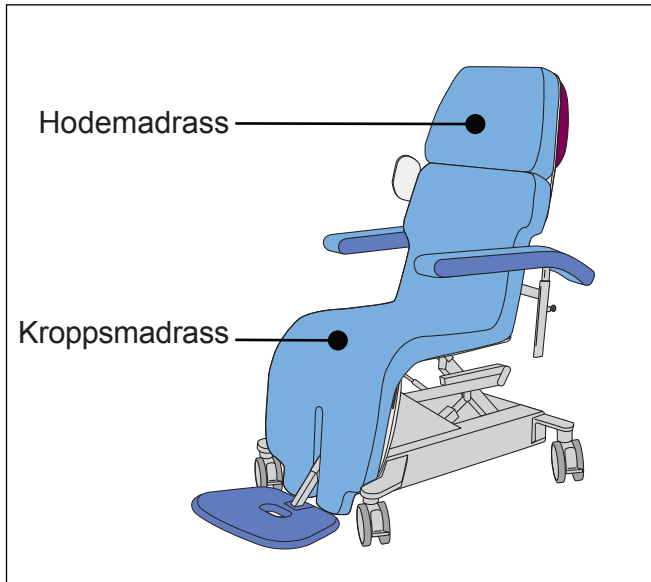


## Madrassfesteremmer

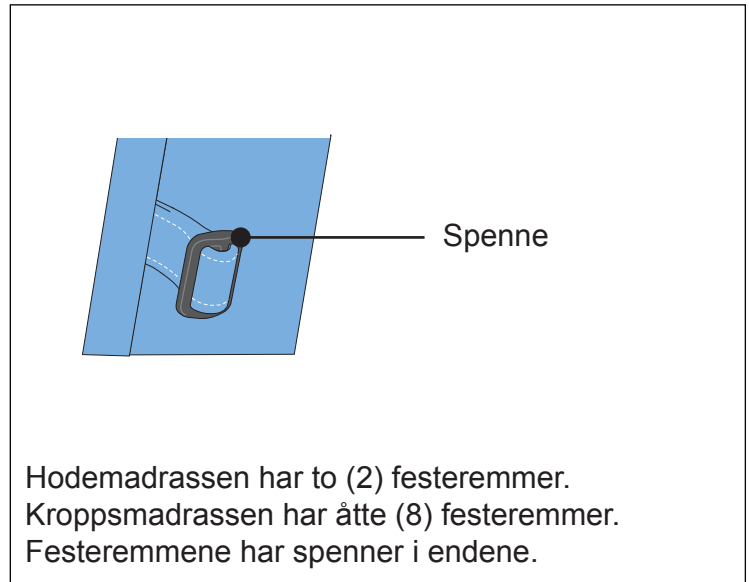

## Madrassfestepunkter

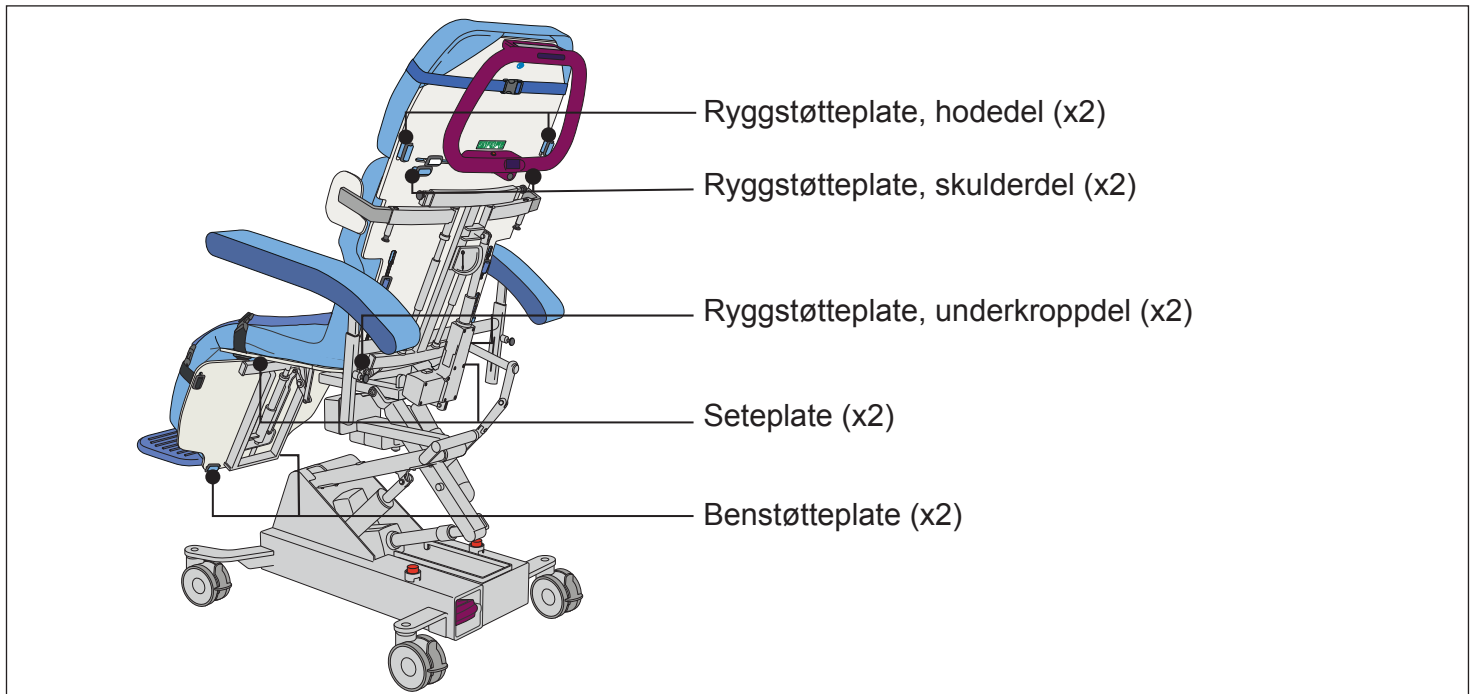

## Feste madrassfesteremmen

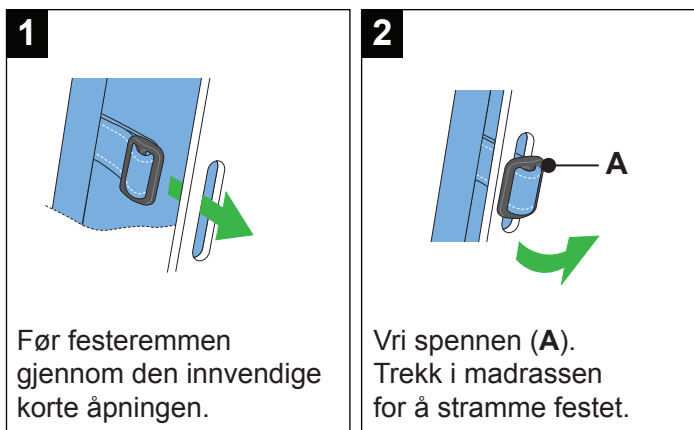

## Fjerne madrassfesteremmen

