



## ADVARSEL



Brug altid beskyttelsesbriller og -handsker for at undgå øjen- og hudskader.

I tilfælde af kontakt skylles med rigeligt vand. I tilfælde af øjen- eller hudirritation søges lægehjælp.

Læs altid brugsvejledningen og sikkerhedsdatabladet til desinfektionsmidlet.

Rengør og desinficer mellem hver plejemodtager.

## Nødvendigt tilbehør

- Beskyttelsesbriller
- Beskyttelseshandsker
- Engangsklude
- Sprayflaske med vand
- Sprøjteflaske med mildt neutralt rengøringsmiddel
- Sprøjteflaske med godkendt desinfektionsmiddel
- Beskyttelsesprop (til håndbetjeningens tilslutning)

## Verificerede rengørings-/desinfektionsmidler

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant (Desinfektionsmiddel til generelle formål)
- Arjo Disinfectant Cleanser IV (Desinfektionsmiddel IV)
- Arjo All Purpose Disinfectant (Universaldesinfektionsmiddel)
- Arjo CenKleen IV
- Alkohol (Isopropanol 70 %)
- Natriumhypochlorit 0,1-0,5 %
- Mildt neutralt rengøringsmiddel

## Rengøring

1. Anbring Sara Combilizer i stoleposition (normal position).
2. Juster stolens højde til en ergonomisk arbejdshøjde.
3. Indsæt enten beskyttelsesproppen eller håndbetjeningsledningen korrekt i tilslutningspunktet på kørehåndtaget.
4. Fjern pude og alle sikkerhedsseler.
5. Fugt en engangsklud med vand, og fjern alle synlige pletter og tilsmudsninger.
6. Sprøjt rengøringsmiddel på alle dele, også på kørehåndtaget, betjeningspanelet og håndbetjeningen.
7. Sprøjt rengøringsmiddel separat på pude og sikkerhedsseler.
8. Fugt en ny engangsklud med vand, og fjern alt rengøringsmiddel.
9. Hvis rengøringsmidlet ikke kan fjernes, skal der sprøjtes vand på, som derefter aftørres med en engangsklud.
10. Gentag, indtil alt rengøringsmiddel er fjernet fuldstændigt.
11. Lad samtlige dele tørre.

## Desinfektion

12. Sprøjt godkendt desinfektionsmiddel på alle dele, også på kørehåndtaget, betjeningspanelet og håndbetjeningen.
13. Sprøjt godkendt desinfektionsmiddel separat på pude og sikkerhedsseler.
14. Lad desinfektionsmidlet sidde på delene i den anbefalede desinfektionstid, som står på flaskens etiket, eller i mindst 2 minutter.
15. Tør alle spor af desinfektionsmiddel af med engangsklude.

