



ADVERTENCIA



Para evitar lesiones oculares y cutáneas, utilice siempre gafas y guantes de protección.

Si se produjese contacto, aclare con abundante agua. Si los ojos o la piel se irritan, póngase en contacto con un médico.

Consulte siempre las instrucciones de uso y la ficha de datos de seguridad de materiales del desinfectante.

Limpie y desinfecte el producto después de cada paciente.

Accesorios necesarios

- Gafas protectoras
- Guantes protectores
- Toallitas desechables
- Pulverizador con agua
- Pulverizador con detergente neutro suave
- Pulverizador con desinfectante aprobado
- Tapón de protección (para la conexión del mando de control)

Detergentes/desinfectantes verificados

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV
- Alcohol (isopropanol 70 %)
- Hipoclorito sódico (0,1-0,5 %)
- Detergente neutro suave

Limpieza

1. Coloque el Sara Combilizer en la posición de silla (mono normal).
2. Ajuste la altura de la silla a una altura de trabajo ergonómica.
3. Inserte correctamente el tapón de protección o el enchufe de conexión del mando de control en el punto de conexión del asa de transporte.
4. Retire la almohada y todas las correas de seguridad.
5. Moje una toallita desechable con agua y quite la suciedad y las manchas visibles.
6. Pulverice el detergente sobre todos los componentes, incluida el asa de transporte, el panel de control y el mando de control.
7. Pulverice el detergente sobre la almohada y las correas de seguridad por separado.
8. Moje otra toallita desechable con agua y elimine todo el detergente.
9. Si el detergente ofrece resistencia, pulverice con agua la zona y séquela con una toallita desechable.
10. Repita la operación hasta eliminar todo el detergente.
11. Deje que todas las piezas se sequen.

Desinfección

12. Pulverice el desinfectante aprobado sobre todos los componentes, incluida el asa de transporte, el panel de control y el mando de control.
13. Pulverice el desinfectante aprobado sobre la almohada y las correas de seguridad por separado.
14. Deje que el desinfectante actúe en las piezas durante el tiempo de desinfección recomendado en la etiqueta del producto o, como mínimo, durante 2 minutos.
15. Elimine todos los restos de desinfectante con toallitas desechables.

