

Sara Combilizer



AVVERTENZA



Per evitare lesioni agli occhi e alla pelle, utilizzare sempre occhiali e guanti protettivi.

In caso di contatto, sciacquare con abbondante acqua. In caso di irritazione degli occhi o della pelle, rivolgersi a un medico.

Consultare sempre le Istruzioni per l'uso e la scheda dati di sicurezza del disinfettante.

Pulire e disinfettare prima di utilizzare con un nuovo paziente.

Accessori necessari

- Occhiali protettivi
- Guanti protettivi
- Asciugamani monouso
- Contenitore spray con acqua
- Contenitore spray con detergente neutro non aggressivo
- Contenitore spray con disinfettante approvato
- Tappo di sicurezza (per il collegamento della pulsantiera di controllo)

Detergenti e disinfettanti certificati

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV
- Alcol isopropilico 70%
- Ipoclorito di sodio 0,1-0,5%
- Detergente neutro non aggressivo

Pulizia

1. Sistemare Sara Combilizer nella posizione a sedia (modalità normale).
2. Portare la sedia a un'altezza di lavoro ergonomica.
3. Inserire correttamente il tappo di sicurezza o la spina della pulsantiera di controllo nel punto di collegamento sull'impugnatura di trasporto.
4. Rimuovere il cuscino e tutte le cinture di sicurezza.
5. Inumidire con acqua un asciugamano monouso e rimuovere tutte le macchie e lo sporco visibili.
6. Spruzzare il detergente su tutti i componenti, tra cui l'impugnatura di trasporto, il pannello di controllo e la pulsantiera di controllo.
7. Spruzzare il detergente sul cuscino e sulle cinture di sicurezza separatamente.
8. Inumidire con acqua un nuovo asciugamano monouso e rimuovere tutto il detergente.
9. Se non si riesce a rimuovere il detergente, spruzzare la superficie con acqua e strofinare con un asciugamano monouso.
10. Ripetere fino a rimuovere completamente tutto il detergente.
11. Asciugare tutte le parti.

Disinfezione

12. Spruzzare il disinfettante approvato su tutti i componenti, tra cui l'impugnatura di trasporto, il pannello di controllo e la pulsantiera di controllo.
13. Spruzzare il disinfettante approvato sul cuscino e sulle cinture di sicurezza separatamente.
14. Lasciare agire il disinfettante sui componenti secondo i tempi di disinfezione indicati sull'etichetta del flacone o per almeno 2 minuti.
15. Eliminare tutte le tracce di disinfettante con l'aiuto di asciugamani monouso.

