



## 警告



目と皮膚の怪我を防ぐために、保護用めがねと手袋を必ず装着してください。

万一目に入った場合、大量の水で洗い流してください。目や皮膚が炎症を起こしている場合、医師にご相談ください。

消毒剤の取扱説明書と製品安全データシートを必ずお読みください。

次の患者に使用する前に、清掃と消毒を行ってください。

## 必要な付属品

- 保護用めがね
- 保護用手袋
- 使い捨てタオル
- 水入りスプレーボトル
- 中性洗剤入りスプレーボトル
- 認定を受けた消毒剤入りスプレーボトル
- 保護プラグ  
(ハンドコントロール接続用)

## 検証済み洗浄剤/消毒剤

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV
- アルコール(イソプロピルアルコール 70%)
- 次亜塩素酸ナトリウム 0,1-0,5%
- 中性洗剤

## 洗浄

1. Sara Combilizerをチェア姿勢にします(標準モード)。
2. チェアの高さを人間工学に基づいた作業高さに調節します。
3. 保護プラグまたはハンドコントロールコンタクトプラグを、運転ハンドル上の接続ポイントに正しく挿入してください。
4. ピローとすべての安全ベルトを取り外します。
5. 使い捨てタオルを水に濡らし、目に見えるしみや汚れを除去します。
6. すべての部品(搬送ハンドル、コントロールパネル及びハンドコントロールを含む)に洗浄剤をスプレーします。
7. ピローと安全ベルトに洗浄剤を別々にスプレーします。
8. 水に濡らした新しい使い捨てタオルで、残っている消毒液を完全に拭き取ります。
9. 洗浄剤を除去できない部分がある場合、水をスプレーして、使い捨てタオルで拭いてください。
10. 洗浄剤がすべて除去されるまで、繰り返し行います。
11. すべての部品を乾燥させます。

## 消毒

12. すべての部品(搬送ハンドル、コントロールパネル及びハンドコントロールを含む)に、認定を受けた消毒薬をスプレーします。
13. ピローと安全ベルトに、認定を受けた消毒薬を別々にスプレーします。
14. ボトルのラベルに記載されている推奨消毒時間に従って、あるいは最低2分間、消毒薬を各部品に付着させたままにします。
15. 使い捨てタオルを使用して、残っている消毒薬をすべて拭き取ります。

