

Sara Combilizer



WAARSCHUWING



Gebruik altijd een beschermende bril en handschoenen om oog- en huidletsel te voorkomen.

Bij contact spoelen met veel water. Als ogen of huid geïrriteerd raken, contact opnemen met een arts.

Lees altijd de gebruiksaanwijzing en het veiligheidsinformatieblad voor het betreffende desinfectiemiddel.

Reinig en desinfecteer vóór elke nieuwe zorgvrager.

Benodigde accessoires

- Veiligheidsbril
- Beschermende handschoenen
- Wegwerphanddoeken
- Spuitflacon met water
- Spuitflacon met een zacht, neutraal reinigingsmiddel
- Spuitflacon met goedgekeurd desinfectiemiddel
- Beschermingsdop (voor aansluiting van de afstandsbediening)

Goedgekeurde reinigings-/desinfectiemiddelen

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV
- Alcohol (isopropanol 70%)
- Natriumhypochloriet 0,1-0,5%
- Zacht, neutraal reinigingsmiddel

Reinigen

1. Plaats de Sara Combilizer in de stoelpositie (normale modus).
2. Stel de hoogte van de stoel af voor een ergonomische werkhoogte.
3. Sluit de beschermdop of de aansluitstekker van de afstandsbediening correct aan op het aansluitpunt op de rijhandgreep.
4. Verwijder het kussen en alle veiligheidsriemen.
5. Maak een wegwerphanddoek nat met water en verwijder zichtbare vlekken en zichtbaar vuil.
6. Sproei reinigingsmiddel op alle delen, waaronder de handgreep, het bedieningspaneel en de afstandsbediening.
7. Spuit reinigingsmiddel op het kussen en ook op de veiligheidsriemen.
8. Maak een nieuwe wegwerphanddoek nat met water en verwijder al het reinigingsmiddel.
9. Als het reinigingsmiddel niet kan worden verwijderd, moet u water sproeien en dit afnemen met een wegwerphanddoek.
10. Herhaal dit totdat al het reinigingsmiddel is verwijderd.
11. Laat alle onderdelen drogen.

Desinfectie

12. Sproei goedgekeurd desinfectiemiddel op alle delen, waaronder de handgreep, het bedieningspaneel en de afstandsbediening.
13. Spuit goedgekeurd desinfectiemiddel op het kussen en ook op de veiligheidsriemen.
14. Laat het desinfectiemiddel inwerken op de onderdelen overeenkomstig de aanbevolen desinfectietijd op het etiket van de flacon of minstens 2 minuten.
15. Veeg alle sporen van het desinfectiemiddel af met wegwerphanddoeken.