

# Sara Combilizer



## ADVARSEL



Bruk alltid vernebriller og hansker for å unngå øye- og hudskader.

Skyll rikelig med vann hvis kontakt forekommer. Kontakt lege hvis øynene eller huden blir irritert.

Les alltid bruksanvisningen og materialsikkerhetsdatabladet for desinfeksjonsmiddelet.

Rengjør og desinfiser mellom pasienter.

### Nødvendig tilbehør

- Vernebriller
- Vernehansker
- Engangskluter
- Sprayflaske med vann
- Sprayflaske med mildt, nøytralt vaskemiddel
- Sprayflaske med godkjent desinfeksjonsmiddel
- Beskyttelsesplugg (for kontakten til håndkontrollen)

### Godkjente vaskemidler/desinfeksjonsmidler

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV
- Alkohol (Isopropanol 70 %)
- Natriumhypokloritt 0,1–0,5 %
- Mildt, nøytralt vaskemiddel

## Rengjøring

1. Sett Sara Combilizer i stolposisjon (normal modus).
2. Juster stolens høyde til ergonomisk arbeidshøyde.
3. Sett enten beskyttelsespluggen eller kontakten til håndkontrollen riktig inn i koblingen på transporthåndtaket.
4. Fjern puten og alle sikkerhetsbelter.
5. Fukt en engangsklut med vann, og fjern synlige flekker og smuss.
6. Spray vaskemiddel på alle deler, inkludert transporthåndtaket, kontrollpanelet og håndkontrollen.
7. Spray vaskemiddel på puten og sikkerhetsbeltet hver for seg.
8. Fukt en ny engangsklut med vann, og fjern alt vaskemiddel.
9. Hvis vaskemiddelet ikke kan fjernes, sprayer du med vann og tørker av med en engangsklut.
10. Gjenta til alt vaskemiddel er fjernet.
11. La alle deler tørke.

## Desinfisering

12. Spray godkjent desinfeksjonsmiddel på alle deler, inkludert transporthåndtaket, kontrollpanelet og håndkontrollen.
13. Spray godkjent desinfeksjonsmiddel på puten og sikkerhetsbeltet hver for seg.
14. La desinfeksjonsmiddelet være på delene ifølge anbefalt desinfeksjonstid som angitt på flasken, eller i minst 2 minutter.
15. Tørk av alle spor av desinfeksjonsmiddel med engangskluter.

