

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Во избежание повреждений глаз и кожи обязательно используйте защитные очки и перчатки.

При контакте промойте большим количеством воды. При появлении раздражения глаз или кожи обратитесь к врачу.

Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и паспорта безопасности дезинфицирующих средств.

Выполняйте очистку и дезинфекцию изделия перед каждым новым пациентом.

Необходимые принадлежности

- Защитные очки
- Защитные перчатки
- Одноразовые полотенца
- Разбрызгиватель с водой.
- Разбрызгиватель с мягким нейтральным моющим средством
- Разбрызгиватель с разрешенным дезинфицирующим средством
- Защитная заглушка (для разъема под пульт дистанционного управления)

Одобрённые моющие и дезинфицирующие средства

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV
- Алкоголь (изопропанол 70 %)
- Гипохлорит натрия 0,1–0,5 %
- Мягкое нейтральное моющее средство

Очистка

1. Установите устройство Sara Combilizer в положение кресла (нормальный режим).
2. Отрегулируйте высоту устройства для удобного доступа к нему.
3. Правильно вставьте защитную заглушку или штекер пульта дистанционного управления в разъем на ручке для транспортировки.
4. Снимите подушку и все ремни безопасности.
5. Смочите одноразовое полотенце водой и удалите видимые пятна и загрязнения.
6. Нанесите дезинфицирующее средство из разбрызгивателя на все части устройства, включая ручку для транспортировки, панель управления и пульт дистанционного управления.
7. Отдельно нанесите дезинфицирующее средство на подушку и ремни безопасности.
8. Смочите новое одноразовое полотенце водой и полностью удалите дезинфицирующее средство.
9. Если удаление дезинфицирующего средства не представляется возможным, промойте деталь из разбрызгивателя и протрите одноразовыми полотенцами.
10. Повторяйте операцию до полного удаления дезинфицирующего средства.
11. Дайте всем деталям просохнуть.

Дезинфекция

12. Нанесите разрешенное дезинфицирующее средство из разбрызгивателя на все части устройства, включая ручку для транспортировки, панель управления и пульт дистанционного управления.
13. Отдельно нанесите разрешенное дезинфицирующее средство на подушку и ремни безопасности.
14. Оставьте разрешенное дезинфицирующее средство на поверхности частей устройства в соответствии с рекомендуемой продолжительностью дезинфекции, указанной на этикетке средства, или по меньшей мере на 2 минуты.
15. С помощью одноразовых полотенец удалите все остатки дезинфицирующего средства.

