

# Sara Combilizer



## VARNING



Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar för att undvika ögon- och hudskador. Vid kontakt, skölj med rikligt med vatten. Vid irriterade ögon eller irriterad hud, kontakta läkare. Läs alltid igenom bruksanvisningen och säkerhetsdatabladet för desinficeringsmedlet.

Rengör och desinficera mellan varje patient.

### Tillbehör som behövs

- Skyddsglasögon
- Skyddshandskar
- Engångstrasor
- Sprayflaska med vatten
- Sprayflaska med mildt, neutralt rengöringsmedel
- Sprayflaska med godkänt desinficeringsmedel
- Skyddsplugg (för handkontrollens anslutning)

### Godkända rengörings-/desinficeringsmedel

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV
- Alkohol (isopropanol 70 %)
- Natriumhypoklorit 0,1–0,5 %
- Mildt, neutralt rengöringsmedel

## Rengöring

1. Placera Sara Combilizer i stolposition (normalt läge).
2. Ställ in höjden för stolen så att arbetsställningen blir ergonomisk.
3. Anslut skyddspluggen eller handkontrollens kontakt så att den sitter ordentligt fast i uttaget på körhandtaget.
4. Ta bort kudden och samtliga säkerhetsbälten.
5. Fukta en engångstrasa med vatten och ta bort synlig smuts.
6. Spraya rengöringsmedel på samtliga delar, inklusive transporthandtag, manöverpanel och handkontroll.
7. Spraya rengöringsmedel på kudden och säkerhetsbältena separat.
8. Fukta en ny engångstrasa med vatten och avlägsna allt rengöringsmedel.
9. Spraya med vatten och torka av med en engångstrasa om rengöringsmedlet inte kan tas bort.
10. Upprepa tills allt rengöringsmedel har avlägsnats.
11. Låt alla delar torka.

## Desinficering

12. Spraya godkänt desinficeringsmedel på samtliga delar, inklusive transporthandtag, manöverpanel och handkontroll.
13. Spraya godkänt desinficeringsmedel på kudden och säkerhetsbälten separat.
14. Låt desinficeringsmedlet verka enligt rekommenderad desinficeringsstid enligt flaskan eller minst 2 minuter.
15. Torka av alla rester av desinficeringsmedel med engångstrasor.

