


Maxi Twin


Transferencia desde la silla

1

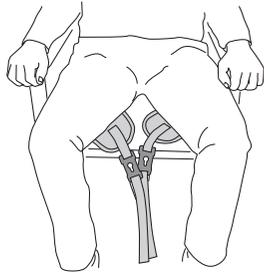

Coloque el arnés alrededor del paciente de manera que cubra la parte inferior de la espalda y que el soporte de la cabeza cubra la zona posterior de la cabeza. Tire de los cabos de las piernas y colóquelos debajo de los muslos.


2

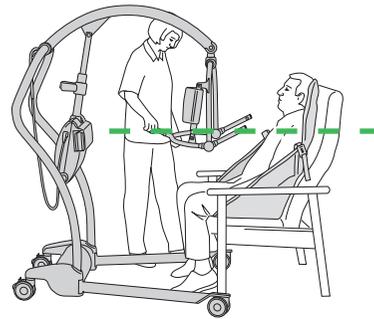


Coloque la grúa delante del paciente. Si fuera necesario, abra las patas del chasis. Ajuste el bastidor a la altura de los hombros.

3

Arnés de bucles

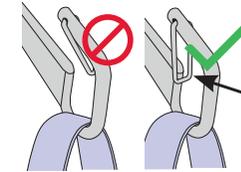


Arnés de clips

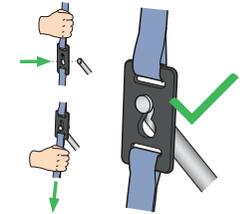

Fije los clips o los bucles de sujeción del arnés en los puntos correspondientes del bastidor.

4

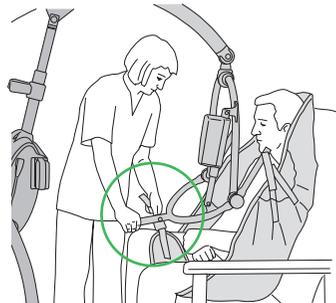

En grúas con bastidor DPS: presione el asidero de posicionamiento del bastidor y fije los clips de las correas de las piernas.

5



Riesgo de caída



Riesgo de atrapamiento

Compruebe que los frenos no están activados y que el arnés está bien asegurado antes de levantar al paciente.




Levante al paciente usando el mando de control y ajuste el asidero de posicionamiento hasta que el paciente quede recostado en el arnés.

Continúe con los pasos que se indican en la página siguiente.

Transferencia desde la silla (continuación)

6

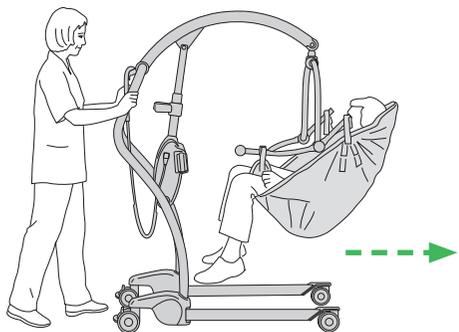


Cierre las patas del chasis y proceda con el traslado del paciente.

7



Baje al paciente y ajuste el asidero de posicionamiento para colocarlo en una posición adecuada.


8

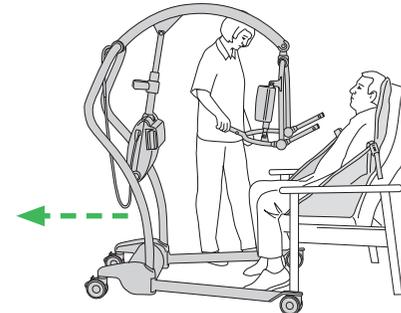

Retire el arnés del bastidor.
Retire la grúa, asegurándose de que los pies y el cuerpo del paciente queden separados de esta.
Retire el arnés del paciente.

Transferencias desde la cama

1

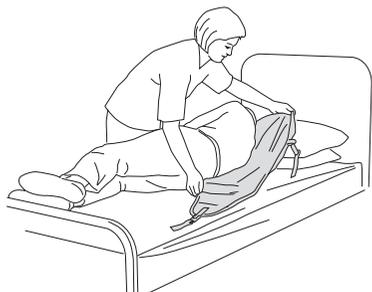


Gire al paciente hacia usted. Pliegue el arnés por la mitad y colóquelo detrás de la espalda del paciente.

2



Coloque el arnés de forma que el paciente quede centrado en este al rodar sobre él.

3

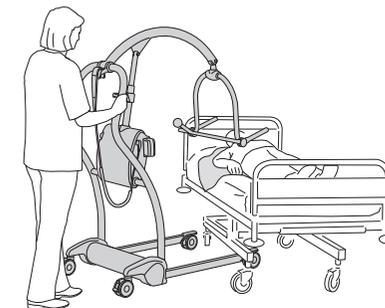


Acérquese a la cama con el lado abierto del bastidor orientado hacia el pecho del paciente.

Continúe con los pasos que se indican en la página siguiente.

Transferencia desde la cama (continuación)


4

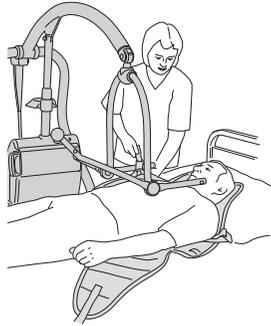

Coloque el bastidor justo encima del paciente. Inclíne el bastidor hasta que las orejetas de sujeción de los hombros se puedan fijar en el arnés.


5

Arnés de bucles

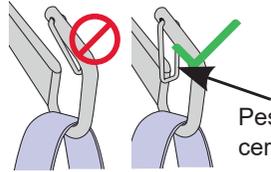

Pestillo cerrado

Arnés de clips

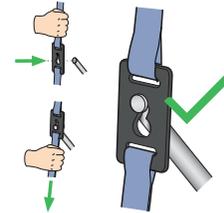

Fije los clips o los bucles de sujeción del arnés en los puntos correspondientes del bastidor.

6



En grúas con bastidor DPS: Las secciones de las piernas se deben colocar por debajo del muslo. presione el asidero de posicionamiento del bastidor y fije los clips de las correas de las piernas.


7



Riesgo de caída




Riesgo de atrapamiento

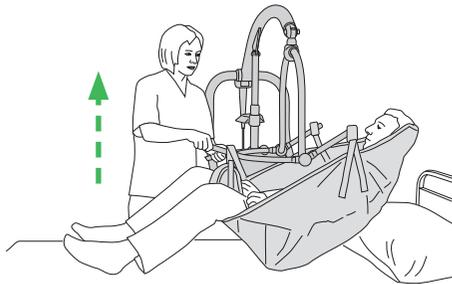

Compruebe que los frenos no están activados y que el arnés está bien asegurado antes de levantar al paciente.


Eleve al paciente usando el mando de control y déjelo en una posición cómoda. Transfiera al paciente.

8

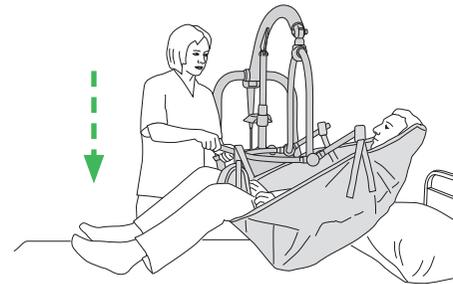

Al regresar a la cama: utilice los asideros de elevación del arnés para colocar al paciente sobre la cama. No tire del arnés. Utilice el mando de control para bajar al paciente.

9

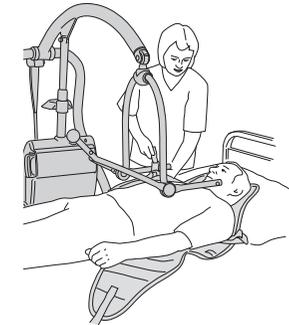

Retire el arnés del bastidor. Retire la grúa, asegurándose de que los pies y el cuerpo del paciente queden separados de esta. Retire el arnés del paciente.

