

Arjos sejlstørrelses- og målesystem tager højde for både plejemodtagerens højde (hvis relevant) og bredde for at bestemme den korrekte sejlstørrelse.

Systemet omfatter størrelsestabeller (med størrelsesfarver), der matcher plejemodtagerens mål med sejlstørrelserne. Tabellerne og instruktionerne er specifikke for de forskellige sejltyper og kan også findes i brugsvejledningen (BVL).

Der findes mange forskellige BVL'er til Arjo-sejl, og i denne vejledning er alle størrelsestabeller og måleinstruktioner samlet i ét dokument for at understøtte det korrekte valg af sejlstørrelsen.

Denne vejledning omhandler kun sejlstørrelser og deres mål og erstatter ikke BVL'en til sejlet.

Se altid brugsvejledningen (BVL'en) ved brug af Arjo-sejl.

Hvordan ved jeg, at jeg har valgt den rigtige størrelse?

Når sejlet er blevet tilpasset plejemodtageren, er der en række nøgleindikatorer, der hjælper med at kontrollere, at den rigtige størrelse er valgt.

Detaljeret vejledning findes i afsnittet "Anvendelse af sejlet" i BVL'en til sejlet.

1. Find sejllets varenummer (f.eks. på produktmærkaten).



2. Find det korrekte størrelsesskema i produktoversigten.
3. Følg anvisningerne i skemaet for at måle plejemodtagerens højde og bredde, og se i skemaet for at finde sejlstørrelsen.

PRODUKTOVERSIGT		
Varenr.	Sejlets navn	Skemanavn
MAA2000M	Sejl med clips – upolstrede ben	”Almindelige passive Clip Slings”, side 4
MAA2040M	In situ sejl med clips – ben uden polstring	
MAA2070M	In situ-badesejl med clips - upolstrede ben	
MAA4000M	Sejl med clips – polstrede ben	
MAA4050M	Komfortsejl med clips – polstrede ben	
MAA4060M	Badesejl med clips – upolstrede ben	
MAA4061M	Badesejl med clips – ben med polstring	
MFA1000M	Engangssejl med clips:	
MAA4031M	Toiletsejl med clips – polstrede ben	
MAA4100M	Sejl med clips – polstrede ben og forlængede ben	
MAA4160M	Badesejl med clips – forlængede ben uden polstring	
MFA2100	Engangsløkkesejl:	”Passivt løkkesejl”, side 6
MLA2000	Løkkesejl – polstrede ben	
MLAAS2000	In situ løkkesejl – polstrede ben	
MLA3000	Løkkesejl – polstrede ben, uden hovedstøtte	
MLA4060	Badesejl med løkker – ben uden polstring	
MLA4031	Toiletsejl med løkker – polstrede ben	
MLA4531	Toiletsejl med løkker – polstrede ben, uden hovedstøtte	
MAA4020M	Sejl med clips til børn	”Pædiatrisejl”, side 7
THA6i	Hængekøjesejl – 6 stropper	”Hængekøjesejl”, side 8
THAi	Hængekøjesejl – 4 stropper	
TIR	Quick fit Løkkesejl – uden hovedstøtte	”TIR-sejl”, side 9
MAA2050M	In situ-amputationssejl med clips	”Amputationssejl med clips til dobbeltamputerede”, side 10
MAA2080M	In situ-amputationssejl med clips til badning	
MAA2090M	Amputationssejl med clips	
MAA2091M	Amputationssejl med clips til toiletbesøg	
MAA4040M	Amputationssejl med clips - "krog- og løkke"-fastgørelse	
MAA7090M	Amputationssejl med clips til badning	

PRODUKTOVERSIGT			
Varenr.	Sejlets navn	Skemanavn	
MAA4070M	Amputationssejl med clips til højrebensamputerede	"Amputationssejl med clips til enkeltbensamputerede", side 11	
MAA4080M	Amputationssejl med clips til venstrebensamputerede		
MLA7000	Hængekøjeamputationssejl med løkker	"Hængekøjesejl til amputerede", side 12	
MAA8000	Bariatrisk komfort-løkkesejl	"Bariatriske sejle", side 13	
MAA8010	Bariatrisk løkkesejl		
MFA8010	Bariatrisk løkkesejl til engangsbrug		
MAA8020	Bariatrisk hængekøje-løkkesejl – opdelte ben		
MAA8030	Bariatrisk hængekøje-løkkesejl		
MAA3071M	Sara ståsejl med clips – fladt		"Stå-, forflytnings- og gåsejl", side 14
MFA3000	Sara Flex ståsejl til engangsbrug		
TSS.500 - 504	Sara Flex ståsejl		
TSS.500S-1C - 503S-1C	Sara Flex ståsejl – separat bælte med ét spænde		
TSS.500W - TSS.503W	Sara Flex aftørringsvenligt ståsejl		
TSS.511	Sara Flex sejl til siddende forflytning		
KKA5120	Sara Plus ståsejl		
KKA5130M	Sara Plus gåsejl		
KKA5370	Sara Plus ståsejl – ekstra holdningsstøtte		
MFA4000	Sara Plus ståsejl til engangsbrug		
KKA6000	Sara Plus aftørringsvenligt ståsejl		
MFA5100	Gangsejl med løkker til engangsbrug	"Gangsejl med løkker", side 15	
MFA5200	Gangsejl med løkker til engangsbrug plus		
MFA5210	Gangsejl med løkker til engangsbrug plus – forlængede ben		
MLA5100	Gangsejl med løkker		
MLA5200	Gangsejl med løkker plus		
MLA5210	Gangsejl med løkker plus – forlængede ben		
MAA1150	Liggesejl med løkker – toiletåbning	"Liggesejl", side 16	
MAA1151	Liggesejl med løkker		
MAA1152	Badeliggesejl med løkker – toiletåbning		
MFA5000	Liggesejl med løkker til engangsbrug		


Almindelige passive Clip Slings

Størrelsesskema


Sejlmodeller

MAA2000M, MAA2040M,
MAA4000M, MAA2070M,
MAA4060M, MAA4031M,
MAA4061M, MFA1000M,
MAA4050M*

Top af hoved til haleben

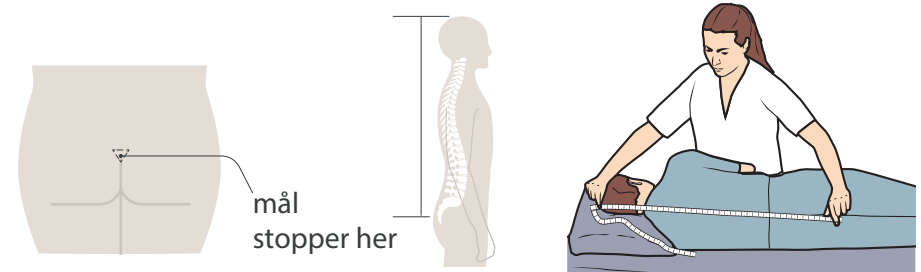

Omkreds af hofter

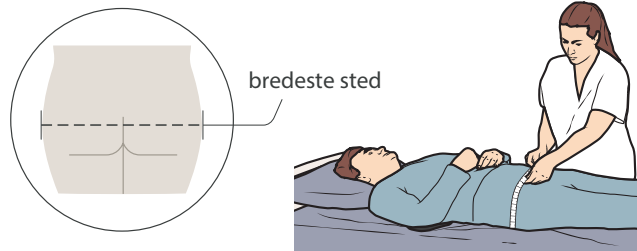

cm (tommer)	60-65 (23,5-25,5)	66-73 (26-29)	74-81 (29-32)	82-89 (32,5-35)	90-95 (35,5-37,5)	96-103 (38-40,5)
70-80 (27,5-31,5)	XS	S	M	L	LL	XL
81-93 (32-36,5)	S	S	M	L	LL	XL
94-106 (37-41,5)	M	M	M	LL	LL	XL
107-125 (42-49)	M	L	L	LL	XL	XL
126-136 (49,5-53,5)	L	LL	LL	LL	XL	XL
137-155 (54-61)	XL	XL	XL	XL	XL	XXL
156-220 (61,5-86,5)*	/	/	XXL	XXL	XXL	XXL

* er begrænset til 200 cm/78,5 tommer


Clip Slings med forlængede ben

Størrelsesskema


Sejlmodeller

MAA4100M, MAA4160M

Top af hoved til haleben

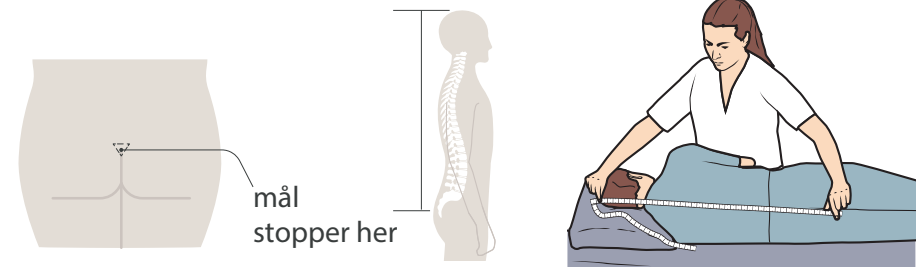

Omkreds af hofter

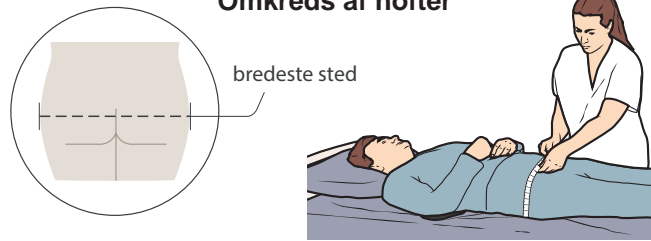

cm (tommer)	60-65 (23,5-25,5)	66-73 (26-29)	74-81 (29-32)	82-89 (32,5-35)	90-95 (35,5-37,5)	96-103 (38-40,5)
87-100 (34-39,5)	S	S	M	L	LL	XL
101-117 (40-46)	M	M	M	LL	LL	XL
118-130 (46,5-51)	M	L	L	LL	XL	XL
131-145 (51,5-57)	L	LL	LL	LL	XL	XL
146-175 (57,5-69)	XL	XL	XL	XL	XL	XXL
176-240 (69,5-97,5)	/	/	XXL	XXL	XXL	XXL


Passivt løkkesejl

Størrelsesskema



Sejlmodeller

MLA2000, MLAAS2000,
MLA4060, MLA4031,
MLA4531, MFA2100,
MLA3000


Top af hoved til haleben

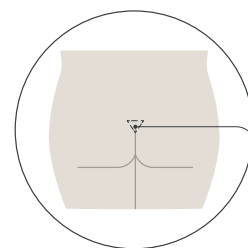

mål stopper her

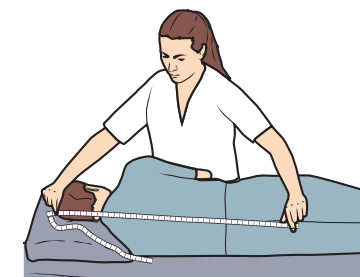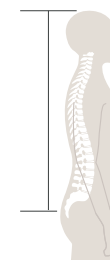

Omkreds af hofter

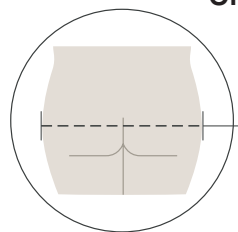


bredeste sted



cm (tommer)	65-71 (25,5-28)	72-79 (28,5-31)	80-85 (31,5-33,5)	86-93 (34-36,5)	94-105 (37-41,5)
79-99 (31-39,5)	S	M	L	L	/
100-116 (40-45,5)	M	M	L	XL	XXL
117-133 (46-52,5)	M	L	L	XL	XXL
134-154 (53-60,5)	L	XL	XL	XL	XXL
155-170 (61-67)	/	XXL	XXL	XXL	XXL

Sejlmodel
MAA4020M

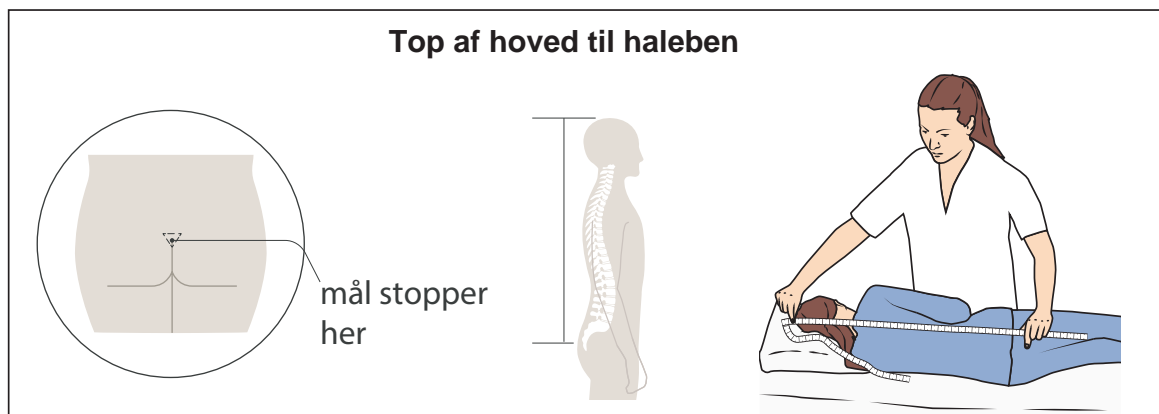


	cm (tommer)	50-54 (19 1/2-21 1/4)	55-59 (21 1/2-23 1/4)	60-65 (23 1/2-25 1/2)	66-73 (25 3/4-28 3/4)
Omkreds af hofter 	50-59 (19 1/2-23 1/4)	XXS	XXS	XXS	XS
	60-69 (23 1/2-27 1/4)	XXS	XXS	XS	XS
	70-80 (27 1/2-31 1/2)	XXS	XXS	XS	S
	81-100 (31 3/4-39 1/2)	XXS	XS	S	S



Sejlmodeller

THA6i, THAi


Top af hoved til haleben

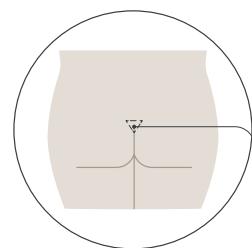

mål stopper her

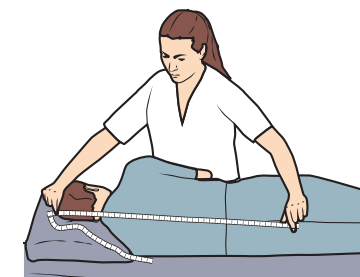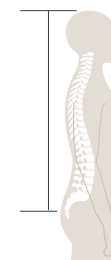

Omkreds af hofter

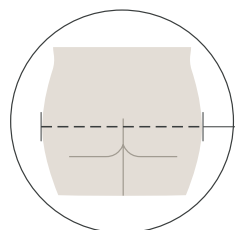

bredeste sted




cm (tommer)	40-45 16-17,5)	46-52 (18-20,5)	53-66 (21-26)	67-81 (26,5-32)	82-90 (32,5-35,5)	91-100 (36-40)
55-70 (21,5-27,5)	XXS	XS	S	M	L	XL
71-80 (28-31,5)	XS	XS	S	M	L	XL
81-99 (37-41,5)	S	S	S	M	L	XL
100-120 (39,5-47)	M	M	M	M	L	XL
121-135 (47,5-53)	L	L	L	L	L	XL
136-155 (53,5-61)	XL	XL	XL	XL	XL	XL

TIR-sejl

Størrelsesskema

Sejlmodel
TIR

Omkreds af hofter		
 <p>The diagram illustrates the correct method for measuring hip circumference. On the right, a person in a white uniform is shown measuring a patient lying on a bed with a blue measuring tape. On the left, a circular inset shows a top-down view of a pair of hips with a dashed horizontal line across the widest part, labeled 'bredeste sted' (widest point).</p>		
cm (tommer)		
85-119 (33,5-47)	120-139 (47-55)	140-166 (55-65,5)
S	M	L


Ambutationssejl med clips til dobbeltambuterede

Størrelsesskema


Sejlmodeller

MAA2050M, MAA2080M,
MAA2090M, MAA2091M,
MAA4040M, MAA7090M

Mål fra top af hoved til haleben

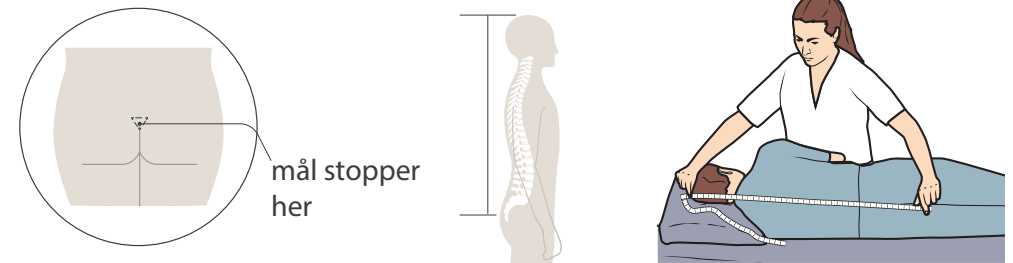

Omkreds af hofter

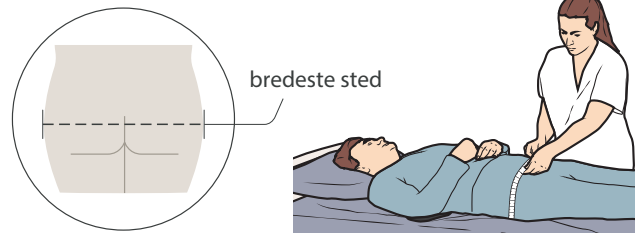

cm (tommer)	60-65 (23,5-25,5)	66-73 (26-29)	74-81 (29-32)	82-89 (32,5-35)	90-95 (35,5-37,5)	96-103 (38-40,5)
70-80 (27,5-31,5)	XS	S	M	L	LL	XL
81-93 (32-36,5)	S	S	M	L	LL	XL
94-106 (37-41,5)	M	M	M	LL	LL	XL
107-125 (42-49)	M	L	L	LL	XL	XL
126-136 (49,5-53,5)	L	LL	LL	LL	XL	XL
137-155 (54-61)	XL	XL	XL	XL	XL	XXL
156-220 (61,5-86,5)	/	/	XXL	XXL	XXL	XXL


Ambutationssejl med clips til enkeltbensambuterede

Størrelsesskema


Sejlmodeller

MAA4070M, MAA4080M


Top af hoved til haleben

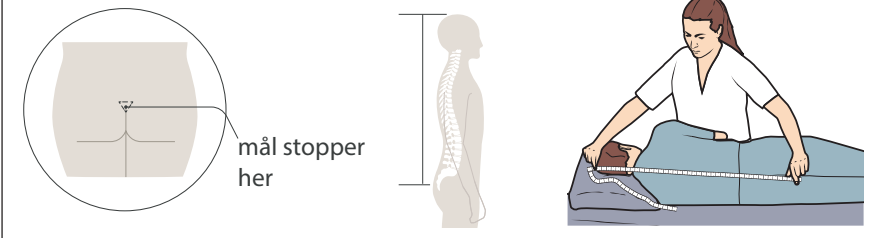

Find kropstype

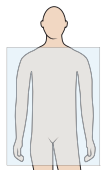


Kropsform rektangulær

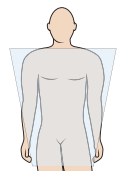

Kropsform omvendt trapez

Eller

Kropsform trapez

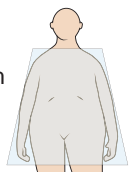

Omkreds af skulder



cm (tommer)	65-70 (25,5-27,5)	71-75 (28-29,5)	76-82 (30-32,5)	83-90 (32,5-35,5)	91-105 (36-41,5)
80-99 (31,5-39)	M	M	M	L	LL
100-114 (39,5-45)	M	M	L	LL	LL
115-130 (45,5-51)	L	L	L	LL	XL
131-149 (51,5-59)	LL	LL	LL	LL	XL
150-170 (59-67)	XL	XL	XL	XL	XL

Omkreds af hofter




cm (tommer)	65-70 (25,5-27,5)	71-75 (28-29,5)	76-82 (30-32,5)	83-90 (32,5-35,5)	91-105 (36-41,5)
80-95 (31,5-37,5)	M	M	M	L	LL
96-112 (38-44)	M	M	L	LL	LL
113-129 (44,5-51)	L	L	L	LL	XL
130-145 (51-57)	LL	LL	LL	LL	XL
146-166 (57,5-65,5)	XL	XL	XL	XL	XL

Hængekøjesejl til amputerede


Størrelsesskema

Sejlmodel
MLA7000

Omkreds af skulder			
			
cm (tommer)			
80-120 (31,5-47)	105-125 (41,5-49)	110-130 (43,5-51)	120-140 (47-55)
S	M	L	XL

Bariatriske sejl


Størrelsesskema

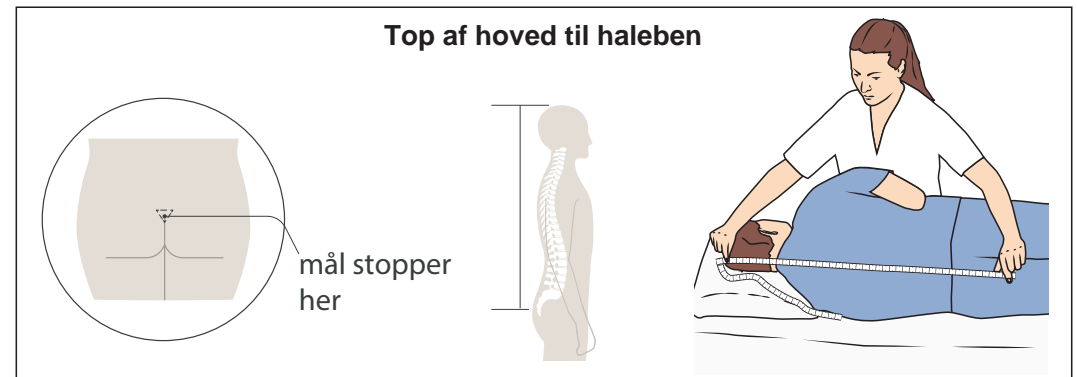

Forholdsregel	Sejlmodeller	cm (tommer)	72-79 (28 3/8-31 1/4)	80-85 (31 1/2-33 1/2)	86-93 (33 3/4-36 3/4)	94-105 (37-41 1/4)	106-115 (41 1/2-45 1/4)	
<p style="text-align: center;">Omkreds af hofter</p>	MAA8000 MAA8010 MFA8010	170-179 (66 7/8-70 1/2)	M	M	M	L	XL	
		180-189 (70 3/4-74 1/2)	M	M	L	XL	XXL	
		190-199 (74 3/4-78 1/2)	M	L	XL	XL	XXL	
		200-209 (78 3/4-82 1/4)	L	XL	XL	XXL	XXL	
		210-219 (82 1/2-86 1/4)	XL	XL	XL	XXL	/	
			cm (tommer)	67-81 (26 3/8-32)	82-90 (32 1/4-35 1/2)	91-100 (35 3/4-39 1/2)	101-110 (39 3/4-43 1/4)	111-120 (43 1/2-47 1/4)
		MAA8020 MAA8030	155-164 (61-64 3/4)	M	L	XL	XL	XXL
	165-179 (65-70 1/2)		L	L	XL	XL	XXL	
	180-194 (70 3/4-76 1/2)		L	L	XL	XL	XXL	
	195-209 (76 3/4-82 1/4)		XL	XL	XL	XXL	XXL	
210-219 (82 1/2-86 1/4)	XL		XL	XXL	XXL	/		

Stå-, forflytnings- og gåsejl

Størrelsesskema

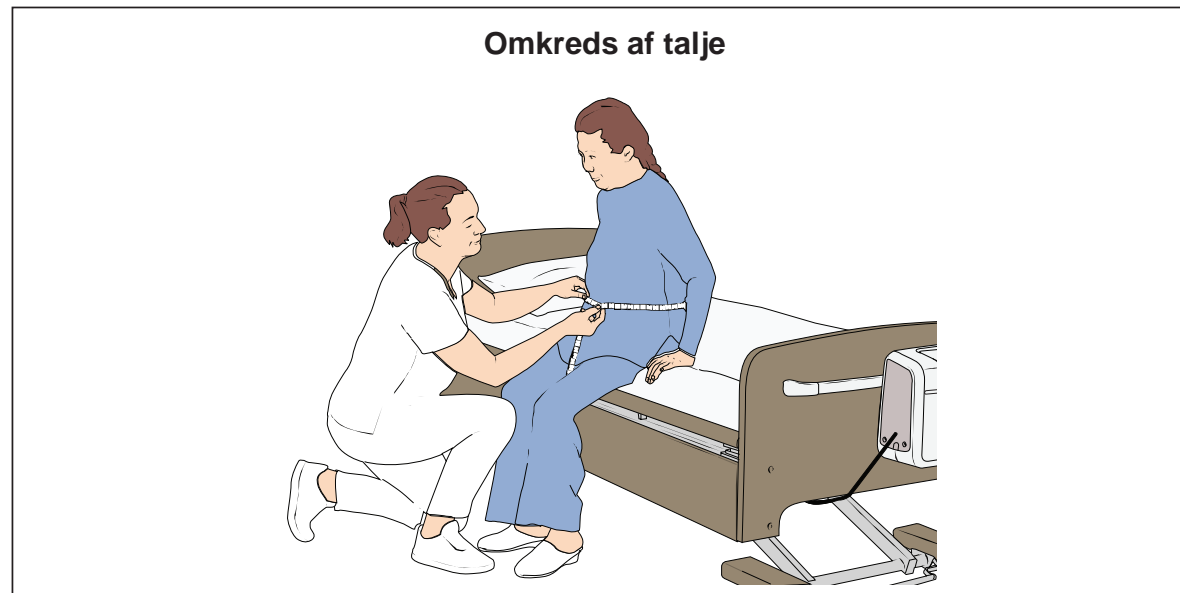

		S	M	L	XL	XXL	One size passer de fleste
		cm (tommer)					
Sejlmodeller	TSS.500-504	69-86 (27-34)	84-113 (33-44,5)	107-156 (42-61,5)	157-184 (62-72,5)	173-201 (68-79)	/
	TSS.500-503S-1C	63-130 (25-51)	89-130 (35-51)	91-133 (36-52,5)	104-160 (41-63)	/	/
	KKA5120, KKA5370, KKA5130M	70-97 (27,5-38)	98-117 (38,5-46)	118-137 (46,5-54)	138-169 (54,5-66,5)	/	/
	KKA6000, TSS.500W-TSS503W	69-86 (27-34)	84-110 (33-43,5)	100-135 (39,5-53)	120-160 (47-63)	/	/
	MFA3000, MFA4000	/	/	/	/	/	80-125 (31,5-49)
	MAA3071	/	/	/	/	/	60-130 (23,5-51)

Gangsejl med løkker

Størrelsesskema

Sejlmodeller
MFA5100, MFA5200, MFA5210, MLA5100, MLA5200, MLA5210

Omkreds af lår				
				



Omkreds af hofte


cm (tommer)	40-51 (15,5-20)	52-64 (20,5-25)	65-79 (25,5-31)	80-100 (31,5-39)
65-79 (25,5-31)	S	S	/	/
80-99 (31,5-39)	S	M	M	/
100-122 (39,5-48)	/	M	L	L
123-160 (48,5-63)	/	/	XL	XL
			65-105 (25,5-41,5)	95-135 (37,5-53)
123-208 (48,5-82")	/	/	XXL	XXL Forlænget ben

Liggesejl

Størrelsesskema

Sejlmodeller	MAA1150, MAA1151, MAA1152
	MFA5000

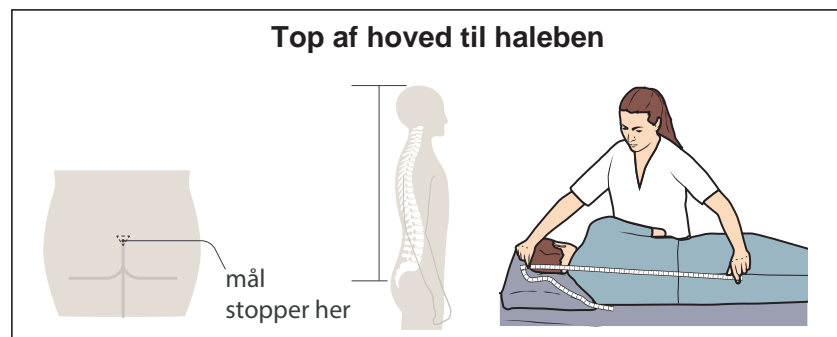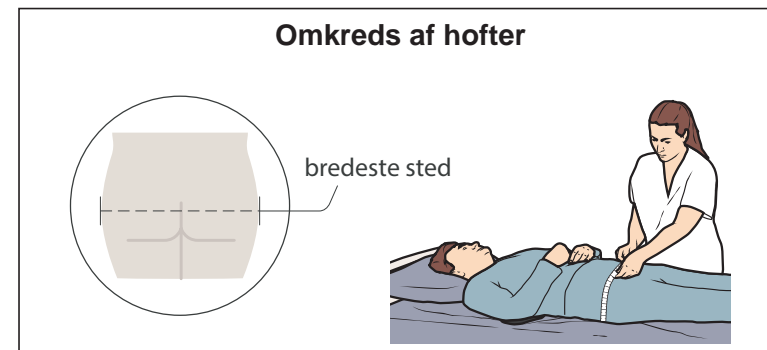

cm (tommer)	Maksimum 130 (51)	Maksimum 170 (67)
Maksimum 81 (32)	L	XL
Maksimum 90 (35,5)	/	One size passer de fleste