



1 Odstraňte všechny viditelné nečistoty.



2 Stiskněte tlačítko dezinfekce a podržte ho po dobu 2 sekund.




Pokud je vana vybavena systémem Hydromassage, systém se před použitím automaticky vydezinfikuje.


3 Vyčistěte a vydezinfikujte všechny povrchy a příslušenství.




Zvláštní pozornost věnujte červeně označeným oblastem.

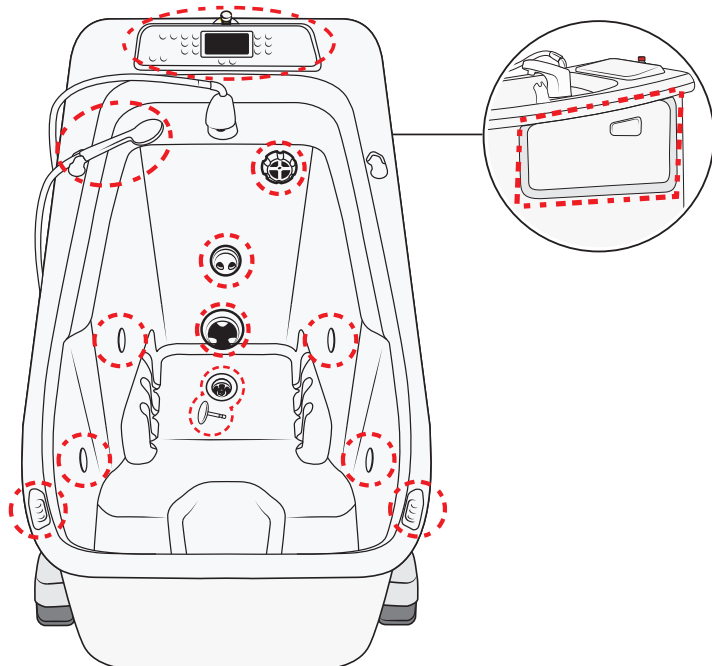


4 Nastříkejte dezinfekční prostředek do přepadu a odtoku.

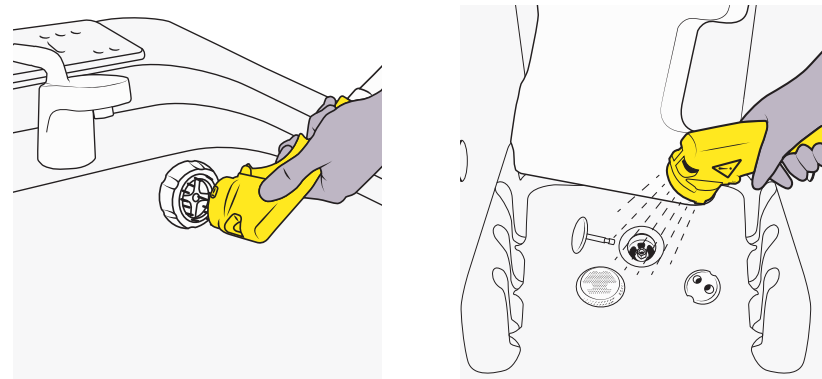

5 Rozprašovací rukojeť vložte zpět do držáku.

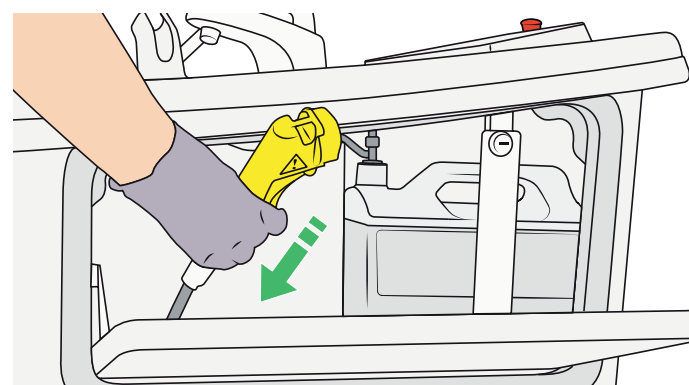


6 Stisknutím tlačítka dezinfekce spustíte dobu působení.

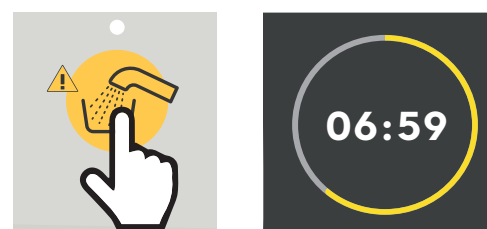

Počkejte, až uplyne doba působení.

7 Opláchněte všechny povrchy a příslušenství.

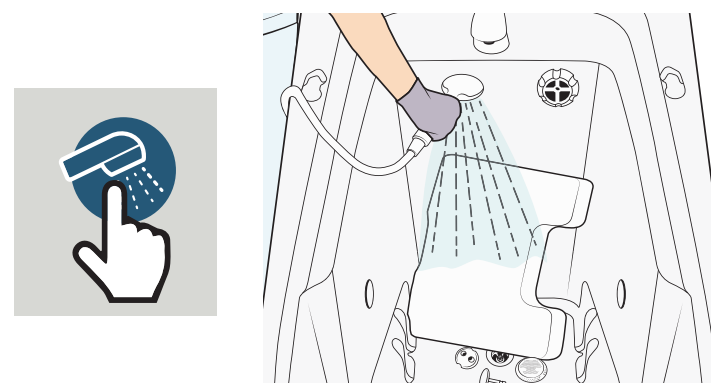

8 Stiskněte tlačítko sprchy a potvrďte, že byla dezinfekce dokončena.

