



1 Elimine toda la suciedad visible.



2 Pulse el botón de desinfección durante 2 segundos.




Si la bañera tiene Hydromassage, el sistema Hydromassage se desinfecta automáticamente antes de que el usuario pueda rociar.


3 Limpie y desinfecte todas las superficies y accesorios.




Preste especial atención a las zonas marcadas en rojo.

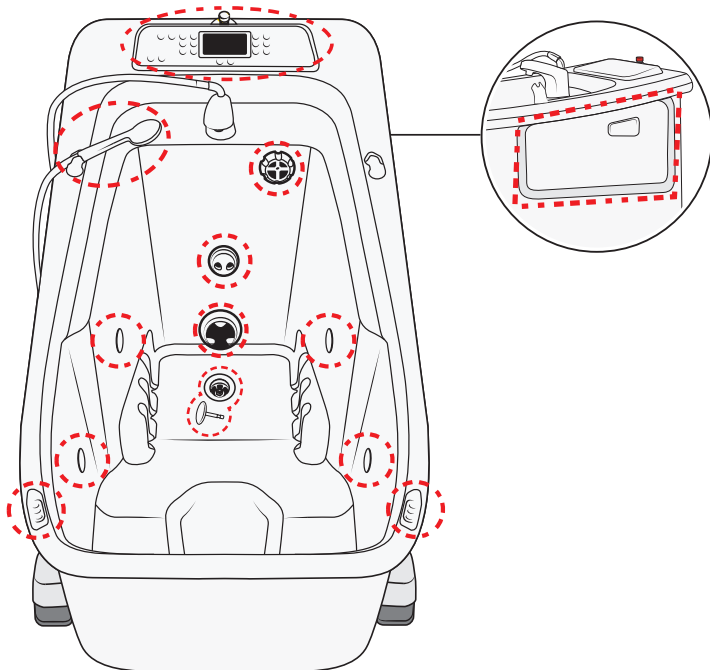



4 Rocíe el agujero de rebose y el desagüe.

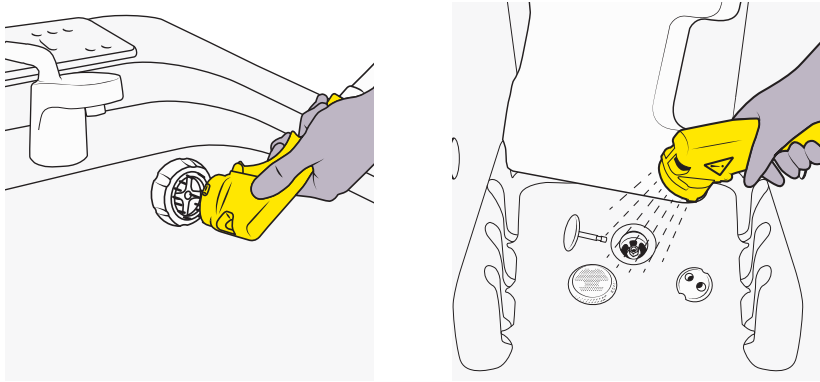

5 Vuelva a colocar el cabezal de rociado en su soporte.

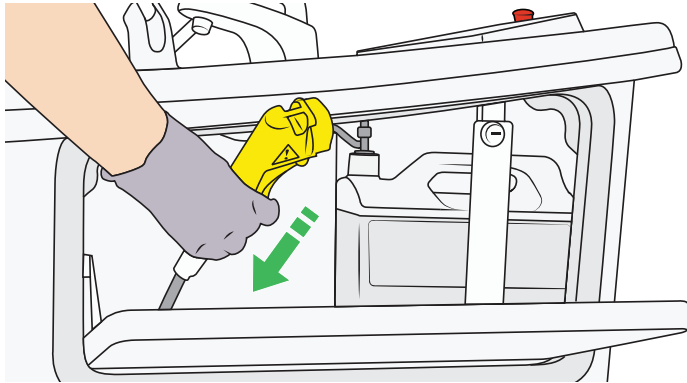

6 Pulse el botón de desinfección para iniciar el tiempo de contacto.

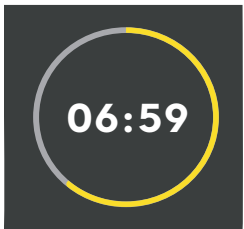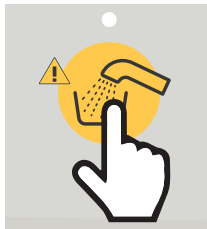

Espere a que finalice el tiempo de contacto.

7 Aclare todas las superficies y accesorios.



8 Pulse el botón de ducha para confirmar que la desinfección ha finalizado.

