



1 Fjern alt synlig smuss.



2 Hold desinfeksjonsknappen inne i to sekunder.




Hvis badekaret har Hydromassage, desinfiseres Hydromassage-systemet automatisk før du kan dusje.


3 Rengjør og desinfiser alle overflater og alt tilbehør.




Vær spesielt oppmerksom på områdene som er merket med rødt.

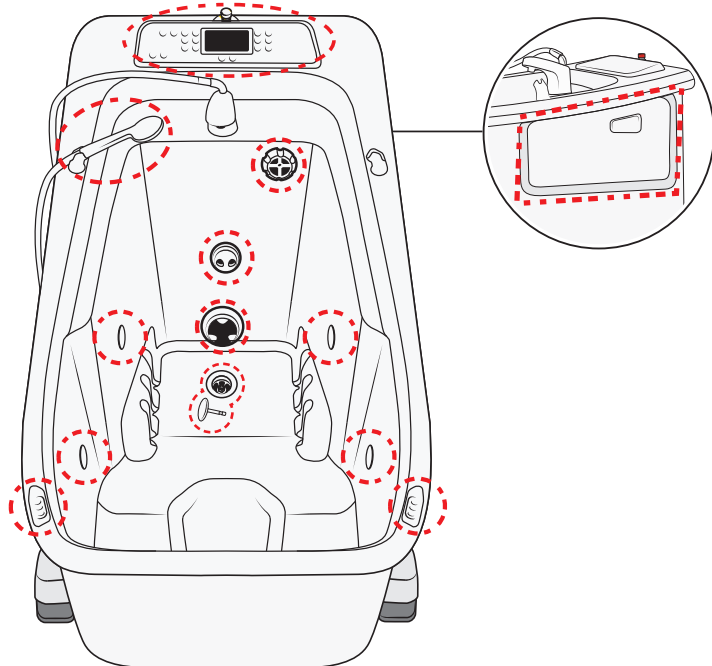


4 Spray inn i overløpsåpningen og avløpet.

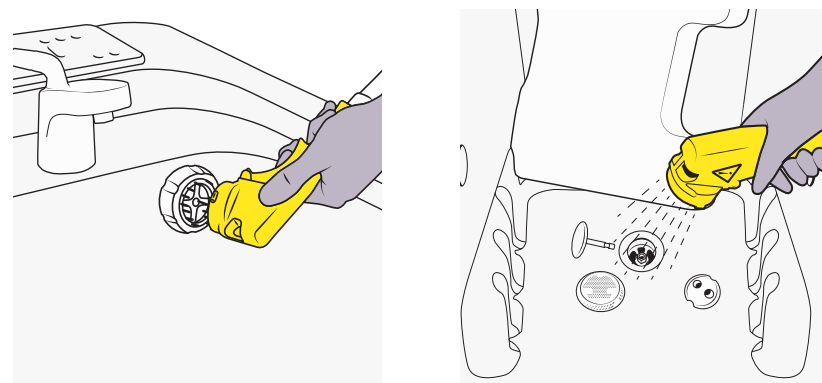

5 Sett dusjhåndtaket tilbake i holderen.

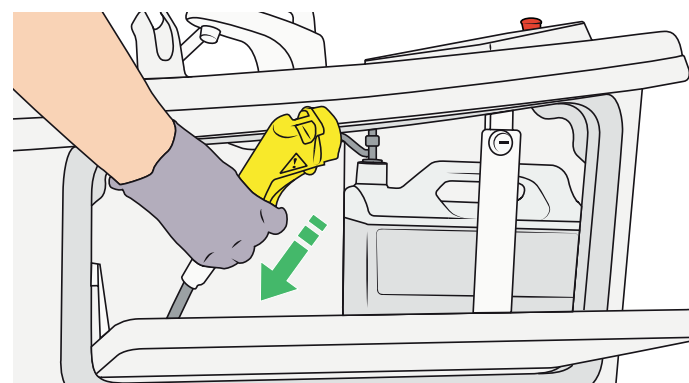


6 Trykk på desinfeksjonsknappen for å starte kontakttiden.

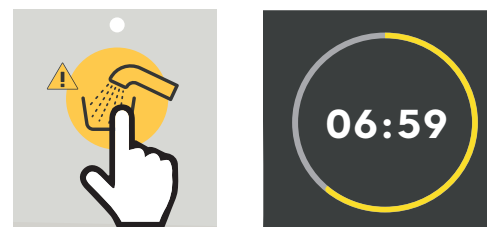

Vent til kontakttiden er slutt.

7 Skyll av alle overflater og alt tilbehør.

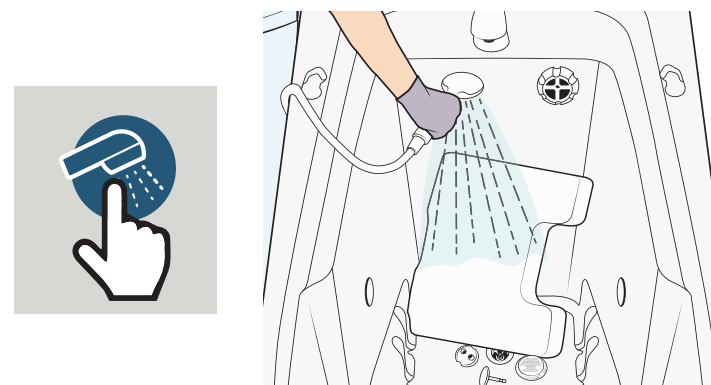

8 Trykk på dusjknappen for å bekrefte at desinfiseringen er fullført.

