




1 Usunąć wszystkie widoczne zabrudzenia.

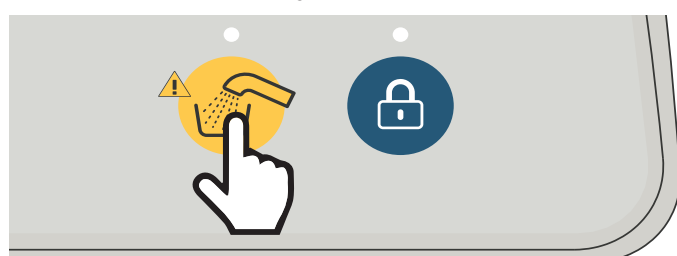

2 Nacisnąć przycisk Dezynfekcja i przytrzymać przez 2 sekundy.




Jeśli wanna jest wyposażona w funkcję hydromasażu, system Hydromassage jest automatycznie dezynfekowany przed rozpoczęciem rozpylania.


3 Wyczyścić i zdezynfekować wszystkie powierzchnie i akcesoria.




Zwrócić szczególną uwagę na obszary zaznaczone na czerwono.

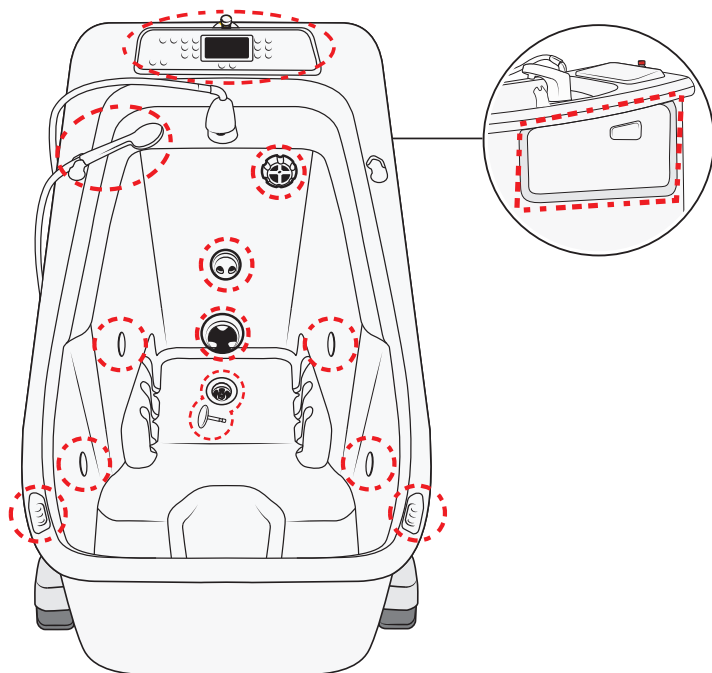



4 Spryskać otwór przelewowy i odpływ.

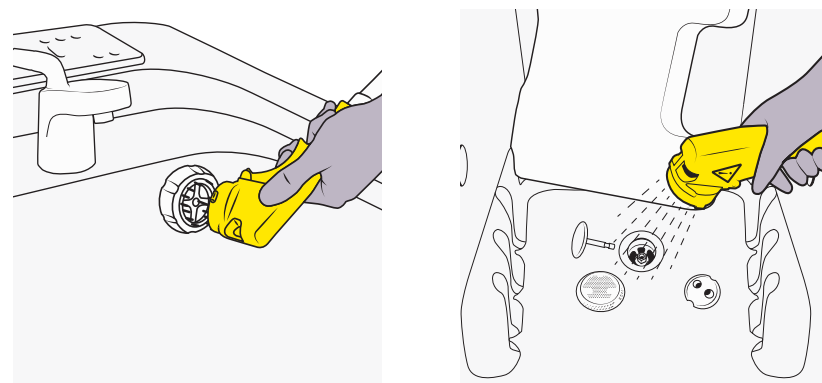

5 Dźwignię spryskiwacza wstawić z powrotem do uchwytu.

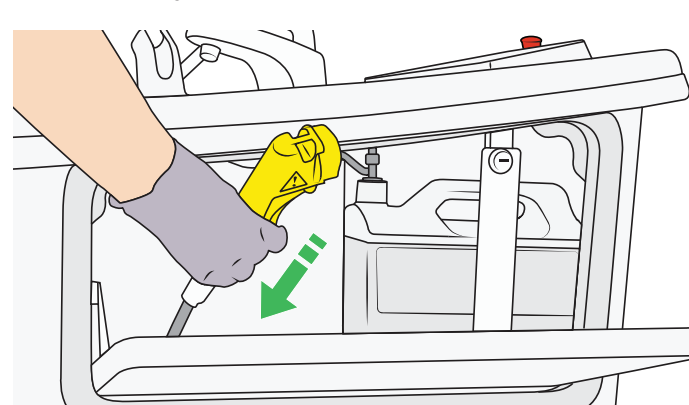


6 Wcisnąć przycisk dezynfekcji, aby rozpocząć czas kontaktu.

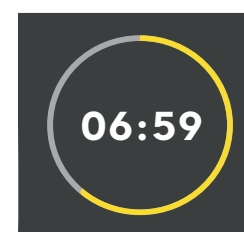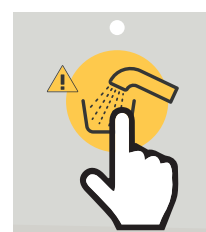

Począć na zakończenie czasu kontaktu.

7 Przepłukać wszystkie powierzchnie oraz akcesoria.

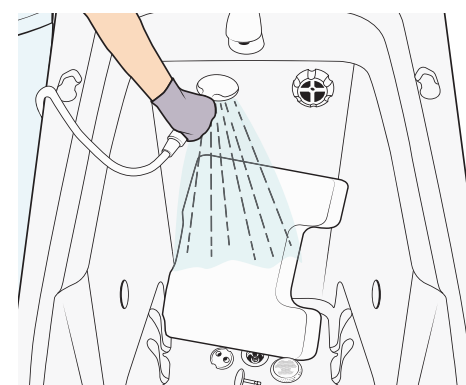

8 Nacisnąć przycisk Pysznica, aby potwierdzić zakończenie dezynfekcji.

