



1 Remova toda a sujidade visível.



2 Prima o botão de desinfeção durante 2 segundos.




Se a banheira tiver Hydromassage, o sistema Hydromassage é desinfetado automaticamente antes de poder pulverizar.


3 Limpe e desinfete todas as superfícies e acessórios.




Preste atenção especial às áreas marcadas a vermelho.

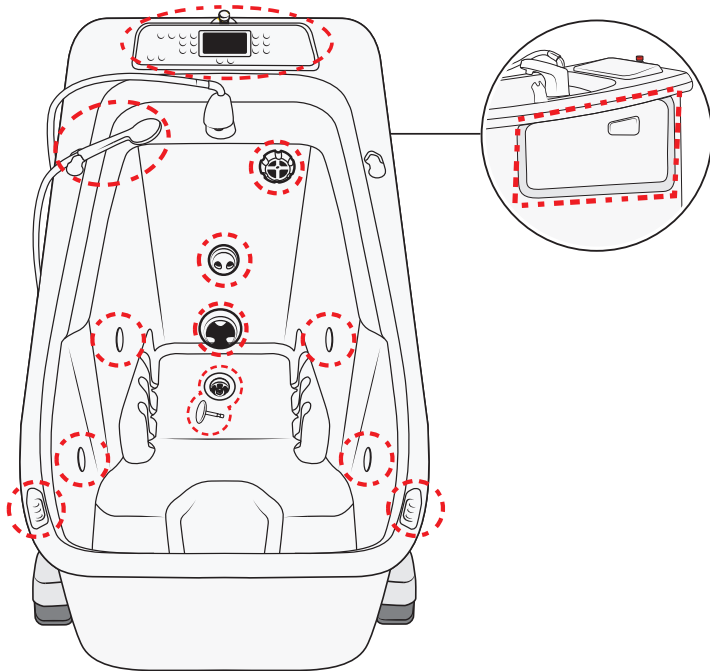


4 Pulverize na saída de transbordamento e no ralo.

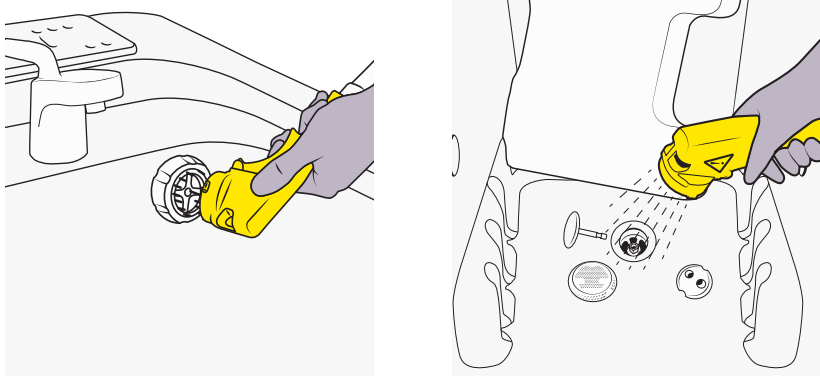

5 Coloque o manípulo aspersor de novo no suporte.

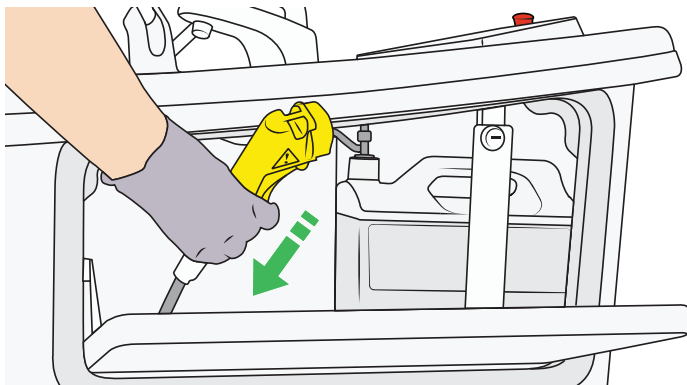

6 Prima o botão de desinfeção para iniciar o tempo de contacto.

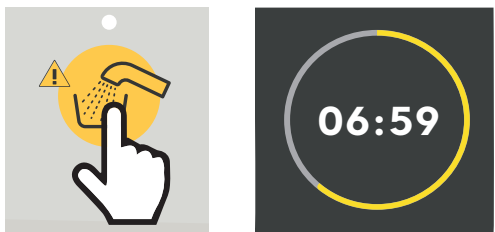

Aguarde que o tempo de contacto termine.

7 Enxague todas as superfícies e acessórios.



8 Prima o botão de chuveiro para confirmar que a desinfeção está concluída.

