




Čištění


- 1** Odstraňte všechny viditelné nečistoty.




- 2** Vyčistěte všechny povrchy a příslušenství.

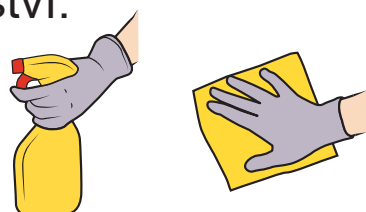

Zvláštní pozornost věnujte červeně označeným oblastem.

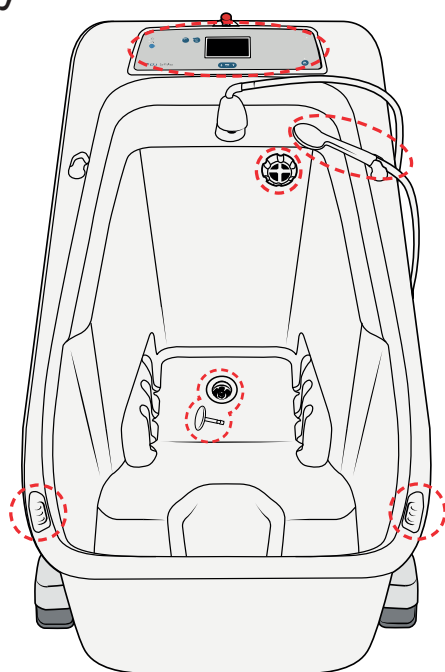


- 3** Opláchněte všechny povrchy a příslušenství.

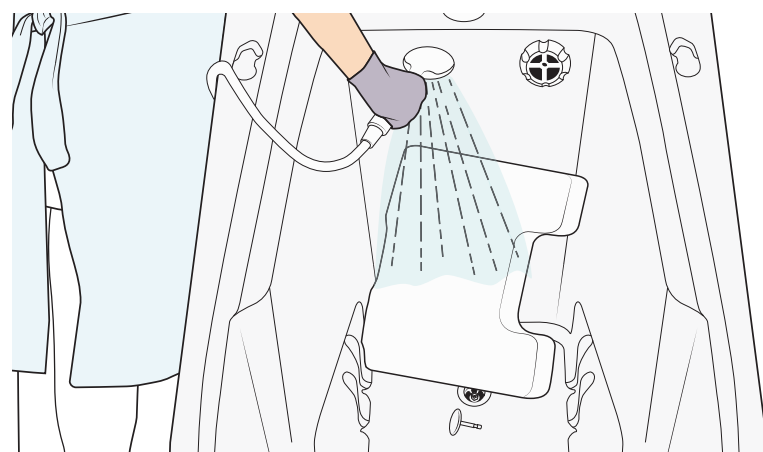

Dezinfekce


- 4** Nastříkejte dezinfekční prostředek do přepadu a odtoku.

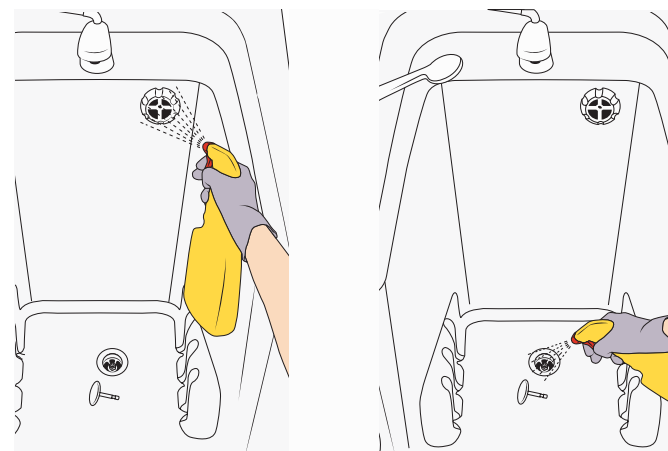

- 5** Naneste dezinfekční prostředek na všechny povrchy a příslušenství.



- 6** Dezinfekční prostředek nechte působit po dobu uvedenou v jeho návodu.

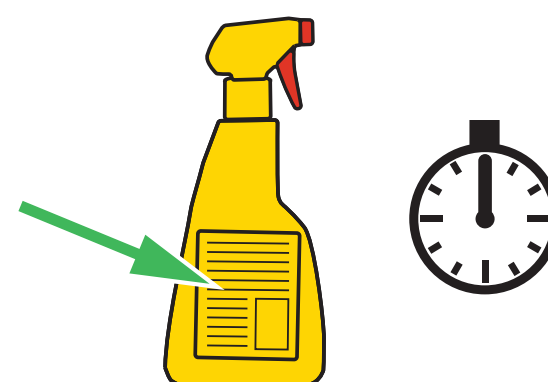

- 7** Opláchněte všechny povrchy a příslušenství.

