




Rengjøring


1 Fjern alt synlig smuss.




2 Rengjør alle overflater og alt tilbehør.

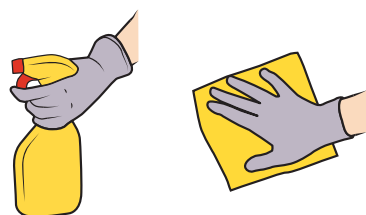

Vær spesielt oppmerksom på områdene som er merket med rødt.

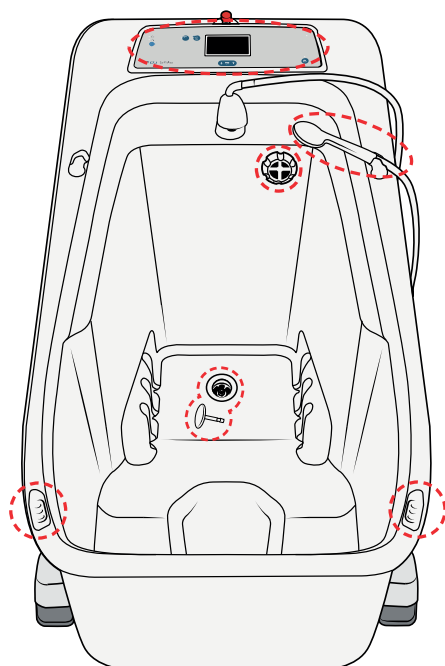


3 Skyll av alle overflater og alt tilbehør.

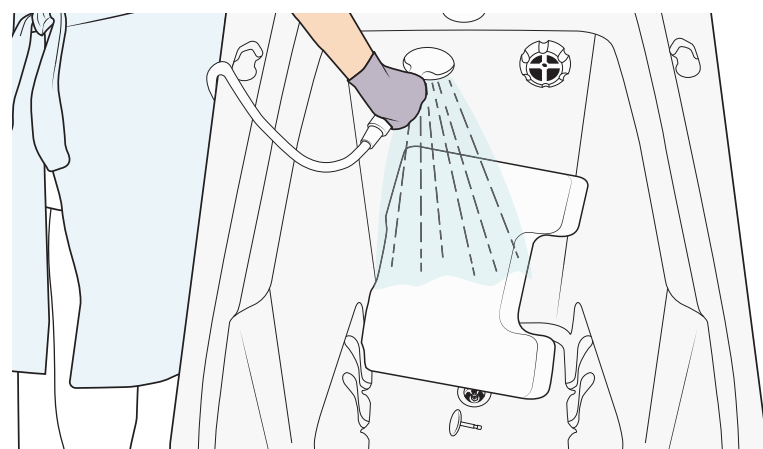

Desinfisering


4 Spray inn i overløpsåpningen og avløpet.

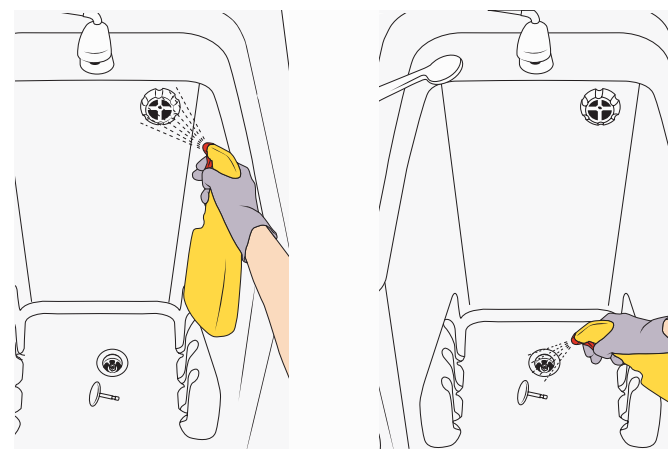

5 Spray desinfeksjonsmiddel på alle overflatene og alt tilbehøret.



6 La desinfeksjonsmiddelet sitte så lenge som angitt på desinfeksjonsmiddelet.

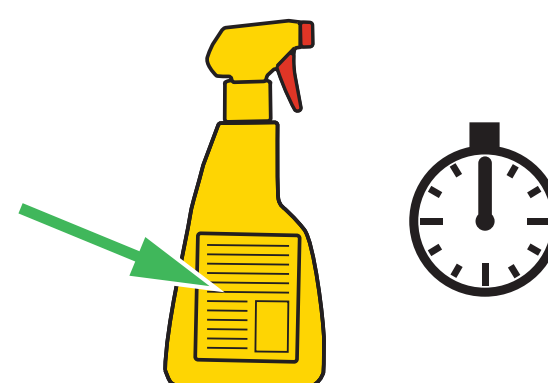

7 Skyll av alle overflater og alt tilbehør.

