




Czyszczenie


- 1** Usunąć wszystkie widoczne zabrudzenia.




- 2** Wyczyścić wszystkie powierzchnie i akcesoria.

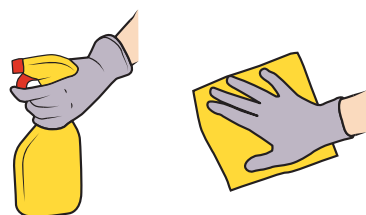

Zwrócić szczególną uwagę na obszary zaznaczone na czerwono.

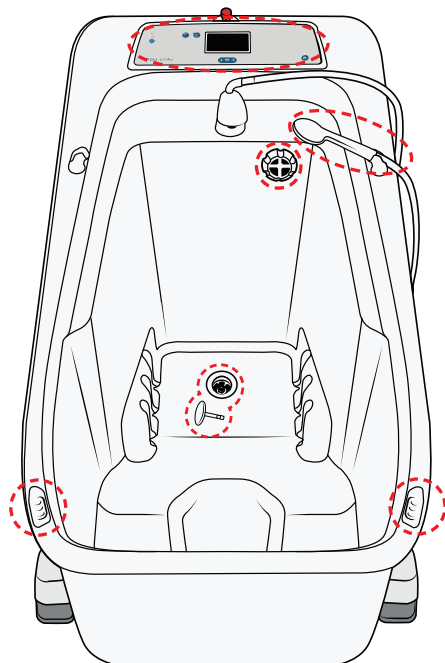


- 3** Przeplukać wszystkie powierzchnie oraz akcesoria.

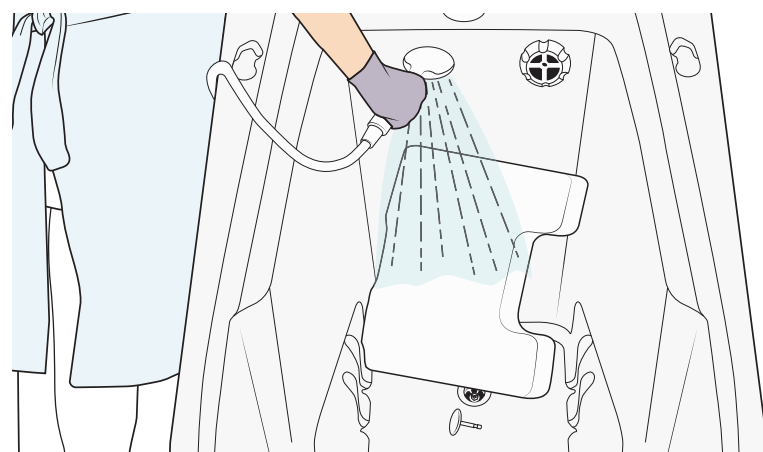

Dezynfekcja


- 4** Spryskać otwór przelewowy i odpływ.

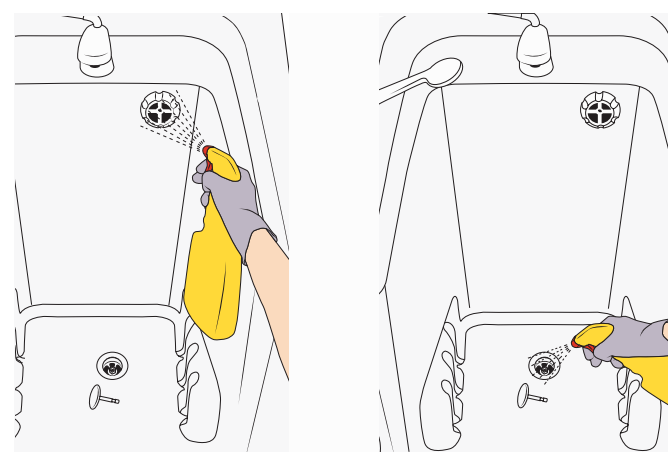

- 5** Rozpylić środek dezynfekcyjny na wszystkie powierzchnie i akcesoria.



- 6** Zapewnić właściwy czas na działanie środka dezynfekcyjnego zgodnie z jego instrukcją stosowania.

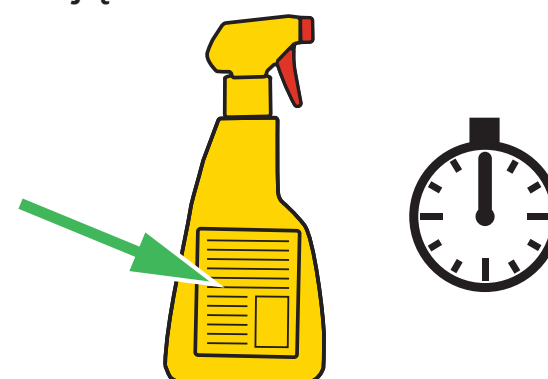

- 7** Przeplukać wszystkie powierzchnie oraz akcesoria.

