




Limpeza


1 Remova toda a sujeira visível.




2 Limpe todas as superfícies e acessórios.

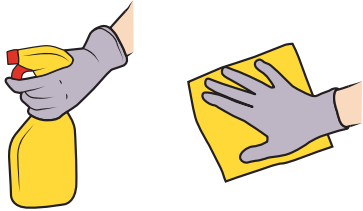

Preste atenção especial às áreas marcadas a vermelho.

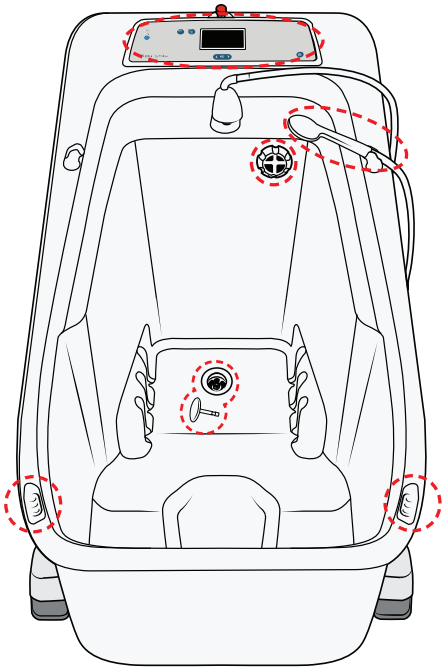


3 Enxague todas as superfícies e acessórios.

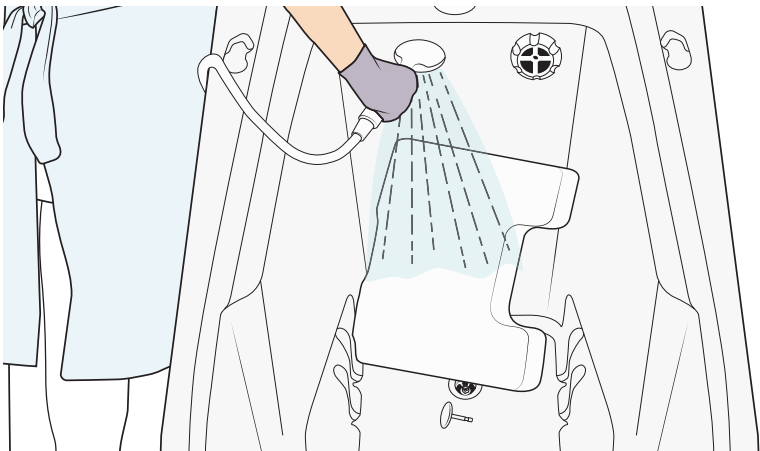

Desinfecção


4 Pulverize na saída de transbordamento e no ralo.

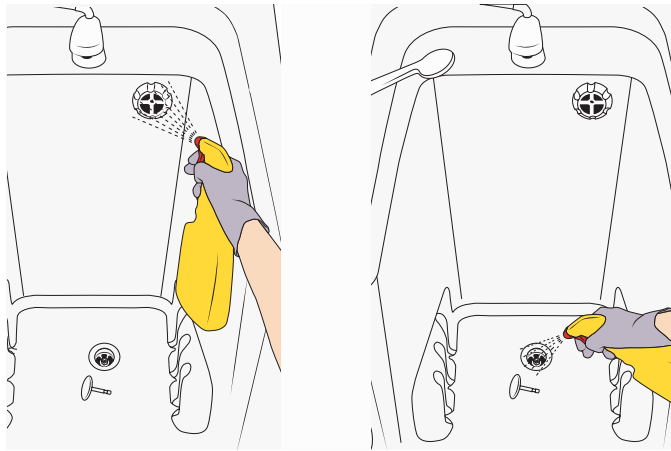

5 Aplique desinfetante em todas as superfícies e acessórios.



6 Deixe atuar durante um período de tempo apropriado, de acordo com as instruções do desinfetante.

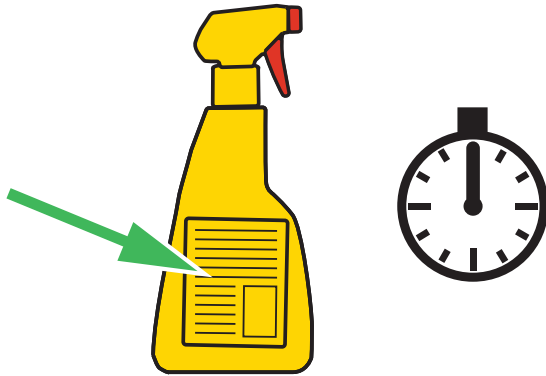

7 Enxague todas as superfícies e acessórios.

