


Symbliss


Badstol

Nödstopp

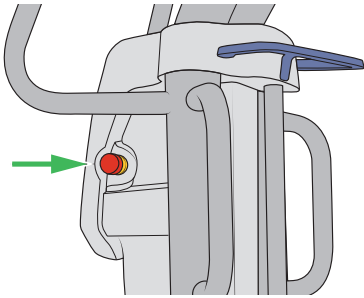

Tryck på nödstoppsknappen för att stoppa alla funktioner.

Reservfunktion höjning/sänkning

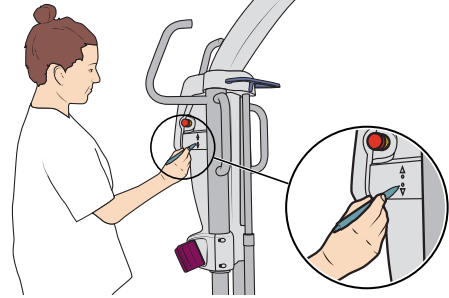

Tryck på nödstoppet.
För in ett smalt, trubbigt föremål i hålet och tryck för att höja eller sänka badstolen.


Säkerhetsbälten

1



Flytta över patienten till badkaret.

2

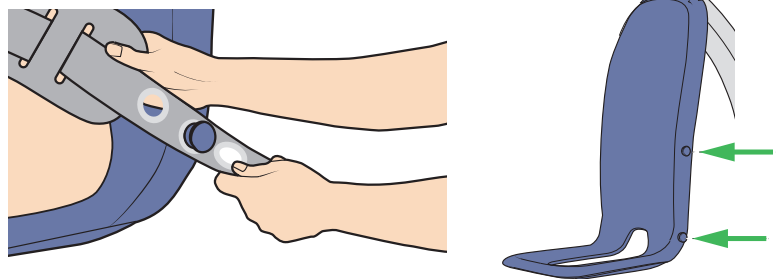

Fäst ena änden i bältesknappen på sidan av sitsen.
Höftsäkerhetsbälte: använd den nedre bältesknappen.
Bröstsäkerhetsbälte: använd den övre bältesknappen.


3



Risk för strypning.

Spänn fast säkerhetsbältena på andra sidan av sitsen.
Se till att säkerhetsbältena är placerade under armarna.

4

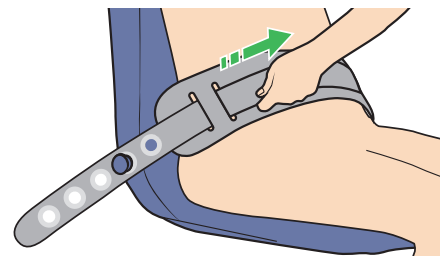


Dra i säkerhetsbältena för att kontrollera att de sitter fast ordentligt.


Benstöd – användning



Luta sitsen bakåt.

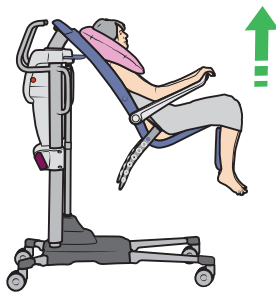


Höj badstolen.

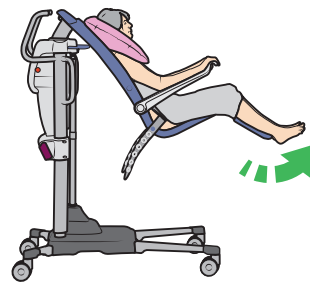


Ställ in benstödet.


Fälla ut

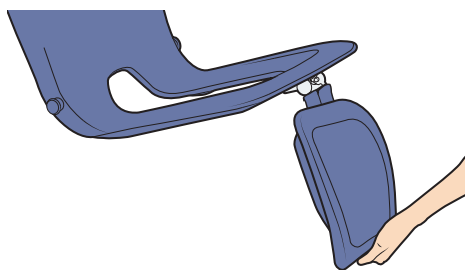


Lyft benstödet tills det låses på plats.

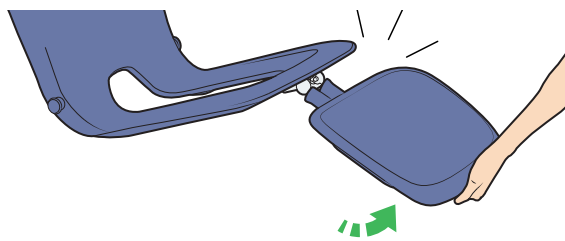

Fäll undan

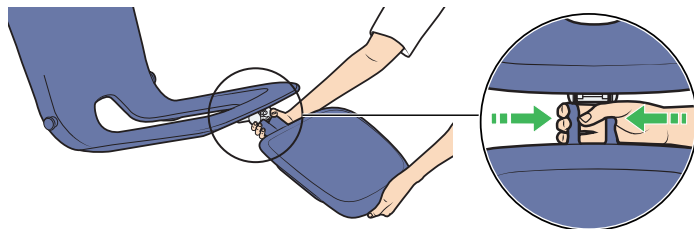


Lyft benstödet något och kläm ihop fäststiften.

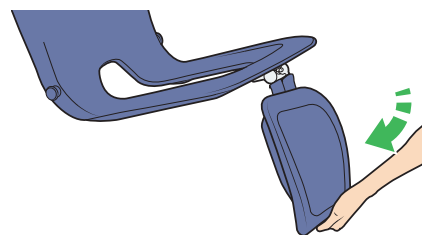

Sänk benstödet.


Benstöd – fästa och ta loss

Fästa

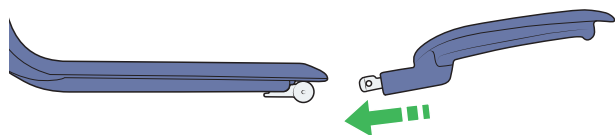

Håll benstödet som på bilden.
För in gångjärnsaxeln i gångjärnet.


Ta bort

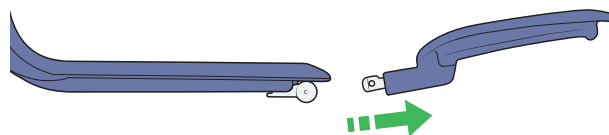

Höj benstödet som på bilden.
Kläm ihop fäststiften och lyft ut benstödet
ur leden.

Bromsar


Hjulbromsar

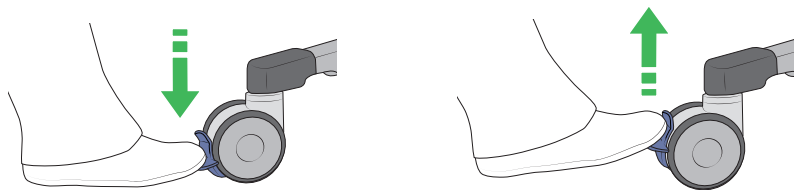

Aktivera bromsarna genom att trampa ned bromspedalen på alla fyra styrhjulen.

Lossa bromsarna genom att lyfta upp bromspedalen på alla fyra styrhjulen.


Centralbroms

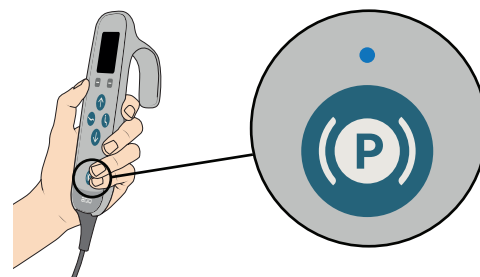

Tryck för att aktivera eller lossa centralbromsen.
Blå lampa = bromsar aktiverade.


Armstöd

Fästa

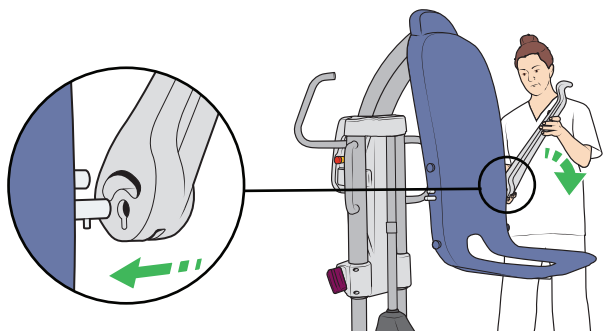


Håll armstödet som på bilden för att fästa det. Passa in hålen över fäststiften och tryck mot sitsen.

Ta bort

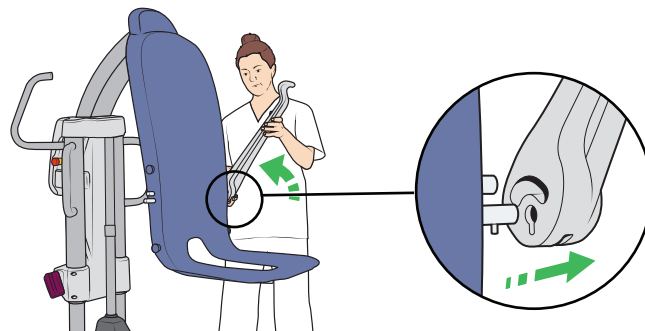

Ta bort armstödet genom att fälla upp det som på bilden. Dra det rakt utåt.

Manöverhandtag

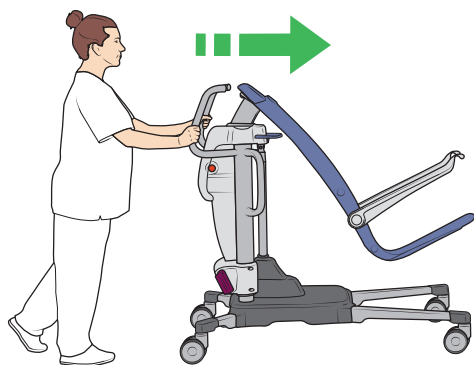

Använd de övre manöverhandtagen för transport.



Använd de nedre manöverhandtagen under styrning och omplacering.