




Rengöring

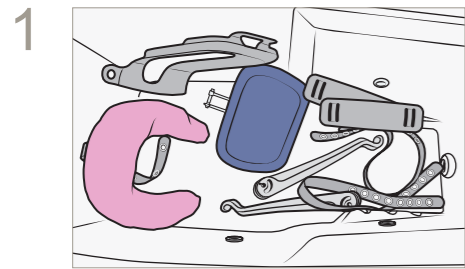


1 Placera lösa delar i botten av badkaret.
Placera badstolen över badkaret.



2 Skölj badstolen och de lösa delarna med vatten. Ta bort synlig smuts.




3 Skrubba badstolen och de lösa delarna med rengöringsmedel och en **ren** trasa.
Kom ihåg att rengöra handkontrollen, handtagen och nackstödsfästet.

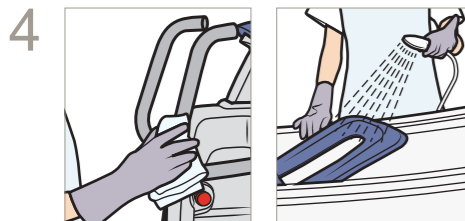

4 Ta bort rengöringsmedlet med vatten.




Desinficering

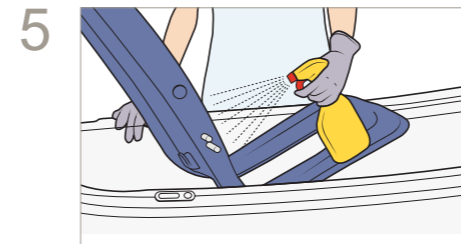


5 Spraya desinficeringsmedel på badstolen och på de lösa delarna.
Kom ihåg att desinficera handkontrollen, handtagen och nackstödsfästet.



6 Låt verka under en lämplig kontakttid.

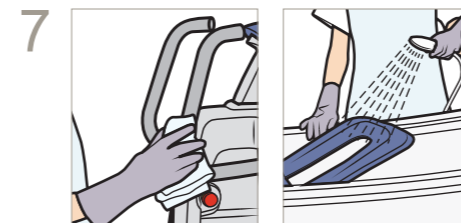

7 Ta bort desinficeringsmedlet med vatten.
Använd en **ren** våt trasa där det behövs.

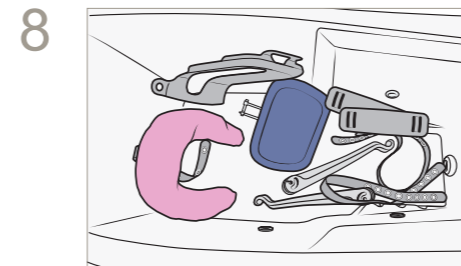

8 Låt alla delar torka eller torka med en ren handduk.